

# Tobii Dynavox Compass

## Verben in Gateway auto programmieren

Das nachfolgende Dokument erklärt, wie Sie in der Gateway Strategie mit automatischer Verbanpassung Verben ändern oder hinzufügen können.

### VERBEN IN GATEWAY AUTO ÄNDERN

---

1. Öffnen Sie die Seite, auf dem das Verb ist, das Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie den *Optionen Button* in der oberen rechten Ecke und anschließend *Setup*.



#### HINWEIS

Sollten Sie die Werkzeugleiste aktiviert haben, so wählen Sie das Zahnrad in der Werkzeugleiste aus.

---

3. Wählen Sie im Setup die Option *Vollversion* aus. Die Software wird nun in der Vollversion angezeigt und im oberen Bereich werden Werkzeuge zum Bearbeiten angezeigt.
4. Wählen Sie nun den Button aus, dessen Verb geändert werden soll.



#### HINWEIS

In der Vollversion wird immer die Hauptseite direkt angezeigt. Befindet sich der gewünschte Button nicht auf dieser Seite sondern auf einem Popup, so wählen Sie in der Werkzeugleiste das Feld links neben schließen aus. Es werden die geöffneten Popups angezeigt, aus der Sie Ihr Popup auswählen können.

---

5. Wählen Sie den roten *Eigenschaften Button* an der oberen linken Ecke des Buttons.
6. Gehen Sie auf die Registerkarte *Weitere* und ändern Sie dort den Objektnamen des Buttons in das Verb um, welches auf dem Button erscheinen soll.
7. Wählen Sie die Registerkarte *Inhalt* und drücken Sie in das Feld bei Aktionen. Der Skript-Editor wird geöffnet.
8. Wählen Sie das Drop-Down Menü oben rechts aus. Dort sind mehrere *User Events*: aufgeführt. Führen Sie die Schritte 9. bis 13. für alle User Events durch.
9. Wählen Sie ein User Event aus (z.B. User Event: 1,3p( this Object, value1, value2).
10. Wählen Sie in der Aktion *SetText* den ersten grün hervorgehobenen Eintrag.
11. Es öffnet sich die Auswahl *Bildschirmobjekte*. Wählen Sie hier den Namen des Objekts aus, welchen Sie unter 6. eingegeben haben und gehen Sie oben rechts auf *Auswählen*.
12. Wählen Sie in der Aktion *SetText* den zweiten grün hervorgehobenen Eintrag aus und geben Sie dort die entsprechende Verbform in **Anführungsstrichen** ein.



#### HINWEIS

Eine Liste, welche Verbform bei welchem User Event eingetragen werden muss, finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Dokuments.

---

13. Fahren Sie nun mit Schritt 9. fort und wählen Sie das nächste User Event aus.
14. Wenn Sie alle User Events bearbeitet haben, schließen Sie den Skript Editor über *Fertig*. Ändern Sie nun noch Symbol und Bezeichnung, sodass diese zum Verb passen und wählen Sie in der Werkzeugleiste *Schließen* aus, um die Vollversion zu verlassen.

---

# NEUES VERB IN GATEWAY AUTO HINZUFÜGEN

---

1. Öffnen Sie die Seite, auf dem das Verb ist, das Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie den *Optionen Button* in der oberen rechten Ecke und anschließend *Setup*.



## HINWEIS

Sollten Sie die Werkzeugleiste aktiviert haben, so wählen Sie das Zahnrad in der Werkzeugleiste aus.

---

3. Wählen Sie im Setup die Option *Vollversion* aus. Die Software wird nun in der Vollversion angezeigt und im oberen Bereich werden Werkzeuge zum Bearbeiten angezeigt.
4. Wählen Sie den leeren Button aus, an dessen Stelle ein Verb hinzugefügt werden soll. Löschen Sie diesen, indem Sie es markieren und unter *Ändern* den Unterpunkt *Löschen* auswählen.



## HINWEIS

In der Vollversion wird immer die Hauptseite direkt angezeigt. Befindet sich der gewünschte Button nicht auf dieser Seite sondern auf einem Popup, so wählen Sie in der Werkzeugleiste das Feld links neben schließen aus. Es werden die geöffneten Popups angezeigt, aus der Sie Ihr Popup auswählen können.

---

5. Markieren Sie einen beliebigen Button mit einem Verb und wählen Sie unter *Ändern* den Unterpunkt *Verdoppeln*. Ziehen Sie den verdoppelten Button nun an die leere Stelle.
6. Wählen Sie diesen Button aus und gehen Sie anschließend auf den roten *Eigenschaften Button* an der oberen linken Ecke des Buttons.
7. Gehen Sie auf die Registerkarte *Weitere* und ändern Sie dort den Objektnamen des Buttons in das Verb um, welches auf dem Button erscheinen soll.
8. Wählen Sie die Registerkarte *Inhalt* und drücken Sie in das Feld bei Aktionen. Der Skript-Editor wird geöffnet.
9. Wählen Sie das Drop-Down Menü oben rechts aus. Dort sind mehrere *User Events*: aufgeführt. Führen Sie die Schritte 10. bis 14. für alle User Events durch.
10. Wählen Sie ein User Event aus (z.B. User Event: 1,3p( this Object, value1, value2).
11. Wählen Sie in der Aktion *SetText* den ersten grün hervorgehobenen Eintrag.
12. Es öffnet sich die Auswahl *Bildschirmobjekte*. Wählen Sie hier den Namen des Objekts aus, welchen Sie unter 6. eingegeben haben und gehen Sie oben rechts auf *Auswählen*.
13. Wählen Sie in der Aktion *SetText* den zweiten grün hervorgehobenen Eintrag aus und geben Sie dort die entsprechende Verbform in **Anführungsstrichen** ein.



## HINWEIS

Eine Liste, welche Verbform bei welchem User Event eingetragen werden muss, finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Dokuments.

---

14. Fahren Sie nun mit Schritt 10. fort und wählen Sie das nächste User Event aus.
15. Wenn Sie alle User Events bearbeitet haben, schließen Sie den Skript Editor über *Fertig*. Ändern Sie nun noch das Symbol und die Bezeichnung, sodass diese zum neuen Verb passen und wählen Sie in der Werkzeugleiste *Schließen* aus, um die Vollversion zu verlassen.

| User Event | Einzutragende Verbform                  | Beispiel            |
|------------|---|---------------------|
| 1s         | 1. Person, Singular, Präsens            | Ich "laufe"         |
| 2s         | 2. Person, Singular, Präsens            | Du "läufst"         |
| 3s         | 3. Person, Singular, Präsens            | Er "läuft"          |
| 1,3p       | 1. & 3. Person, Plural, Präsens         | Wir "laufen"        |
| 2p         | 2. Person, Plural, Präsens              | Ihr "lauft"         |
| normal     | Infinitiv/Grundform                     | Sie "laufen"        |
| p1,3s      | 1. & 3. Person, Singular, Vergangenheit | Ich "lief"          |
| p2s        | 2. Person, Singular, Vergangenheit      | Du "liefst"         |
| p1,3p      | 1. & 3. Person, Plural, Vergangenheit   | Wir "liefen"        |
| p2p        | 2. Person, Plural, Vergangenheit        | Ihr "liefet"        |
| perfekt    | Partizip Perfekt                        | Wir sind "gelaufen" |