



Wir singen euch an den lieben Advent

Adventslieder singen mit GoTalk und BIGmack/-Step

Der Advent ist eine tolle Zeit, um zu singen und sich gemeinsam auf Weihnachten zu freuen. Nichtsprechende Kinder können mitmachen, wenn die Liedtexte vorher stropfenweise auf einen einfachen Talker aufgezeichnet werden.

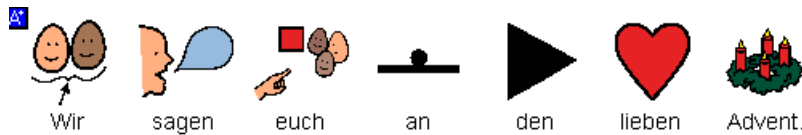

Passend zum Lied *Wir sagen euch an den lieben Advent* bieten wir Ihnen eine Vorlage für GoTalk 4+ und vier Vorlagen für BIG/LITTLEmack oder Step-By-Step - für jede Strophe eine.

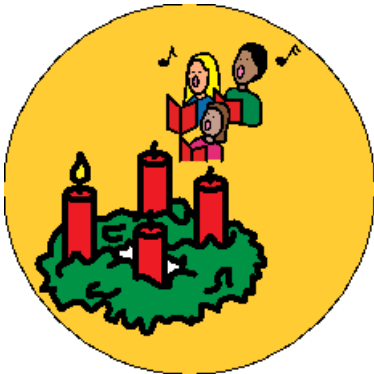

Für BIG/LITTLEmack oder Step-By-Step

Schneiden Sie einfach die Vorlagen aus und legen Sie diese unter die durchsichtige Kappe Ihrer Taste. Verfügen Sie über mehrere sprechende Tasten, können Sie das Lied aufteilen. Z.B. je eine Strophe für einen BIGmack.

Für GoTalk 4+

Schneiden Sie die maßgeschneiderte Vorlage aus und legen Sie diese in den GoTalk 4+ ein. Auf jeder Taste können Sie eine Strophe aufsingen. Die beiden Kerntasten können andere "Mitsänger" auffordern, mehr oder weniger Einsatz zu zeigen!

