


Deutsche Fußball-Symbole für den Boardmaker

Das Runde muss ins Eckige! Die Fußball-Winterpause ist vorbei - pünktlich zum Rückrunden-Start der ersten Bundesliga stellen wir Ihnen deutsche Fußball-Symbole für Ihre PCS-Sammlung zur Verfügung, die der Boardmaker-Hersteller auf unsere Anregung hin anfertigte.

Um die neuen PCS-Symbole zu nutzen, müssen Sie diese in Ihren Boardmaker importieren.

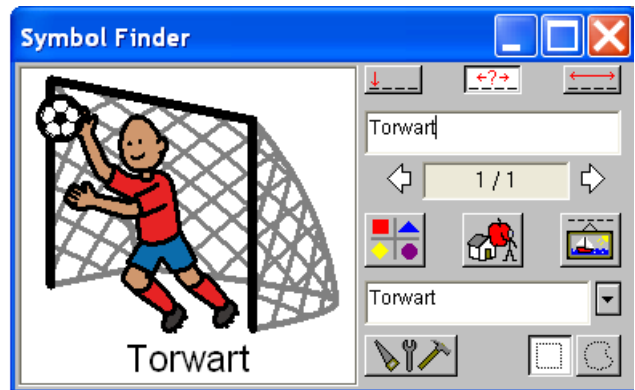

- Schließen Sie das Programm *Boardmaker*
- Laden Sie die Datei *rehavista-pcs-fussball-pc2.zip* von unserer Internet-Seite herunter
- Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken
- Kopieren Sie die entzippte Datei *fussball-deutsch.pc2* in das Verzeichnis *MJ Symbole - Zusatz*.
Überlicherweise finden Sie dieses Verzeichnis in Ihrem *Windows Explorer* unter (siehe Seite 2):

Betriebssysteme bis Windows XP :

C:\Programme\Boardmaker with SD Pro\Symbole\MJ Symbole - Zusatz

Betriebssysteme Windows Vista / Windows 7 :

C:\Users\Public\Documents\Boardmaker Software Family\Symbole\MJ Symbole - Zusatz

bzw. :

C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Boardmaker Software Family\Symbole\MJ Symbole - Zusatz

Öffnen Sie Ihr Programm Boardmaker. Folgende Symbole stehen Ihnen nun zur Verfügung, wenn Sie diese als Suchbegriff in Ihren *Symbolfinder* eingeben: *Torwart*, *Elfmeter*, *schießen*, *Kopfball*, *gelbe Karte*, *rote Karte*



schießen



Elfmeter



gelbe Karte



Torwart



Kopfball




rote Karte

Wo befindet sich der Ordner "MJ Symbole - Zusatz"?


Öffnen Sie den Windows Explorer.

(klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den grünen Start- Button, wählen Sie Explorer)

Bis Windows XP :

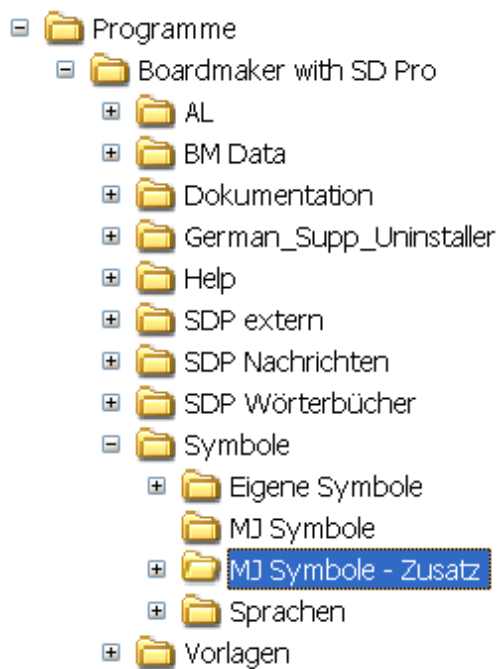

Windows Vista / Windows 7:

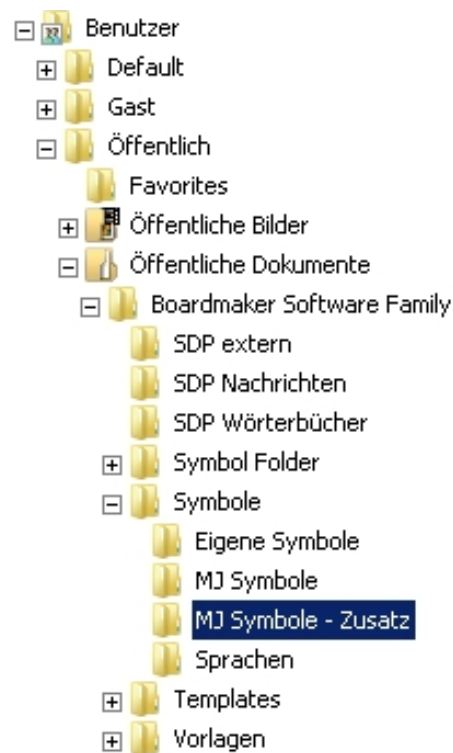

schießen



Elfmeter



gelbe Karte



Torwart



Kopfball



rote Karte