



Teilhabe und Interaktion

Wasser und Meer




Das Meer ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Über unsere Gewässer gibt es viel zu lernen, z.B. im Sachunterricht der Schule, als kreatives Projekt im Kindergarten oder zu Hause vor dem Familienurlaub am Strand. Um beeinträchtigte Kinder aktiv teilhaben zu lassen, gibt es viele Ideen, die mit einfachen Hilfsmitteln umzusetzen sind.

Materialien:

- Aquarium oder Glasbehälter
- Handmixer (batteriebetrieben)


UK-Materialien:

- Batterieunterbrecher + Taster
- BIGmack/Step-By-Step
- QuickTalker 7, 12 oder 23

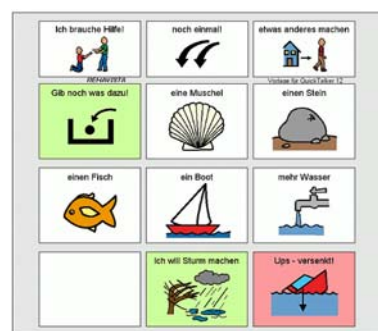

So geht's:

1. Füllen Sie ein Aquarium mit Wasser
2. Fordern Sie Ihre Schüler auf, Objekte von zu Hause mitzubringen, die typischerweise in Gewässern gefunden werden (z.B. Sand, Steine, Muscheln, Boote, Plastikfische...)
- 3.

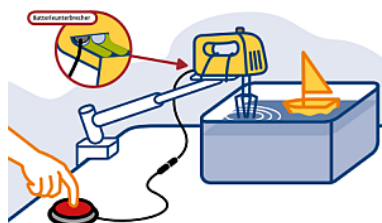

Optional: Adaptieren Sie einen Handmixer mit einem Batterieunterbrecher und schließen Sie einen externen Taster an. Befestigen Sie den Mixer mit einer passenden Halterung (z.B. Friction Arm) am Aquarium.

UK Aktivitäten

- Ursache&Wirkung: Lassen Sie beeinträchtigte Personen durch Druck auf die Taste, die über den Batterieunterbrecher mit dem Mixer verbunden ist, „Wellen Schlagen“.
- Ursache&Wirkung: Nutzen Sie ein Sprechende Taste (z.B. BIGmack), als Bedienelement. Drückt der Schüler die Taste, erklingt erst eine Aufnahme, dann setzt sich der Mixer in Bewegung („Achtung, jetzt wird's stürmisch!“ oder „Windstärke 10!“).
- Interaktion: Verwenden Sie einen Step-By-Step, um das Kind mehrere Nachrichten hintereinander abrufen zu lassen: („Windstärke 1, Windstärke 2, ...“ usw. Hier können weitere Kinder zur Unterstützung kräftig pusten z.B. mit einem Strohhalm.
- Auswählen/Bestimmen: Bereiten Sie einen QuickTalker so vor, dass das (sprach)beeinträchtigte Kind verschiedene Meeresbewohner auswählen kann. Die Objekte werden von Klassenkameraden oder Geschwistern ins Aquarium gesetzt.
- Gemeinsam Singen: Wählen Sie ein Seemannslied mit wiederkehrendem Vers. An der passenden Stelle löst das (sprach-)beeinträchtigte Kind den BIGmack aus und erklingt der Refrain (z.B. Holahi-Holaho für: Eine Seefahrt, die ist lustig).