

Deutsche Symbole für den Boardmaker



Hurra - die deutsche Symbolsammlung ist da!

Ab sofort ist eine deutsche Symbolsammlung für den Boardmaker verfügbar! Im Anschluss an unsere Schulungstour im April haben Sie uns viele Vorschläge zugesandt, die wir an Mayer-Johnson weiterleiteten. Nun ist es endlich soweit: Über 100 "typisch deutsche" Symbole stehen für Sie kostenlos zum Download bereit! Dazu gehören Begriffe wie Bundeskanzlerin, Kölner Dom, Gelber Sack, Weißbier, Spargel oder Rollmops.

Für den Import der deutschen PCS-Symbole in Ihren Boardmaker müssen Sie die Installations-Datei zunächst herunterladen. **So geht's:**

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „symbole-dt.exe“ und wählen Sie „Ziel speichern unter...“
- Wählen Sie den gewünschten Zielort, z.B. „Desktop“ oder „Eigene Dateien“
- Wählen Sie *speichern*



Import der Symbole in den Boardmaker. So geht's:

- Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Datei „symbole-dt.exe“
- Wählen Sie *ausführen*
- Bestätigen Sie die ausgewählte Sprache *deutsch* mit *OK*
- Bestätigen Sie nochmals mit *OK*
- Öffnen Sie Ihren Boardmaker (Sollte er bereits geöffnet gewesen sein, schließen Sie das Programm und öffnen es danach erneut)
- Öffnen Sie den Symbolfinder
- Geben Sie z.B. *Bundeskanzlerin* in das Suchfeld ein.
- Boardmaker schlägt Ihnen ein Symbol für die Bundeskanzlerin vor.



Ihr Vorschlag ist nicht dabei? Nicht wundern: Symbolvorschläge, die nicht nur für Deutschland sinnvoll sind, sammeln wir für die allgemeinen Symbol-Bibliotheken.

Wir sammeln weiter. Bitte senden Sie Ihre Wort-Vorschläge mit sinngemäßem Foto oder Illustrationen an boardmaker@rehavista.de