



# MyTobiiDynavox für Experten

## ZAK – einfach pragmatisch

.....

### 1. MyTobiiDynavox-Experten-Account anlegen

**Hinweis:** Wenn Sie bereits einen MyTobiiDynavox-Experten-Account nutzen, weiter mit 2.)

- Gehen Sie auf die Internetseite [www.mytobiidynavox.com](http://www.mytobiidynavox.com)
- Wählen Sie in der oberen Leiste der Homepage *Registrieren*, um ein neues MyTobiiDynavox-Konto einzurichten.
- Geben Sie dort Ihre Daten ein und klicken Sie anschließend unten rechts auf *Registrieren*.
- Wählen Sie auf der Übersichtsseite Ihres MyTobiiDynavox-Kontos *Abonnements*.
- Wählen Sie anschließend *Weisen Sie bitte Ihre Qualifikation nach*.
- Klicken Sie im Text unterhalb des weißen Bereichs zur Eingabe der ASHA-Mitgliedsnummer auf den blauen Link *click here to request access*.
- Geben Sie auf der sich neu öffnenden Seite *Verify Professional Membership* Ihre Daten ein.
- Wählen Sie unter *Professional Affiliation* Ihren Mitgliedsverband bzw. *Other Affiliation* aus.  
→ Wenn Sie *Other* gewählt haben, machen Sie bitte im entsprechenden Feld weitere Angaben zu Ihrer Einrichtung (z. B. Beratungsstelle, Praxis, Schule).
- Geben Sie zusätzlich im Feld *Professional Membership Number/ID* an, wie Sie auf das Programm aufmerksam geworden sind (z.B. Name des/der BeraterIn, Messe, Kongress etc.).
- Klicken Sie abschließend auf *Submit*.
- Nach einer maximalen Bearbeitungszeit von 10 Tagen sollten Sie für das Programm freigeschaltet werden. Sie werden dazu über eine E-Mail benachrichtigt.

### 2. App Tobii Dynavox Compass Connect herunterladen

- Laden Sie sich die App *Tobii Dynavox Compass Connect* aus dem App Store herunter.  
**Hinweis:** Die App wird ab iPad 2 unterstützt.
- Menüsprache auf Deutsch umstellen:  
→ Gehen Sie in das *Setup*, indem Sie in der App das Zahnrad oben links auswählen. Sollte dieses nicht angezeigt werden, wählen Sie den *Optionen-Button* oben rechts.  
→ Gehen Sie anschließend auf *Settings* und auf den Menüpunkt *Interface*.  
→ Wischen Sie dort bis zur Option *Language* herunter. Wählen Sie hier Deutsch als Sprache und bestätigen Sie die Auswahl mit dem grünen *Done-Button*.  
→ Die Software wird nun auf Deutsch umgestellt.

### 3. ZAK exklusiv freischalten lassen

- Schicken Sie eine E-Mail an [zak@rehavista.de](mailto:zak@rehavista.de) mit der Bitte, das ZAK Kommunikationsbuch freischalten zu lassen.
- Geben Sie hierbei unbedingt die Ihrem MyTobiiDynavox-Account zugrundeliegende E-Mail-Adresse an!



#### 4. ZAK installieren

Nach der Freischaltung können Sie ZAK in der Compass Connect-App mit Ihrem *MyTobiiDynavox*-Account installieren:

- Gehen Sie ins Setup, indem Sie den Setup-Button (graue Ecke) oben rechts auswählen und wählen Sie dort *Sichern/Laden* und den Menüpunkt *Laden von MyTobiiDynavox*.  
**Hinweis:** Überprüfen Sie bitte unter *Anmeldung verwalten*, ob Sie dort mit Ihrem Benutzernamen oder der verwendeten E-Mailadresse angemeldet sind. Falls nicht, klicken Sie auf *Anmelden* und melden sich an. Anschließend wählen Sie den Menüpunkt *Laden von MyTobiiDynavox* aus.
- Wählen Sie die Sicherung *ZAK* und klicken anschließend auf *Auswählen*. Die Inhalte werden heruntergeladen.
- Gehen Sie dann über *Zurück* wieder ins Setup-Menü und wählen *Hilfe* aus. Dort dann *Nach Symbolen suchen* anklicken und die benötigten METACOM-Symbole auf das Gerät laden. Anschließend gehen Sie über *Zurück* wieder ins Setup-Menü. Dort können Sie unter *Sprachausgabe* und *Stimmen verwalten* noch weitere deutsche Stimmen herunterladen.
- Nun können Sie ZAK verwenden und finden es auch in den Premiumseitensets Ihres *MyTobiiDynavox*-Accounts.

**Hinweis:** Das Gerät muss sich mit dem Internet verbinden, damit die Berechtigung überprüft werden kann. Zum Speichern der Berechtigung schließen Sie die App einmal mit bestehender Internetverbindung und trennen diese erst danach.