

Produktinfo

GoTalk

Zweckbestimmung und Einsatzgebiete

Der GoTalk wurde als Kommunikationshilfe für Menschen ohne eigene Lautsprache entwickelt. Der Anwender spricht mit dem GoTalk durch Drücken der gewünschten Aussage.

Der GoTalk hilft im Alltag beim Erlernen von Handlungsabläufen, z.B. in der Schule und am Arbeitsplatz, und ermöglicht Gespräche mit den Mitmenschen. In der Schule wie bei der Arbeit werden oft spezifische Fachwörter verwendet. Eine genaue Analyse dieser Begriffe hilft, das richtige Vokabular für den GoTalk herauszufinden. Der GoTalk unterstützt so den Anwender im Unterricht wie bei der Arbeit im Gespräch mit Schülern und Lehrern, Kollegen und Vorgesetzten.

Der GoTalk9 ist leicht, robust und einfach zu bedienen und mit sechs Minuten Aufnahmezeit sehr leistungsfähig. Es stehen in vier Ebenen je neun Nachrichten zur Verfügung. Insgesamt können also 36 Mitteilungen gespeichert werden. Die Kodierung der Nachrichten erfolgt über Symbole oder Stichworte, die einfach unter das Fingerführ raster geschoben werden. Durch Druck auf die entsprechende Taste wird die ausgewählte Nachricht abgespielt.

Arbeitsmaterialien und -dokumentation online:
www.gotalk.de



Abb.: **GoTalk9**

Typische Indikationen

Abklärung und Übung, lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, Symbolverständnis vorhanden.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.
Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

REHAVISTA GmbH E-Mail info@rehavista.de
Pulsstraße 7 Internet www.rehavista.de
D-14059 Berlin Info 0800 REHAVISTA (7 34 28 47)

GoTalk-Info-MPG
V1.11 • 20.01.2005

REHAVISTA[®]
Kommunikationshilfen
für Menschen mit Behinderung



Beschreibung der Eigenschaften und Funktionen

Eine Kurzanleitung auf der Rückseite des GoTalk hilft den Betreuenden das Gerät unterwegs korrekt einstellen zu können.

Merkmale

Der GoTalk9 hat eine Aufnahmekapazität von sechs Minuten. Diese werden unter 36 möglichen Nachrichten, neun pro Ebene, aufgeteilt. Jeweils die ersten zwei Tasten der obersten Zeile stehen für längere Nachrichten zur Verfügung, sie haben eine Kapazität von 15 Sekunden. Die restlichen sieben Tasten haben einen Speicher von je 8,5 Sekunden. Auch wenn die Batterien verbraucht sind, bleiben die gespeicherten Mitteilungen erhalten. Bei Neuaufnahme wird die alte Nachricht gelöscht.

Per Druck auf eine der 5 cm * 5,5 cm großen Tasten spielt der GoTalk9 die Nachricht ab. Während des Abspielens einer Nachricht blinkt die grüne Leuchtdiode der aktiven Ebene. Je nach Größe des Fingers und nach Anzahl der eingeschobenen Kommunikationstafeln variiert die benötigte Druckkraft. Die integrierte Fingerführung grenzt die Nachrichtenfelder voneinander ab.

Sicherheitssperren verhindern ungewolltes Löschen von Nachrichten bzw. Wechseln der Ebene. Soll ein Reset ausgeführt werden, z.B. um die Sicherheitssperren aufzulösen, muß der GoTalk für mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet werden.

Die grünen Lautstärketasten finden sich unten links auf dem GoTalk. Der Pfeil nach unten bedeutet "leiser", der Pfeil nach oben "lauter". Ob leises Flüstern oder laute Mitteilung, die sieben Lautstärkestufen sind praxisgerecht abgestimmt. Die Lautstärke kann auch während des Abspielens verändert werden. In diesem Fall wird die Nachricht mit der neuen Einstellung wiederholt. Der Lautsprecher liegt neben dem Tragegriff. Er ist durch ein Abdeckgitter geschützt.

Zum Lieferumfang des GoTalk gehören Deckblattvorlagen und eine transparente Schutzfolie. Das Deckblatt dient der Anwenderin als Merkhilfe, welche Nachricht unter welcher Taste gespeichert ist. Das eingelegte Deckblatt ist vor dem Herausrutschen durch einen roten Sperrschieber gesichert.

Konstruktion

Bei der Entwicklung des GoTalk wurde auf einen geringen Stromverbrauch des Gerätes geachtet. Zwei Alkalibatterien (Größe AA) versorgen den GoTalk mehrere Monate lang mit Energie. Das durch eine Schraube gesicherte Batteriefach befindet sich auf der Rückseite neben dem Ein-/Aus-Schalter. Mit ihm kann die Stromversorgung komplett unterbrochen werden.

Der GoTalk wurde für den alltäglichen Einsatz entwickelt. Das Gehäuse ist aus extrem stabilem und bruchfestem Kunststoff. Der Lautsprecher ist durch ein Gitter geschützt und der Deckel des Batteriefachs durch eine Schraube gesichert. Das integrierte Fingerführaster gibt dem Gehäuse zusätzliche Stabilität. Anti-Rutsch-Füße auf der Rückseite vereinfachen die Bedienung auf einer planen Ablagefläche.

Sein geringes Gewicht (ca. 340 g inkl. Batterien), seine Maße (H/B/D: ca. 30 cm * 23 cm * 2 cm) und der integrierte Tragegriff machen den GoTalk ideal für den mobilen Einsatz. Durch das ergonomische und ansprechende Design ist der GoTalk passend für alle Altersgruppen.

Liefertypen

- GoTalk9 Kommunikator mit 9 Tasten
- GoTalk4 Kommunikator mit 4 Tasten
- Pocket GoTalk Kommunikator mit 5 Tasten

Lieferumfang

- GoTalk Kommunikator incl. 2 Alkalibatterien Typ AA
- transparente Schutzfolie für Deckblätter
- Set Blankodeckblätter
- Set Demodeckblätter mit Anleitung
- Gebrauchsanweisung incl. Medizinproduktebuch

Garantiezeit

2 Jahre, wenn nicht anders angegeben.

Produktinfo

GoTalk

CE-Konformität

Die Produkte der Produktgruppe GoTalk besitzen CE-Konformität; d.h. sie entsprechen allen darauf anzuwendenden Richtlinien und Normen.

Medizinprodukt

Die Produktgruppe GoTalk entspricht laut Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG den Grenzwerten für Medizinprodukte der Klasse 1. Nicht gedacht zum Verbinden mit Nicht-Medizinprodukten.

Umgebungsbedingungen

Temperatur der Umgebung während der Benutzung und der Lagerung: 10 - 45EC, relative Luftfeuchtigkeit maximal 90% bei Umgebungstemperaturen unter 40EC.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Reparaturen

Alle Reparaturen müssen durch uns oder von uns Berechtigte durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr

Von den Produkten der Produktgruppe geht keine Verletzungsgefahr aus.



**Achtung:
Gebrauchsanweisung
beachten!**

**Das Medizinproduktebuch ist
Bestandteil der
Gebrauchsanweisung!
Ebenso ist dieses Produktinfo
Bestandteil der Gebrauchs-
anweisung!**

REHAVISTA GmbH
Pulsstraße 7
D-14059 Berlin

Hinweise, behördliche Sicherheitsbestimmungen und Schutzrechte

Alle Rechte vorbehalten.

Die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Der Hersteller geht damit keinerlei Verpflichtung ein.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt der Hersteller keine über die gesetzliche Produkthaftung hinausgehende Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Nutzung dieses Gerätes ergeben. Die Gebrauchsanweisung ist nur gültig mit dem mitgelieferten Produkt.

Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns oder unsere Vertreter - gleich aus welchem Rechtsgrund (einschließlich streßbedingte körperliche Schäden) sind ausgeschlossen, sowie uns nicht Vorsatz oder Nichtbeachtung gültiger Produkthaftungsbestimmungen trifft.

Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung, falls unser Produkt anwenderseitig verändert wird und haften nicht im Falle unbefugter Veränderungen.

Alle Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

Jegliche Form der Vervielfältigung dieser Publikation bedarf unserer Genehmigung.

Hersteller

Attainment Company, Inc.

P.O. Box 930160 • 504 Commerce Parkway Verona,
WI 53593-0160 • USA

Made in China.

Designed and Manufactured by
Frederic Thomas LLC, Racine WI.

Die Tafeln wurden erstellt mit Boardmaker und den Picture Communication Symbols

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.
Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

REHAVISTA GmbH E-Mail info@rehavista.de
Pulsstraße 7 Internet www.rehavista.de
D-14059 Berlin Info 0800 REHAVISTA (7 34 28 47)

GoTalk-Info-MPG
V1.11 • 20.01.2005

REHAVISTA[®]
Kommunikationshilfen
für Menschen mit Behinderung

Produktinfo

GoTalk

Aufnahme von Medizinprodukten in das Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland

Aufgrund der vorgeschriebenen Qualitätsstandards zur Aufnahme von Medizinprodukten in das Hilfsmittelverzeichnis nach §128 SGB V Produktgruppe 16 "Kommunikationshilfen" im "Bundesanzeiger" vom 15.01.1997 müssen Produkte der Produktuntergruppe 16.99.03 Geschlossene Anlagen (Symboleingabe) Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Daher bieten wir dasselbe Produkt alternativ in 2 Varianten an:

- zugelassen als Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer 16.99.03.0018/0019/0020 incl. Akkuladeset
- Medizinprodukt ohne Hilfsmittelnummer mit Batterien

Akkuladeset mit Steckerladegerät und 4 AA-Mignon NiMH-Akkus



Nur im Lieferumfang enthalten bei den Lieferausführungen mit dem Vermerk "zugelassen als Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer 16.99.03.0018/0019/0020"!

Bestehend aus:

- Ladegerät Typ FRIWO Speed Master: mikroprozessorgesteuert, Überspannungsabschaltung, Timerautomatik, Akku-Defekt-Erkennung, Refresh-Möglichkeit, automatische Umschaltung auf gepulste Erhaltungsladung, LED-Anzeige jeweils für 2 Ladeschächte (paarweise Ladung), Ladezeit ab 1,5 h je nach Akkukapazität; Betrieb: 230 V; Maße: Breite 70 mm, Höhe 48,5 mm ohne Stecker, Länge 118 mm.
- 4 Ni/MH-Akkus Mignon (AA) zum paar- und wechselweisen Laden und Betreiben.

Preise

(unverb. Preisempf. incl. ges. MwSt., gültig 07/2004)

- GoTalk9 EUR 310,00 zugelassen als Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer 16.99.03.0019 incl. Akkuladeset
- GoTalk9 EUR 250,00 Medizinprodukt ohne Hilfsmittelnummer mit 2 Mignon-Alkali-Batterien
- GoTalk4 EUR 270,00 zugelassen als Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer 16.99.03.0018 incl. Akkuladeset
- GoTalk4 EUR 210,00 Medizinprodukt ohne Hilfsmittelnummer mit 2 Mignon-Alkali-Batterien
- PocketGoTalk EUR 355,00 zugelassen als Medizinprodukt mit Hilfsmittelnummer 16.99.03.0020 incl. Akkuladeset
- PocketGoTalk EUR 295,00 Medizinprodukt ohne Hilfsmittelnummer mit 2 Mignon-Alkali-Batterien

GoTalk-Info-MPG
V1.11 • 20.01.2005

REHAVISTA[®]
Kommunikationshilfen
für Menschen mit Behinderung

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.
Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

REHAVISTA GmbH E-Mail info@rehavista.de
Pulsstraße 7 Internet www.rehavista.de
D-14059 Berlin Info 0800 REHAVISTA (7 34 28 47)