



Nachricht wiedergeben

1. Schalten Sie den iTalk2 durch Drehen des Lautstärkereglers ein.
2. Drücken Sie eine Tastfläche.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Aufnahme

1. Schalten Sie den iTalk2 durch Drehen des Lautstärkereglers ein.
2. Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf (RECORD).
3. Drücken Sie die Tastfläche, auf die Sie die Nachricht aufnehmen wollen. Die Kontroll-LED leuchtet, der iTalk2 nimmt jetzt die Nachricht auf. Halten Sie beide Taster solange gedrückt, bis Sie Ihre Nachricht gesprochen haben.
4. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie zuerst den kleinen Aufnahmeknopf (RECORD) los und anschließend die Tastfläche.

Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.rehavista.de

Artikel-Nummer: 11865

11865-DOGA, V1.1-20050321



Der iTalk2 ist eine einfach zu bedienende Kommunikationshilfe.

Zwei Nachrichten und zwei Tasten ermöglichen einen vielfältigen Einsatz in der Kommunikationsanbahnung.

Batterie einsetzen

Der iTalk2 benötigt eine 9V-Blockbatterie.
Eine vorhandene Aufnahme bleibt auch beim Wechsel der Batterie erhalten.

1. Schalten Sie den iTalk2 mit dem Lautstärkereglers aus.
2. Legen Sie den iTalk2 so, das die Unterseite und somit das Batteriefach zu Ihnen zeigt.
3. Entfernen Sie wenn vorhanden die Bodenplatte.
4. Drücken Sie die Sperrlasche des Batteriefachdeckels vorsichtig zusammen und heben Sie gleichzeitig den Deckel hoch.
5. Nehmen Sie die alte Batterie aus dem Fach.
6. Ziehen Sie die Kontaktlasche von der Batterie ab. Achten Sie bitte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen oder abzureißen.
7. Nehmen Sie eine neue Batterie und drücken Sie die Kontaktlasche in richtiger Polung fest auf die Batteriekontakte.
8. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Drähte unter der Batterie liegen und nicht geknickt werden.
9. Schieben Sie die beiden Laschen des Batteriefachdeckels in die Gehäuseaussparungen und schließen Sie den Batteriefachdeckel zu bis er hörbar einrastet. Wenden Sie keine Gewalt an. Kontrollieren Sie ggf. nochmals die Lage der Anschlussdrähte.



Nachricht Aufnehmen

1. Drehen Sie den iTalk2 so, dass Ihnen die Rückseite zugewandt ist. Sie sollten die Tastflächen und den kleinen Aufnahmeknopf bequem erreichen können. Das Mikrofon für die Aufzeichnung befindet sich hinter der Lautsprecherverkleidung.
2. Schalten Sie den iTalk2 durch Drehen des Lautstärkereglers ein. Die Position des Drehrades hat keinen Einfluss auf die Lautstärke der Aufnahme.
3. Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf (RECORD).
4. Drücken Sie die Tastfläche, auf die Sie die Nachricht aufnehmen wollen. Die Kontroll-LED leuchtet, der iTalk2 nimmt jetzt die Nachricht auf.
5. Sprechen Sie die Nachricht langsam und aus einem Abstand von ca. 30cm in das Mikrofon. Halten Sie Aufnahmeknopf und Tastfläche solange gedrückt, bis Sie Ihre Nachricht gesprochen haben.
6. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie zuerst den kleinen Aufnahmeknopf (RECORD) los und anschließend die Tastfläche. Dadurch verhindern Sie, dass ein "Klack" beim Loslassen des Tasters aufgenommen wird.

Nehmen Sie die Nachricht in einer möglichst ruhigen Umgebung auf. Variieren Sie bei Bedarf den Abstand zum Mikrofon und die Lautstärke Ihrer Stimme.

Auf jede Taste kann eine Nachricht mit einer Länge von maximal 8,5 Sekunden aufgenommen werden.

Nachricht wiedergeben

Zur Wiedergabe drücken Sie auf die gewünschte Tastfläche. Die Nachricht wird vollständig wiedergegeben, unabhängig davon, ob Sie die Tastfläche loslassen oder mehrfach drücken.

Die Lautstärke der Wiedergabe wird über den Lautstärkereglereinstellung eingestellt.

Andere Geräte anschließen

Der iTalk2 kann auch als Taster eingesetzt werden und macht so die Steuerung eines externen Gerätes oder das Aktivieren eines Netzschaltadapters (z.B. PowerLink Bestellnummer 31307) möglich.

Stecken Sie eins der mitgelieferten Steuerkabel in die mit „TOY/APPL“ bezeichnete Buchse auf der Rückseite des iTalk2. Ein daran angeschlossenes externes Gerät wird durch Drücken der zugehörigen Tastfläche aktiviert.

Der Schaltausgang bleibt für die gesamte Dauer der gespeicherten Aufzeichnung aktiv.

Abdeckkappen

Mit den transparenten Abdeckkappen (Bestellnummer 40209) können zum Symbolisieren der gespeicherten Nachricht Bilder oder Symbole auf den Tastflächen des iTalk2 fixiert werden.

Ziehen Sie dazu die Abdeckkappe ab, legen Sie ein Symbol/ Bild auf die Tastfläche und drücken die Abdeckkappe anschließend wieder fest auf die Taste.



Nicht benutzte Bild- oder Symbolkärtchen können Sie im Symbolhalter ablegen.



Befestigung

Der iTalk2 kann mit einer leicht abnehmbaren Bodenplatte befestigt werden. (Nicht im Lieferumfang, Bestellnummer 40234)

Diese wird auf der Unterseite des iTalk2 eingerastet. Zum Entfernen drücken Sie auf die Verschlusslasche und ziehen Sie die Bodenplatte in Richtung des Lautstärkereglers. Nehmen Sie die Bodenplatte nach oben ab.

In der abnehmbaren Bodenplatte des iTalk2 sind drei Bohrungen zur Befestigung vorgesehen. Mit ihr lässt sich der iTalk2 stabil und sicher an einer Halterung wie z.B. dem FrictionArm befestigen.

(Bestellnummer 41351 + Adapter Bestellnummer 41358)

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Als schnelle und flexible Befestigung auf dem Tisch bieten sich die Sensitrac-Halterungen an.



Der iTalk2™ ist ein Produkt von AbleNet, Inc., Minneapolis, USA

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden die durch die Verwendung des Produktes oder der Anleitung entstehen.

REHAVISTA GmbH, Pulsstraße 7; 14059 Berlin
www.rehavista.de, info@rehavista.de