



Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanweisung.

Zweckbestimmung, Eigenschaften und Funktionen

Diese elektronische Zeigeuhr wird entweder über den eingebauten Taster oder mit einer handelsüblichen Taste/Sensor (3,5 mm-Klinkenstecker) ausgelöst. Der mitgelieferte Würfelscheibensatz ermöglicht auch Schwerstbehinderten die Teilnahme an bekannten Würfelspielen.

Der besondere "Dreh" dabei ist: zwei bewegliche Teile drehen sich unabhängig voneinander: eine innere Scheibe und ein aufgesetzter Zeiger bewegen sich. Demgegenüber steht ein fester äußerer Ring. Die innere Scheibe und der äußere Ring kann nun beliebig häufig unterteilt werden, beim Würfeln eben in jeweils 6 Felder. Ein Würfelscheibensatz ist im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb werden zwei AA-Batterien 1,5V (Mignon-Zellen) oder wiederaufladbare Akkus benötigt.



Lieferumfang

- *All-Turn-It Spinner*
- 2 * Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6) enthalten
- Deckblattsatz mit Würfelsymbolen
- diese Gebrauchsanweisung

Zubehör und Ersatzteile

- *All-Turn-It Spinner* Blankodeckblattsatz (15411)
- Ladegerät mit 4 AA-Mignon Akkus (15242)
- beliebige Taster und Sensoren wie Jelly Bean, BIG, etc.

Installation und Beschreibung

Einlegen bzw. Wechseln der Batterien

Ihr *All-Turn-It Spinner* benötigt zwei Batterien vom Typ Mignon AA. Wenn sich der Zeiger nicht mehr dreht, wechseln Sie bitte die Batterien wie folgt:

1. Ziehen Sie das äußere Deckblatt nach oben aus den drei seitlichen Aussparungen.
2. Entnehmen Sie die Sichtscheibe oben, in dem Sie durch Drehen die drei Aussparungen am Rand der Sichtscheibe in Deckung mit den drei Zapfen des Gehäuses bringen und heben Sie mit einem Finger die Sichtscheibe heraus.
3. Ziehen Sie den Zeiger nach oben von der drehbaren Mittelachse ab.
4. Ziehen Sie das innere Deckblatt nach oben von drehbaren Mittelachse ab.
5. Entnehmen Sie die beiden Batterien aus dem Batteriefach.

6. Legen Sie die beiden Batterien nach der vorgegebenen Angabe der Polarität ein.
7. Stecken Sie das innere Deckblatt wieder auf die Mittelachse auf. Achten Sie dabei auf die quadratische Passung des Deckblattes mit der drehbaren Mittelachse.
8. Stecken Sie den Zeiger wieder auf die Mittelachse auf. Achten Sie dabei darauf den Zeiger bis auf Anschlag auf die Achse aufzustecken.
9. Setzen Sie die Sichtscheibe wieder passgerecht in das Gehäuse und verdrehen Sie die Scheibe ein wenig in beliebiger Richtung so, dass die Scheibe nicht herausfallen kann.
10. Legen Sie das äußere Deckblatt oben wieder in die drei seitlichen Aussparungen ein.
11. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der örtlichen Bestimmungen (s.a. im folgenden „Batteriegesetz“)!

Aufstellung

Der *All-Turn-It Spinner* kann flach auf dem Tisch liegend benutzt oder durch Aufklappen des Bügels auf der Unterseite schräg aufgestellt werden.

Aktivieren des Zeigers und der Innenscheibe

Sie können den Zeiger und die Innenscheibe entweder durch Drücken des lila Tasters im Gehäuse rechts unten in Bewegung setzen oder durch einen beliebigen Taster oder Sensor aus unserer Produktpalette. Dieser wird dann durch Einstecken des Kabelsteckers in die Buchse seitlich neben dem lila Taster im Gehäuse (Bezeichnung „Switch“) mit dem Gerät elektrisch verbunden.

Die beweglichen Teile drehen sich solange wie Sie einen der beiden – internen oder externen – Taster drücken. Nach Loslassen des gedrückten Tasters laufen die beweglichen Teile noch etwas nach um ein zufälliges Ergebnis zu erzielen.

Bei Verwendung des mitgelieferten Deckblattsatzes mit den Würfelsymbolen kann

- mit nur einer eingelegten Würfelscheibe ein Ergebnis eines Wurfs mit einem Würfel erzielt werden sowie
- mit beiden eingelegten Würfelscheiben ein Ergebnis eines Wurfs mit zwei Würfeln erzielt werden.

Durch Verwendung eigener gestalteter Deckblätter – s. Zubehör Blankodeckblattsatz – können eigene zufällige Ergebnisse erzielt werden, Spielideen sind z.B.:

- Wir machen einen Obstsalat
- Wer ist dran?
- ...

Fehlersuche



Die beweglichen Teile drehen sich nicht mehr.
⇒ Ist die Batterie zu schwach? Prüfen und ggf. austauschen.

Sicherheitshinweis



Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten, nassen, sehr kalten oder sehr heißen Umgebungen.

Reinigung und Wartung

- Bei Verunreinigungen des Gerätes empfehlen wir die Reinigung mit einem feuchten Tuch mit

- lauwarmen, klaren Wasser, evtl. mit Geschirrspülmittel in üblicher Dosierung ergänzt.
- Feuchte Oberflächen mit einem weichen Tuch oder Leder trocken wischen.
 - Niemals andere Reinigungsmittel wie Spiritus o.ä. verwenden.
 - Niemals durch punktuelle Wärmeeinwirkung trocknen, wie z.B. einem Fön oder einer Heißluftpistole (Gefahr der Verformung)!
 - Die Geräte der Produktgruppe bedürfen sonst keiner Wartung!
 - Bitte entsorgen Sie Batterien entsprechend den örtlichen Bestimmungen (s.a. im folgenden „Batteriegesetz“)!

Produkt Daten

Merkmale

Konstruktion	geschlossenes Gehäuse aus Kunststoff
Abmessungen Durchmesser * Höhe	33,5 cm * 6,5 cm
Gewicht	ca. 770 g (inkl. Batterien)
Technische Daten	
Batterien	2 * Mignon-Batterien 1,5 V (AA/R6)
Konformität	EN 71-I

Garantiezeit

2 Jahre.

Artikelnummer

REHAVISTA -Artikelnr. 15410

Hinweise, behördliche Bestimmungen und Schutzrechte

Reparaturen



Alle Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller oder von der in Europa beauftragten Vertretung benannte Berechtigte durchgeführt werden.

Umwelteinflüsse

Die Geräte der Produktgruppe sollten pfleglich behandelt und sorgsam mit ihnen umgegangen werden. Extremen Umwelteinflüssen, wie Kälte, dauernder direkter Sonneneinstrahlung, übermäßig starken Stößen, etc., darf das Gerät nicht ausgesetzt werden. Unsachgemäße Behandlung, Lagerung und äußere Einflüsse können zu Störungen und Schäden im Einsatz führen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur der Umgebung während der Benutzung und der Lagerung: 10 – 45°C, relative Luftfeuchtigkeit maximal 90% bei Umgebungstemperaturen unter 40°C.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Verletzungsgefahr

Von den Produkten der Produktgruppe geht keine Verletzungsgefahr aus.

CE-Konformität



Die Produkte der Produktgruppe besitzen CE-Konformität; d.h. sie entsprechen allen darauf anzuwendenden Richtlinien und Normen.

"Batteriegesetz"



Im Zusammenhang mit dem Einsatz von Batterien und Akkus hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abzugeben. Eine Entsorgung im Hausmüll verstößt gegen gültiges Recht! Die Abgabe ist kostenlos. Selbstverständlich können Batterien nach Gebrauch an den Händler oder Hersteller unentgeltlich zurückgegeben werden.



Batterien und Akkus müssen vor dem erstmaligen Inverkehrbringen mit dem Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" gekennzeichnet werden. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich evtl. eine chemische Bezeichnung eines enthaltenen Schadstoffes - "Cd" für Cadmium. "Hg" für Quecksilber. Weitere Informationen können – soweit notwendig – in den Begleitpapieren der Warensendung oder in dieser Bedienungsanleitung nachgelesen werden.

Weitere Hinweise zur Batterieverordnung finden sich beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter www.bmu.de

Alle Rechte vorbehalten.

Die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Der Hersteller geht damit keinerlei Verpflichtung ein.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt der Hersteller keine über die gesetzliche Produkthaftung hinausgehende Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Nutzung dieses Gerätes ergeben. Die Gebrauchsanweisung ist nur gültig mit dem mitgelieferten Produkt.

Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns oder unsere Vertreter - gleich aus welchem Rechtsgrund (einschließlich streßbedingte körperliche Schäden) sind ausgeschlossen, sowie uns nicht Vorsatz oder Nichtbeachtung gültiger Produkthaftungsbestimmungen trifft.

Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung, falls unser Produkt anwenderseitig verändert wird und haften nicht im Falle unbefugter Veränderungen.

Alle Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

Jegliche Form der Vervielfältigung dieser Publikation bedarf unserer Genehmigung.

© für die deutsche Übersetzung:

REHAVISTA GmbH • Pulsstraße 7 • 14059 Berlin

Support

Telefonisch können Sie sich an Ihren regionalen **REHAVISTA**-Partner wenden – s.a. www.rehavista.de – oder wählen Sie die zentrale Service-Rufnummer: 0800 7342847

Hersteller

AbleNet, Inc. • 2808 Fairview Ave. • North Roseville • MN 55113-1308 U.S.A. • <http://www.ablenetinc.com>