


# Attainment Company's GoTalk POCKET

## vorschriften

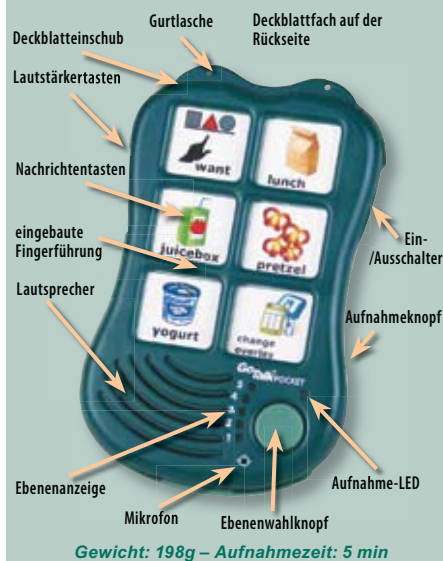

- Tauschen Sie das entsprechende Deckblatt, so dass die Symbole Ihrer Oberfläche mit den Aufnahmen übereinstimmen.



### Ebenen löschen

- Entfernen Sie die Deckblätter von dem Deckblattfach an der Rückseite des Gerätes.
- Betätigen Sie den Aufnahmeknopf einmal kurz (Aufnahme- und Ebenen-LED leuchten auf).
- Betätigen Sie den Ebenwahlknopf solange, bis die zu löschende Ebene angezeigt wird.
- Drücken Sie mit einer Stiftspitze oder Büroklammer in die „Erase“-Öffnung auf der Rückseite des Gerätes
- Betätigen sie den Aufnahmeknopf anschließend einmal kurz.
- Wiederholen Sie den Vorgang für weitere zu löschende Ebenen.

### Sperreinstellungen

- Ebenen sperren: Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf. Bei gedrücktem Aufnahmeknopf betätigen Sie bitte zusätzlich den Lautstärke leiser Knopf. Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED erlöschen und bestätigen hiermit die Sperre für die Ebenenwahl
- Aufnahme sperren: Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf. Bei gedrücktem Aufnahmeknopf

### Aufnehmen

- Schalten Sie den GoTalk Pocket ein.
- Wählen Sie über den Ebenwahlknopf auf der Vorderseite die entsprechende Ebene.
- Betätigen Sie den Aufnahmeknopf auf der rechten Seite des Gerätes einmal (die rote Aufnahme-LED und die Ebenen-LED leuchten auf).
- Drücken Sie die zu besprechende Nachrichtentaste Ihrer Oberfläche (die Aufnahme beginnt nun und wird erst durch ein zweites Betätigen der zu besprechenden Nachrichtentaste gestoppt).
- Sprechen Sie Ihre Aufnahme während die rote Aufnahme-LED blinkt.
- Drücken Sie erneut die soeben besprochene Nachrichtentaste Ihrer Oberfläche um die Aufnahme zu stoppen.
- Fahren Sie so auf allen Ebenen fort.

### Abspielen der Aufnahme

Durch kurzen Druck auf die entsprechende Nachrichtentaste Ihrer Oberfläche wird die Aufnahme ausgelöst.

### Ebenenwechsel

- Bei einmaliger Betätigung des Ebenwahlknopfes blinkt die aktuell gewählte Ebene auf.
- Drücken Sie den Ebenwahlknopf erneut, springt die Anzeige auf die nächste Ebene um. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zur gewünschten Ebene.

betätigen Sie bitte zusätzlich den Lautstärke lauter Knopf. Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED erlöschen und bestätigen hiermit die Sperre für die Ebenenwahl.

- Aufheben der Sperreinstellungen: Schalten Sie das Gerät ab. Halten Sie den Aufnahmeknopf gedrückt und schalten sie das Gerät mit gedrücktem Aufnahmeknopf erneut ein. Die Aufnahme- und die Ebenen-LED blinken und das Gerät piept. Dieser Vorgang hebt beide Sperreinstellungen auf.

Das Deckblattfach steht für aktuell nicht verwendete Deckblätter zur Verfügung. Stecken Sie hierzu die leichte grüne Abdeckung auf die Rückseite des Gerätes. Ein Gurt um das Gerät umzuhängen wird angeboten.

### Overlay-Software (separat erhältlich)

Das Gestalten von Deckblättern ist mit der GoTalk Overlay Software besonders einfach. Sie enthält Oberflächen, tausende von Fotos, Illustrationen und Imagine Symbolen. Zudem können Sie eigene Fotos verwenden um Deckblätter herzustellen. Speichern Sie Ihre Deckblätter und teilen Sie diese mit anderen GoTalk Nutzern.

