

DigiVox plus Kurzanleitung

Einführung

Alle Einstellungen der DigiVox werden mit Hilfe der ersten Zeile der Schablone vorgenommen. Während des Programmiervorgangs zeigt das Display die jeweilige Aktion an und unterstützt Sie durch eine intuitive Benutzerführung.

Die DigiVox kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Der **Programmiermodus** wird immer dann gewählt, wenn Einstellungen am Gerät geändert werden sollen, alle Tasten sind freigegeben. Um ein versehentliches Ändern der Geräteeinstellungen während des Betriebs zu vermeiden, sind im

Wiedergabemodus einige der Steuertasten gesperrt.

Noch eine Bitte: Haben Sie keine Scheu vor der Technik. Probieren Sie die Funktionen der DigiVox einfach aus. Nur durch grobe Gewaltanwendung können Sie etwas kaputt machen.

Aufbau der Schablone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAMM/ WIEDERGABE	EBENE SPERREN	FELDI SEQUENZ	SCHABLONEN WAHL	SOFORT/ VERBINDEN	SCANNING	TASTEN EINSTELLUNG	GRUPPE SPERREN	LEISER <	LAUTER >	FUNKTION JA	BEFEHL NEIN
SPRECHEN	EBENE	DEFINIEREN	AUFNAHME	VERBINDEN	ZURÜCK	STOP	GRUPPE				
STICHWORT	EBENE LÖSCHEN	SEQUENZ BEARBEITEN	FELDER VERSCHIEBEN	DISKETTE	RS-232	LÖSCHEN					

Hinter den zwölf Feldern der Schablone verbergen sich alle zur Programmierung nötigen Befehle. Die ersten acht Felder können entsprechend der Farben (gelb, weiß und grün) drei unterschiedliche Funktionen bzw. Befehle auslösen. Durch vorheriges Drücken der Taste „Funktion“ bzw. „Befehl“ wird die entsprechende Ebene gewählt. Die weiß unterlegten Tasten sind direkt anwählbar.

Taste 9 und 10 dienen zur Einstellung der Lautstärke und während der Programmierung zur Auswahl der gewünschten Option. Die beiden letzten Tasten haben je zwei Funktionen. Zum einen wählt man mit ihnen eine Funktion (gelb) bzw. einen Befehl (grün), zum anderen dienen sie zum Bestätigen bzw. Abbrechen einer Auswahl (JA/NEIN).

PROGRAMM/ WIEDERGABE	Funktion (gelb)
SPRECHEN	Normal (weiß)
STICHWORT	Befehl (grün)

Grundsätzliches zum Bedienungsablauf

Um Einstellungen an der DigiVox vornehmen zu können, muss sich das Gerät im Programmiermodus befinden. Die aktuelle Betriebsart wird im Display angezeigt.

Zum Wechseln zwischen Programmier- und Wiedergabemodus drücken Sie die Taste „Funktion“ (11) und danach die erste Taste. Im Display erscheint

„**Mode: Wiedergabe**“ bzw. „**Mode: Programm**“. Sie können mit den Lauter/Leiser-Tasten (9/10) zwischen beiden Anzeigen wechseln. Bestätigen Sie den gewünschten Modus mit „JA“ (9).

Nachdem Sie alle Einstellungen angepasst haben, wechseln Sie auf gleiche Weise zurück in den Wiedergabemodus.

Die wichtigsten Einstellungen Schritt-für-Schritt

1. Einschalten der DigiVox

Die DigiVox besitzt keinen Ein/Aus-Schalter. Sie ist bei normaler Anwendung immer in Betrieb. Erfolgt über eine gewisse Zeit kein Tastendruck, schaltet sie sich automatisch in den Schlafmodus. Durch einen Druck auf eine beliebige Taste wird sie wieder geweckt.

Für einen längeren Transport können Sie die DigiVox auch ganz ausschalten. Hierzu drücken Sie die Taste „Befehl“ (12, grün) und danach die Taste „Leiser“ (9). Zum Wiedereinschalten befindet sich an der rechten Gehäusesseite ein versenkter Reset-Taster.

2. Gruppe/ Ebene wählen:

Auf der DigiVox können Sie das Vokabular in Gruppen (A-F) thematisch oder nach Benutzer ordnen. Jede Gruppe hat acht Ebenen (1- 8). Die aktuelle Gruppe/ Ebene wird im Display angezeigt. Um eine andere Gruppe/ Ebene auszuwählen, drücken Sie Taste 8 (Gruppenwechsel) bzw. Taste 2 (Ebenenwechsel).

Achtung: erst der zweite Tastendruck führt zum Wechsel!

3. Bilder oder Sequenzen:

Nachrichten können sowohl unter einem Symbol (Feldermodus), als auch unter einer Symbolsequenz (Bildermodus) abgelegt werden. Im ersten Fall verbirgt sich unter jeder Taste genau eine Nachricht. Die Tastenzahl begrenzt somit auch die Nachrichtenzahl. Um die Anzahl der möglichen Aussagen zu erhöhen, wird jeder Aussage eine Sequenz von Tastenbetätigungen zugewiesen.

Um den Gewünschten Modus einzustellen, führen Sie folgende Schritte durch:

Aktion der Benutzerin	Anzeige im Display	
Funktions-Taste (gelb, 11) drücken	Funktions-Taste wählen (gelb)	
Taste Feld/Sequenz (3) drücken	Bild-Sequenz <> Ja Nein	Felder <> Ja Nein
Tasten LEISER/LAUTER (9/10) zum Wechsel; gewünschten Modus mit JA (11) bestätigen	Ebene löschen? Ja Nein	
Mit JA bestätigen Achtung: die Ebene wird komplett gelöscht!	Vorhersage: Aus < > Ja Nein	Tastatur-Layout einstellen
	Grp. x: Programm Ebene y: Bilder	Grp. x: Programm Ebene y: Felder

4. Raster wählen:

Das Tastenfeld der DigiVox kann variabel in zwei bis 48 Felder aufgeteilt werden. Um die richtige Feldeinteilung zu wählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion der BenutzerIn	Anzeige im Display
Funktions-Taste (11, gelb) drücken	FUNKTIONEN-Taste wählen (gelb)
Taste Schablonenwahl (4) drücken	Tastatur: 1 x 3 < > Ja Nein
Tasten LEISER/LAUTER zum Wechsel	Tastatur: 2 x 4 < > Ja Nein
Gewünschte Schablone mit JA-Taste (11) bestätigen	Ebene löschen? Ja Nein
Mit JA bestätigen Achtung: die Ebene wird komplett gelöscht!	Grp: X Programm Ebene: Y Felder

5. Aufnahme im Feldermodus:

Aktion der BenutzerIn	Anzeige im Display
Taste Aufnahme(4) drücken	Aufnehmen: Taste gedrückt halten
Gewünschtes Feld auswählen, Taste gedrückt halten und Text sprechen	Aufnahme...
Taste loslassen	Grp: X Programm Ebene Y Felder

6. Aufnahme im Bildermodus:

Aktion der BenutzerIn	Anzeige im Display	
Taste Definieren (3) drücken	Def: Sequenz < > Ja Nein	
Mit JA (11) bestätigen	Wähle 1. Taste Nein	
Gewünschte Taste drücken	Bild hinzufügen Ja Nein	Koordinate der gewählten Taste z.B. A1
Weitere Tasten der Sequenz drücken	Koordinaten der gewählten Tasten z.B. A1C2	
Nach der letzten Taste der Sequenz mit JA (11) Eingabe beenden	Aufnahme drücken und festhalten	
Taste Aufnahme (3) drücken und halten, Aussage aufnehmen	Aufnahme...	Grp. X: Programm Ebene y: Bilder

Nachrichten können Sie direkt über das eingebaute Mikrofon aufnehmen (Abstand ca. 20cm). Für eine bessere Sprachqualität ist auch ein externes Mikrofon lieferbar.

Vergessen Sie nicht, die DigiVox wieder in den Wiedergabemodus zu schalten!

7. Lautstärkeregelung

Die Wiedergabelautstärke lässt sich einfach über die Tasten „LEISER“ und „LAUTER“ an die Umgebung anpassen.

Laden des Akkus/ Akku-Pflege

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Vor dem ersten Gebrauch laden Sie den Akku bitte vollständig auf. Die DigiVox meldet sich, wenn der Akku geladen ist (drei Quittungstöne, Display: Akku geladen).

Achten Sie darauf, dass der Akku nur dann geladen wird, wenn die DigiVox dazu auffordert (Display-Anzeige: Batterie schwach). Die normale Ladezeit beträgt ca. 6 Stunden, ideal ist ein Laden über Nacht. Sie können die DigiVox auch mit angeschlossenem Netzteil betreiben, dadurch verlängert sich jedoch die Ladedauer. Wird das Ladegerät trotz Aufforderung nicht angeschlossen und die DigiVox weiter betrieben, ertönen nach einiger Zeit hohe Warntöne. Im Display erscheint die Aufforderung zum sofortigen Laden des Akkus. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab und kann erst nach Anschluss des Netzteils durch Druck auf den Reset-Taster wieder eingeschaltet werden.

Den aktuellen Ladestand des Akkus können Sie jederzeit im Display anzeigen lassen. Drücken Sie dazu die Taste „FUNKTION“ (11, gelb) und danach die „LEISER“-Taste.

Anschlußmöglichkeiten externer Geräte

SPEAKER	Anschluss für einen externen Lautsprecher
EAR	Anschluss für einen Kopfhörer für das Ansage-Scanning
EXT MIC	Anschluss für ein externes Mikrofon
SWITCH1	Anschluss für einen externen Taster für das Ein-Taster-Scanning
SWITCH2	Anschluss für einen zweiten externen Taster
JOYSTICK	Anschluss für einen Joystick bzw. eine Fünfertastatur
DISK	Anschluss für die externe Datensicherungseinheit
CHARGER	Anschluss für das Ladegerät
RESET	Zum Einschalten, nur wenn die DigiVox komplett abgeschaltet ist

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Handbuch zur DigiVox.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

E-Mail: info@rehavista.de

Internet: www.rehavista.de

Info: 0800 REHAVISTA (7 34 28 47)

