

## 1 Erste Schritte mit dem LIGHTWRITER

Der LIGHTWRITER ist ein einfaches, elektronisches Kommunikationsgerät mit eingebauter Sprachausgabe für Personen, die die Schriftsprache beherrschen, aber keine eigene Sprache mehr zur Verfügung haben. Der auf der Tastatur eingegebene Text wird auf zwei Displays angezeigt. Das eine ist dem Schreibenden zugewandt, das andere dem Gesprächspartner. Damit unterstützt der LIGHTWRITER die „Auge zu Auge“-Kommunikation.



### 1.1 Wichtige Tasten des LIGHTWRITERS

Neben den eigentlichen Buchstaben gibt es noch einige wichtige Tasten zur Steuerung des LIGHTWRITERS:

- [On /C] Schaltet den LIGHTWRITER ein und löscht die komplette Anzeige
- [Off] Schaltet den LIGHTWRITER aus
- [↑] Umschalttaste für Großbuchstaben bzw. die zweiten Zeichen auf einzelnen Tasten.  
Zum Beispiel das ? auf der Taste [Ö]
- [Space] Leertaste, für einen Wortzwischenraum
- [←] Löschtaste, für das letzte Zeichen (Backspace)
- [↶] Wiederholtaste, zeigt den geschriebenen Text erneut in der Anzeige an und spricht ihn aus
- [•))] Signaltaste, ein Ruf ton erklingt
- [Mem] Funktionstaste, die zum Abspeichern oder Abrufen von gespeichertem Text benötigt wird

Testen Sie es selbst:

- Schalten Sie den LIGHTWRITER mit der [On/C]-Taste ein
- Schreiben Sie : [H] [A] [L] [L] [O]
- Mit der [↶]-Taste wird der Text gesprochen.

## 2 Wann soll der LIGHTWRITER sprechen?

Der LIGHTWRITER kann entweder jedes Wort direkt aussprechen, oder den gesamten Text komplett.

Voreingestellt ist die letzte Variante. Zum Aussprechen muß lediglich die Wiederholtaste [↶] gedrückt werden. Diese Option können Sie im Setup verändern.

### 3 Abspeichern und Aufrufen von häufig genutzten Wörtern / Sätzen

Es gibt Wörter und Sätze, die benötigen Sie mehrmals am Tag. Dafür ist es sinnvoll, diese nicht jedesmal erneut einzugeben, sondern sie direkt im LIGHTWRITER zu speichern um sie bei Bedarf schnell aufrufen zu können. Sie können Ihre Botschaften unter 36 Tastenspeichern ablegen (A - Z und 0 - 9). Ein Teil der Speicher sind vom Werk aus schon vorbelegt, und sollten nicht überschrieben werden.

#### 3.1 Speichern eines Wortes / Textes unter einem Buchstaben oder einer Zahl

Schreiben Sie den zu speichernden Text: „Hallo, wie geht es Dir?“

Um den Text im LIGHTWRITER zu speichern, führen Sie folgende Schritte aus:

<u>Aktion des Benutzers</u>	<u>Text in der Anzeige</u>
Drücken Sie [Mem] [Mem]	Save ? A to Z, or +
Wählen Sie einen Buchstaben : [G]	Save ? Y= Ok
Bestätigen Sie die Speicherung mit [Y]	Saved

Der geschriebene Text erscheint kurze Zeit später erneut in der Anzeige

Bitte wählen Sie für Ihre persönlichen Botschaften nicht die Speicher der Tasten 5 bis 0.

Dort sind vom Werk aus nützliche Befehle abgelegt. So zum Beispiel für die Anzeige sämtlicher gespeicherter Texte, zum Ausdrucken und zur Veränderung der Lautstärke.

#### 3.2 Abrufen eines Wortes / Textes aus dem Speichers

<u>Aktion des Benutzers</u>	<u>Text in der Anzeige</u>
Drücken Sie [Mem]	*
Wählen Sie einen Buchstaben : [G]	Hallo, wie geht es Dir ?

#### 3.3 Anzeige der gespeicherten Texte

Für einen besseren Überblick der gespeicherten Texte können Sie sich diese mit dem Speicherort alphabetisch anzeigen lassen.

<u>Aktion des Benutzers</u>	<u>Text in der Anzeige</u>
Drücken Sie [Mem]	*
Drücken Sie die Taste [5]	Auf Wiedersehen...
Drücken Sie die Taste [.]	A=Auf Wiedersehen
Zum nächsten Eintrag mit der Taste [SPACE]	B=Bitte

Für die Auflistung der Texte unter den Zahlentasten müssen Sie anstelle der Taste [.] die Taste [Ä] eingeben.

### 4 Eingebautes, deutsches Hilfesystem

Der LIGHTWRITER besitzt ein eingebautes deutsche Hilfesystem, welches die wichtigsten Funktionen mit einem Beispiel erläutert. Sie können es aufrufen mit [Mem] [Mem] [Mem] und dem Buchstaben [H].

Danach erscheinen 10 Oberbegriffe zu einzelnen Hilfethemen in der Anzeige. Mit der Zahl kann das Thema ausgewählt werden, mit der [SPACE]-Taste der Text angehalten und wieder gestartet werden.

### 5 Tips zur Kommunikation

- Arbeiten Sie mit kurzen, prägnanten Sätzen, die Sie nach Ausgabe direkt wieder aus der Anzeige löschen
- Denken Sie an Sätze die erläutern warum Sie mit diesem Hilfsmittel kommunizieren
- Arbeiten Sie mit Ihren Angehörigen oder Betreuern Sätze aus, die Sie oft benötigen. Speichern Sie diese ab.
- Machen Sie sich eine Liste mit den belegten Tasten und was darunter gespeichert ist. Verkleinern Sie diese und lassen Sie sie evt. wasserdicht laminieren (möglich in vielen Copy-Shops).
- Arbeiten Sie mit dem LIGHTWRITER bis das Zeichen für schwache Akku's ( □ statt > ) in der Anzeige erscheint. Laden Sie erst dann Ihren LIGHTWRITER mit dem Orginalladegerät über Nacht auf.