

# SuperTalker DX®



## Kurzanleitung

### Ebene wählen („LEVEL“)

Stellen Sie die Ebene durch Drehen des Ebenen-Schalters „LEVEL“ auf die gewünschte Ebene „1“ bis „8“. Pro Ebene kann nur ein Raster genutzt werden!

### Wählen Sie zur gewünschten Vorlage (Anzahl Felder bzw. Symbole) das passende Raster („GRID“)

1. Schieben Sie den Umschalter „GRID“ je nach verwendeter Fingerführung in die Position „1“ bis „4“.
2. Entnehmen Sie die passende Fingerführung aus dem Bodenfach, die Klappe hierzu befindet sich auf der Unterseite des SuperTalker!
3. Legen Sie eine Vorlage auf und rasten Sie die Fingerführung ein.

### Aufnahmen der Felder einer Ebene („RECORD“)

1. Schalten Sie den SuperTalker mit dem Ein-Aus-Schalter an: „ON/OFF“ („ON“=„I“= Ein / „OFF“= „O“= Aus).
2. Drücken und halten Sie den roten Aufnahme-Knopf „RECORD“ bis die Kontrolllampe „REC“ rot leuchtet, lassen sie den wieder Knopf los. Der Aufnahme-Modus ist eingeschaltet.
3. Drücken und halten Sie die Nachrichtentaste auf welche Sie die Nachricht aufnehmen wollen. Die Kontrolleuchte blinkt. Halten Sie das Nachrichtenfeld solange Sie sprechen gedrückt.
4. Wiederholen Sie die Aufnahme für alle Nachrichtenfelder dieser Ebene, so können Sie alle Felder der Vorlage zügig besprechen.
5. Am Ende der Aufnahmen drücken Sie den Aufnahme-Knopf „RECORD“ noch einmal um den Aufnahmevergang zu beenden.

### Nachrichten wiedergeben

1. Stellen Sie die passende Ebene und das Raster ein. Natürlich ist der Supertalker eingeschaltet!
2. Drücken Sie die Nachrichtenfelder zum Wiedergeben der Nachrichten.

### Externe Tasten

Schließen Sie die Externen Tasten an den jeweiligen Buchsen „SWITCH INPUT“ an. Die Nummer der Anschlussbuchse entspricht der Nummer des Nachrichtenfeldes.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.  
Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

REHAVISTA GmbH  
Pulsstraße 7  
D-14059 Berlin

E-Mail [info@rehavista.de](mailto:info@rehavista.de)  
Internet [www.rehavista.de](http://www.rehavista.de)  
Info 0800 REHAVISTA (7 34 28 47)

supertalker-dx-kurzanleitung  
V1.11 • UH / JL • 08.02.2005

**REHAVISTA**®  
Kommunikationshilfen  
für Menschen mit Behinderung

# SuperTalker DX®

## Kurzanleitung

### Step-by-Step-Anschluss

Über diesen Anschluss ist es möglich alle Nachrichten der Ebene Stück für Stück wiederzugeben.

1. Schließen Sie einen Taster an.
2. Mit jedem Tastendruck wird die nächste Nachricht der Ebene abgerufen.

### Andere Geräte anschließen

Verbinden Sie eine der Buchsen „TOY/APPL“ mit Hilfe des Kabels mit einem angepassten Spielzeug oder Netzschaltadapter. Anschluss „1“ wird durch Feld „1“, Anschluss „2“ durch Feld „2“ geschaltet solange die Nachricht wiedergegeben wird.

### Lautstärke „VOLUME“

Drücken Sie die Lautstärke-Tasten „VOLUME“ zum Verändern der Lautstärke: oberer Pfeil - lauter / unterer Pfeil – leiser.

Zum Schutz der Lautstärke-Einstellung kann diese gesperrt werden.

1. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein und entfernen Sie die Fingerführung und die Vorlage.
2. Drücken Sie die beiden Felder oberhalb der Pfeile „ON/OFF VOLUME“ gleichzeitig. Die Lautstärke kann nun nicht mehr verstellt werden.
3. Zum Entsperren wiederholen Sie Schritt 2.

### Sprachspeicher

Die Kontrolllampe leuchtet gelb wenn im Sprachspeicher weniger als 2 Minuten Aufnahmezeit frei sind.

### Alle Nachrichten löschen

Halten Sie den Aufnahme-Knopf „RECORD“ solange bis die rote Kontrolllampe wieder ausgeht.

### Batterieanzeige

Die Batterieanzeige „LOW BATT“ blinkt rot wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.

Informationen und Anwendungsbeispiele unter [www.rehavista.de](http://www.rehavista.de).  
Der SuperTalker ist ein Produkt von AbleNet, Inc., Minneapolis, USA  
Artikel-Nummer: 11871

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.  
Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

REHAVISTA GmbH  
Pulsstraße 7  
D-14059 Berlin

E-Mail [info@rehavista.de](mailto:info@rehavista.de)  
Internet [www.rehavista.de](http://www.rehavista.de)  
Info 0800 REHAVISTA (7 34 28 47)

supertalker-dx-kurzanleitung  
V1.11 • UH / JL • 08.02.2005

**REHAVISTA®**  
Kommunikationshilfen  
für Menschen mit Behinderung