


















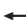









Funktion	Beschreibung	Interne Tastatur (S1...S6 = Speichertasten)	PC-Tastatur
Eingabe	Text im Display erfassen	Standardtasten	Standardtasten
Backspace	Am Ende rückwärts löschen, im Text das Zeichen links vom Cursor		Backspace
Cursor links	Cursor nach links (zurück) bewegen	 + 	
Cursor rechts	Cursor nach rechts (vor) bewegen	 + 	
Pos1	An den Anfang des Textes	 + 	Pos1
Ende	An das Ende des Textes	 + 	Ende
Löschen des Displays	Gesamter Text im Display wird gelöscht	 + Leerzeichen	Alt + Leerzeichen
Shift lock	Großschreibung feststellen	2x 	Shift zweimal drücken
Sprechen	Displayinhalt aussprechen		F10
Aussage speichern	Aussage für sofortiges Sprechen speichern	 +  dann S1 - S6	Alt + Alt dann F2 - F7
Satz speichern	Satz für spätere Weiterbearbeitung speichern	 +  dann Buchstabe	Alt + Alt dann Buchstabe
Aussage abrufen	Gespeicherte Aussage aus Ebene 1 direkt sprechen	S1 - S6	F2 - F7
Satz laden	Gespeicherten Satz in das Display an der Cursorposition laden	 + Buchstabe	Alt + Buchstabe
Bereich Ebene 1 wechseln	Ein neuer Kommunikationsbereich aus Ebene 1 wird ausgewählt	 +  (=Bereichsmenü) dann S1 - S6	Alt + F10, (=Bereichsmenü) dann F2 - F7
Bereich Ebene 2 wechseln	Ein neuer Kommunikationsbereich aus Ebene 2 wird ausgewählt	 +  +  dann S1 - S6	Shift + Alt + F10, dann F2 - F7
Einstellmenü aufrufen		 + 	Alt + Enter
Einstellungen beenden	Rücksprung aus irgendeinem Menüpunkt		Enter
Gerät ausschalten		Eine der 6 Direkt-speicher-Tasten gedrückt halten.	