

GoTalk

**...robust, leistungsfähig
einfache Handhabung!**

Der **GoTalk** ist eine einfache aber sehr leistungsfähige Kommunikationshilfe mit natürlicher Sprachausgabe. Er schließt die Lücke zwischen Geräten zur Kommunikationsanbahnung (z.B. Tasten mit Sprachspeicher) und komplexen Kommunikationshilfen mit vielfältigen Einstell- und Speicher-möglichkeiten (z.B. Digivox Plus). Damit ist er nicht nur ideal in der Kommunikationsförderung einsetzbar, sondern kann für viele AnwenderInnen eine vollwertige Kommunikationshilfe sein.

Die hohe Speicherkapazität des **GoTalk** reicht für 36 Nachrichten mit einer Gesamtlänge von sechs Minuten.

Die großen Folientasten reagieren bereits auf leichten Druck und sind durch ein Fingerführaster voneinander getrennt. Vier Ebenen erleichtern die Organisation des Wortschatzes z.B. nach Themen oder verschiedenen BenutzerInnen. Ohne das die aktuellen Nachrichten gelöscht werden müssen, ist so ein schneller Wechsel zu einem anderen Thema möglich. Es genügt, die Ebene umzuschalten und ein anderes Deckblatt einzulegen.

Alle verwendeten Symboltafeln werden durch eine Folientasche geschützt im **GoTalk** verstaut und sind immer griffbereit. Sie sind gegen ein Herausfallen gesichert.

Auch die Ebenen können



gesperrt und die Nachrichten vor unbeabsichtigtem Löschen geschützt werden.

Der **GoTalk** ist robust und mit seinen 360g Gewicht sehr leicht. Merkmale, die ihn für den mobilen Einsatz prädestinieren. Hinzu kommt sein sehr geringer Stromverbrauch. Zwei handelsübliche AA-Batterien reichen für einen mehrmonatigen Betrieb. Natürlich können Sie auch entsprechende Akkus verwenden. Die einfache Handhabung des **GoTalk** ist auch von ausgesprochenen "Technikmuffeln" schnell zu erlernen.

Typische Einsatzbereiche:

lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, Kommunikationsförderung, Aphasie

Sinnvolles Zubehör:

Programm zur Erstellung von Symboltafeln (Boardmaker), Akkus und Ladegerät

Technische Details:

- Aufnahmekapazität: ca. 6 min auf 4 Ebenen
- Abmessungen: 31 x 23 x 2 cm
- Tastengröße: 5 x 5,5 cm
- Stromversorgung: 2 AA Batterien
- Gewicht: 360g