

Verwenden Sie auch gern mp3-Dateien mit cooler Musik auf Ihrem Kommunikationsgerät?

Auf den **DynaVox** Geräten **V** und **Vmax** können Sie Buttons mit der Aktion „Aufnahme abspielen“ belegen. Durch Drücken auf einen dieser Musik-Buttons spielen Sie eine mp3-Datei ab.

Tipp: Bei längeren Songs oder bei versehentlicher Auswahl eines falschen Musikstücks ist es praktisch, wenn der Nutzer die mp3 auch stoppen kann.



So programmiert man einen Stopp-Button:

- Wählen Sie den grünen Bearbeiten-Button in der Setup-Leiste
- Wählen Sie den Button, der die Stopp-Funktion enthalten soll
- Im Textfeld neben *Bezeichnung* „stopp“ eingeben
- Wählen Sie ggf. ein entsprechende Symbol dazu
- Drücken Sie den Button *Aktionen*
- Die erforderliche Aktion heißt *Aktionen stoppen* und ist in der Kategorie *Diverse* zu finden
- Wählen Sie im Drop-Down-Menü die Kategorie *Diverse*
- Wählen Sie im linken Fenster *Aktionen stoppen*
- Drücken Sie *Hinzufügen*
- *Aktionen stoppen* wird im rechten Fenster angezeigt (Das Gerät führt die Aktionen aus, die im rechten Sichtfenster angezeigt sind.)
- Schließen Sie alle Menüs mit *OK*.



Tipp: Wenn sie beim nächsten Mal nicht mehr genau wissen, wie die Aktion heißt und wo sie zu finden ist, drücken Sie einfach im Menü *Aktionen* den Button *Suche* und geben mit der Tastatur das Stichwort *stopp* ein.

