

Datensicherung E-Talk

Was wird benötigt ?

PC mit USB-Anschluss für mitgelieferten Kartenleser oder
Notebook oder PC mit integriertem PCMCIA Schacht bzw. Kartenleser

Wird der mitgelieferte Kartenleser verwendet, schließen Sie diesen bitte an den USB-Anschluß Ihres PC an. Zur Installation liegt eine CD mit Treiberdateien bei. Beachten Sie die Installationsanleitung des Kartenlesers und die Bedienungsanleitung Ihres Betriebssystems

Datensicherung durchführen:

1. E-Talk ganz abschalten, dazu:
 - Drücken Sie Setup
 - Drücken Sie irgend ein Feld
 - Drücken Sie Abschalten
 - Drücken Sie Ja
 - Drücken Sie Total Power Down
2. Speicherkarte aus dem E-Talk durch Druck auf den schwarzen Knopf rechts neben der Karte herausnehmen
3. Speicherkarte aus dem Adapter herausziehen und in den Kartenleser (bzw. mit Adapter in den PCMCIA-Schacht des Notebooks) stecken
4. Der PC meldet bei der ersten Anwendung neue Hardware und installiert selbständig notwendige Treiber. Danach ist die Speicherkarte als neues Laufwerk in Ihrem Dateimanager zu finden
5. Den kompletten Karteninhalt in ein Verzeichnis auf dem PC kopieren. Damit sind die Daten des E-Talk gesichert und können von dort aus auf gleichem Wege im Bedarfsfall wieder auf die Speicherkarte zurück kopiert werden.
6. Speicherkarte am PC deaktivieren (meist ist ein Symbol in der Taskleiste neben der Uhr)
7. Speicherkarte aus dem Kartenleser oder Schacht entnehmen und wenn notwendig in den Adapter einstecken
8. Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den E-Talk einschieben (schwarzer Knopf und Speicherkarte bilden dann die gleiche Höhe). Die Beschriftung der Speicherkarte zeigt dabei nach oben
9. E-Talk über RESET-Knopf starten.

