



PowerLink

Blumenwiesen malen

Im Wonnemonat blüht und grünt es draußen wie verrückt! Wenn es doch einmal regnet, holen wir uns die Blumenwiesen einfach ins Haus und verbringen die Zeit drinnen mit Basteln und Malen - und alle machen mit! Auch wer keinen Stift oder Pinsel halten kann, bastelt ist aktiv dabei:



Man nehme:

- Papier, Wasserfarbe, Pinsel
- PowerLink mit Föhn oder Ventilator
- ggf. Sprechende Tasten oder ein GoTalk

Und so geht's:

- Ein Kind ohne motorische Beeinträchtigungen malt eine grüne Wiese
- Dann bringt ein Erwachsener bunte Wasserfarbkleckse auf

Tipp: Das Kind kann z.B. mit Hilfe eines GoTalks die gewünschte Farbe auswählen

- Der Erwachsene hält den Föhn (am besten mit Aufsatz) an die Kleckse
- Das Kind betätigt den PowerLink und die Blüte entsteht!

Tipp: Mit zwei Sprechenden Tasten oder einem iTalk2 können die Kinder mit den Aussagen "mehr" und "genug" bestimmen, wie bunt ihr Bild werden soll.

Kommunikation ist Interaktion

Das gemeinsame Basteln ermöglicht die einfache Integration beeinträchtigter Kinder in eine Gruppenaktivität. So helfen sich z.B. die Kinder gegenseitig (wer malen kann, malt Wiesen vor). Nicht beeinträchtigte Kinder können ähnliche Blüten kreieren, indem sie mit einem Strohhalm auf die Kleckse pusten!