

DynaVox V/Vmax und Sopur Groove

Bedienung der Kommunikationshilfe per Rollstuhl-Joystick

Häufig erreichen uns Anfragen, ob die Bedienung einer Kommunikationshilfe auch direkt über die Steuerung eines Rollstuhl-Joysticks möglich ist. Wir haben nun den E-Rollstuhl Groove von Sopur (Sunrise Medical) und die DynaVox-Geräte V und Vmax zusammengebracht.

Mit dem Joystick, der den Rollstuhl lenkt, können Sie auch das DynaVox V oder Vmax ansteuern. Sie wählen jeweils zwischen dem Modus „Fahren“ und „Kommunizieren“. Der Joystick des Rollstuhls bewegt die Joystick-Markierung auf der Kommunikationshilfe. Die Auswahl erfolgt mit Pause.

Sie benötigen dazu:

- Kommunikationshilfe DynaVox V/Vmax



- Sopur Groove E-Rollstuhl



- mit QR-ECM (Quickie Rehab-Environmental Control Modul)



- Kabel „16“ (bei REHAVISTA erhältlich)



Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gern weiter. Schicken Sie uns eine E-Mail an: dynavox@rehavista.de