


Zwei Symbole auf einen Button speichern

von Sabine Ell, Dynavox

Wenn Sie einen Button mit zwei Symbolen programmieren möchten, bearbeiten Sie den Button in *Seite bearbeiten -> Vollversion*.

- Drücken Sie den *Setup-Pfeil*
- Wählen Sie dann: *Seite bearbeiten – Vollversion*
- Mit dem *Markieren-Pfeil* in der Tool Leiste können Sie das Symbolfeld auswählen, dies erscheint daraufhin blau umrandet
- Drücken Sie den grünen *Bearbeiten-Button*, um ein Symbol zu wählen (z.B. Hund)
- Vergrößern/verkleinern und verschieben Sie das Symbolfeld innerhalb des Buttons so, dass noch ein zweites Symbolfeld auf dem Button Platz hat

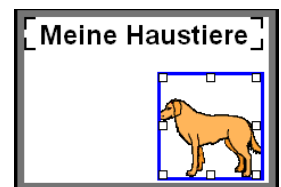

Sie haben zwei Möglichkeiten, um das zweite Symbol auf dem Button zu platzieren:

Möglichkeit 1. Symbol kopieren

- Das Symbolfeld ist markiert (blauer Rahmen): wählen Sie das *Stempel-Symbol* in der *Setup-Leiste* links oben zum Kopieren
- drücken Sie dann die *Sprühdose* (ebenfalls links oben in der Ecke neben dem *Stempel*) zum Einfügen des kopierten Elementes



Sie haben nun 2 Hunde auf Ihren Button kopiert. Wenn Sie nun zum Beispiel den linken Hund in eine Katze verwandeln möchten, dann:


- markieren Sie das Symbolfeld und drücken den grünen *Bearbeiten-Button*
- in der Symbolauswahl können Sie nun ein anderes Symbol festlegen

Zum Verlassen der *Vollversion* drücken Sie den *Setup-Pfeil* und wählen *Bearbeiten schließen*.

Möglichkeit 2. Symbol hinzufügen

Sie haben einen Button mit einem Symbol und möchten ein weiteres Symbol hinzufügen.

- Wählen Sie in der *Tool-Leiste* das Symbol für *Symbol* (Aa – Smily)
- Klicken und ziehen Sie mit der Maus ein Feld
- Wenn Sie den Klick lösen, öffnet sich automatisch ein Fenster und Sie können das Symbol auswählen

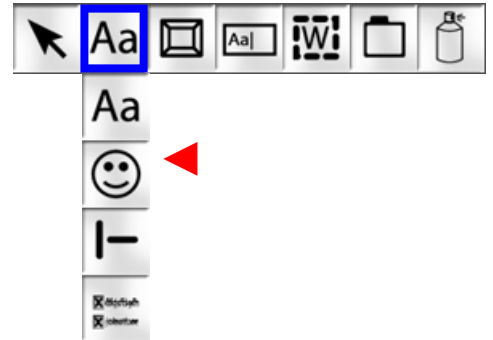


Zum Verlassen der *Vollversion* drücken Sie den *Setup-Pfeil* und wählen *Bearbeiten schließen*.

Tipps für DynaVox V / Vmax:

Mit dem Symbol-Werkzeug in der Tool-Leiste können Sie ein Symbolfeld nicht nur auf einen Button zeichnen, sondern auch direkt auf eine Seite. So können Sie z.B. eine Seite mit Hintergrundbild individuell gestalten. Sie verwenden z.B. ein Camping-Foto als Hintergrundbild auf der Seite.

In *Seite bearbeiten – Vollversion* können Sie nun mit dem *Symbol-Werkzeug* Symbole (wie Sonne, Vogel, Getränke, Schlafsack,...) direkt in das Bild zeichnen.

- Wählen Sie in der *Tool-Leiste* das Symbol für *Symbol* (Aa – Smile-Gesicht)
- Klicken und ziehen Sie mit der Maus ein Feld

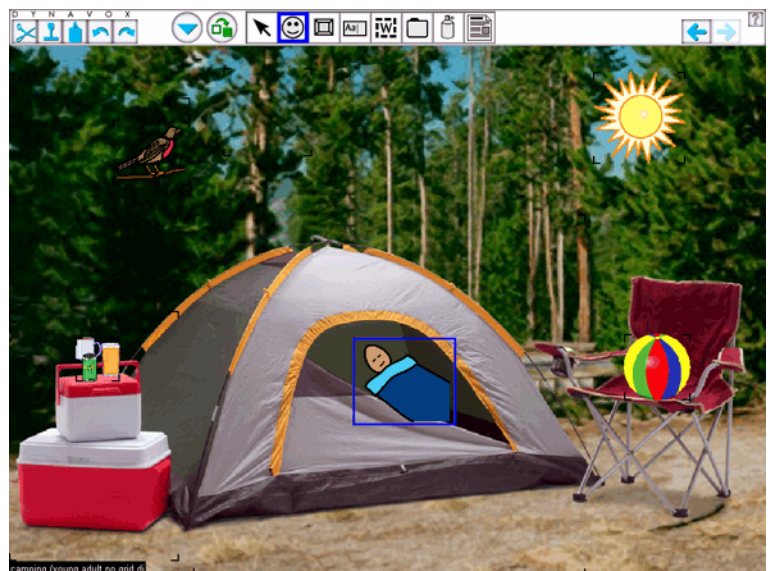

Die Symbolfelder können Sie beliebig auf dem Hintergrund bewegen (markieren und mit gedrückter linker Maustaste an gewünschte Stelle verschieben) oder die Größe anpassen (Symbolfeld markieren und bei Erscheinen des doppelseitigen Pfeils durch gedrückte linke Maustaste die gewünschte Größe schieben).

Zum Verlassen der *Vollversion* drücken Sie den *Setup-Pfeil* und wählen *Bearbeiten schließen*.