


Datensicherung DynaVox MT4/DV4 und V/Vmax

Inhalt:

1. Package von Seiten auf dem Gerät erstellen und auf dem USB-Stick speichern
2. Package von Seiten auf dem Computer erstellen und auf dem USB-Stick speichern
3. Package von Seiten vom USB-Stick in das DynaVox Gerät importieren
4. Package von Seiten vom USB-Stick auf den Computer zu importieren

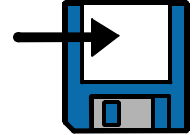

Was ist ein Package von Seiten? Alle Kommunikationsseiten, die der Nutzer verwendet, können als eine Datei abgespeichert werden. In diesem Datenpaket (Package von Seiten) sind alle Kommunikationsseiten (auch Fotos und Aufnahmen, die auf diesen Seiten verwendet werden) abgespeichert.

Tipp: Speichern Sie alle Kommunikationsseiten, die ihr Nutzer verwendet, in einem Ordner im Seitenverzeichnis ab. Dies erleichtert Ihnen die Datenverwaltung.

Ein Package von Seiten zu erstellen ist eine praktische Lösung um Seiten, die Sie auf Ihrem Computer oder einem DynaVox-Gerät erstellt haben, auf ein anderes Gerät (des gleichen Typs) zu übertragen. Nutzen Sie das Erstellen eines Packages auch, um regelmäßig Ihre Seiten abzuspeichern. Bei einem Datenverlust können Sie so einfach auf das zuletzt erstellt Package zurückgreifen und die Inhalte schnell wieder herstellen.

1. Package von Seiten auf dem Gerät erstellen und auf dem USB-Stick speichern. So geht's:

- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres Gerätes
- Drücken Sie den *Setup-Pfeil*, dann: *Setup*, dann: *Extras*, dann: *Seitenverzeichnis*
- Wählen Sie im linken Fenster den Namen des Ordners _____ Name des Ordners
- Kreuzen Sie im rechten Fenster alle Seiten an, die im Package von Seiten abgespeichert werden sollen

Tipp: Um sicher zu gehen, dass alle Daten abgespeichert werden, wählen Sie alle Seiten des Ordners aus.

- Drücken Sie *Datentransfer*, dann: *Package von Seiten*
- Wählen Sie die Option *alle Laufwerke anzeigen*
- Wählen Sie im linken Fenster, das Symbol, das Ihren USB-Stick repräsentiert (z.B. (:d) oder UMS-Folder)
- Drücken Sie in das Textfeld neben Name und geben Sie den Namen ein, unter welchem Sie das Package abspeichern wollen: _____ Name des Packages.pak

Tipp: Sie können die Datenverwaltung vereinfachen, indem Sie z.B. das Datum in den Namen integrieren.

- Drücken Sie *OK*: Das Package von Seiten wird erstellt
- Auf dem Display erscheint die Meldung: Package erfolgreich erstellt
- Drücken Sie *OK* und schließen alle weitere Fenster mit *OK*



2. Package von Seiten auf dem Computer erstellen und auf dem USB-Stick speichern. So geht's:

- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres Computers
- Starten Sie die DynaVox Editing (PC-Bearbeiten) Software
- Drücken Sie: *Setup-Pfeil*, dann *Setup* dann: *Extras* dann: *Seitenverzeichnis*
- Wählen Sie im linken Fenster den Namen des Ordners _____ Name des Ordners
- Kreuzen Sie im rechten Fenster alle Seiten an, die im Package von Seiten abgespeichert werden sollen

Tipp: Um sicher zu gehen, dass alle Daten abgespeichert werden, wählen Sie alle Seiten des Ordners aus.

- Drücken Sie: *Datentransfer*, dann *Package von Seiten*
- Wählen Sie die Option *alle Laufwerke anzeigen*
- Wählen Sie im linken Fenster das Symbol, das Ihren USB-Sticks repräsentiert (z.B. (:d) oder UMS-Folder)

Tipp: Wenn Sie die Package-Datei direkt auf Ihrem PC abspeichern möchten, wählen Sie im linken Fenster z.B. die Festplatte „C:“, wählen Sie rechts den Ordner, in dem Sie die Datei abspeichern möchten.

- Drücken Sie in das Textfeld neben *Name* und geben Sie den Namen für das Package ein

_____ Name des Packages.pak

Tipp: Sie können die Datenverwaltung vereinfachen, indem Sie z.B. das Datum in den Namen integrieren.

- Drücken Sie *OK*: Das Package von Seiten wird erstellt
- Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung: Package erfolgreich erstellt.
- Drücken Sie *OK* und schließen Sie alle Fenster mit *OK*

3. Ein Package von Seiten vom USB-Stick in das DynaVox Gerät importieren. So geht's:

Wenn Sie ein Package von Seiten auf Ihrem DynaVox-Gerät oder in der Editing-Software auf Ihrem Computer importieren, werden alle in dieser Datei abgespeicherten Seiten in das Seitenverzeichnis kopiert.

- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres DynaVox-Gerätes
- Drücken Sie den *Setup-Pfeil*, dann *Setup* dann: *Extras* dann: *Seitenverzeichnis*
- Wählen Sie im linken Fenster den Ordner, in welchem die Kommunikationsseiten abgelegt werden sollen

Tipp: Sie können auch einen neuen Ordner erstellen. Drücken Sie dazu die Option *Neuer Ordner* und geben Sie den Namen _____ Name des Ordners für den Ordner ein.



- Drücken Sie *Datentransfer*, dann *Package importieren*
- Wählen Sie *alle Laufwerke zeigen*
- Wählen Sie im linken Fenster das Symbol, das Ihren USB-Sticks repräsentiert (z.B. (:d) oder UMS-Folder)
- Wählen Sie im rechten Fenster die Package-Datei _____ Name des Packages.pak Drücken Sie *OK*
- Wenn Sie alle Seiten mit gleichem Namen überschreiben wollen, drücken Sie *Ja*
- Drücken Sie *OK*, wenn das Package erfolgreich importiert wurde
- Schließen Sie alle Fenster mit *OK*

4. Package von Seiten vom USB-Stick auf den Computer importieren. So geht's:

- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres Computers
- Drücken Sie den *Setup-Pfeil*
- *Setup* dann: *Extras* dann: *Seitenverzeichnis*
- Wählen Sie im linken Fenster den Ordner im Seitenverzeichnis, in welchem die Kommunikationsseiten abgelegt werden sollen

Tipp: Sie können auch einen neuen Ordner erstellen. Drücken Sie dazu die Option *Neuer Ordner* und geben Sie den Namen _____ Names des Ordners für den Ordner ein.

- Drücken Sie *Datentransfer*
- *Package importieren*
- Wählen Sie *alle Laufwerke zeigen*
- Wählen Sie im linken Fenster das Symbol, das Ihren USB-Sticks repräsentiert (z.B. (:d) oder UMS-Folder)

Tipp: Möchten Sie eine Package-Datei importieren, die auf Ihrem Computer abgespeichert ist, wählen Sie im linken Fenster das Laufwerk „C:“ und im rechten Fenster das Verzeichnis, in welchem die Package-Datei abgelegt worden ist.

- Wählen Sie im rechten Fenster die Package-Datei _____ Name des Packages.pak
- Drücken Sie *OK*
- Wenn Sie alle Seiten mit gleichem Namen überschreiben wollen, drücken Sie *Ja*
- Drücken Sie *OK*, wenn das Package erfolgreich importiert wurde
- Schließen Sie das Seitenverzeichnis mit *OK*
- Schließen Sie die Extras mit *OK*



Package von Seiten – Verwaltung:

Name der Package-Datei:

Datum:

gespeichert unter:

_____ name.pak

_____ name.pak

_____ name.pak
