



M³ Spickzettel

Kurze Bedienanleitung für DynaVox M³ / M³max

von Sabine Ell, DynaVox.

Buttons bearbeiten

- **Bearbeiten-Button** drücken (Schraubenzieher-Symbol in der Setup-Leiste links oben)
- Button drücken, der bearbeitet werden soll
- Ins Textfeld neben **Bezeichnung** drücken, die Bildschirmtastatur wird geöffnet, Bezeichnung des Buttons eingeben, mit **OK** betätigen
- **Nachricht aufnehmen** drücken, das Menü **Ton abspielen** öffnet sich
- **Neu** drücken, mit der Tastatur den Namen für die Aufnahme eingeben
- **Aufnehmen** drücken, Button gedrückt halten solange die Mitteilung aufgenommen wird
- **Speichern** drücken, um die Aufnahme zu speichern
- Im Fenster links muss der Name der Aufnahme markiert sein, mit **OK** bestätigen
- **Symbol** drücken, das Menü **Symbol auswählen** öffnet sich
- In das Textfeld neben **Suche** drücken, den Suchbegriff für das Symbol eingeben
- Im Fenster rechts auf das Symbol drücken, das ausgewählt werden soll (auch, wenn nur ein Ergebnis angezeigt wird); mit **OK** schließen

Mitteilung aufnehmen

- **Aufnahme-Button** (Mikrofon-Symbol in der Setup-Leiste oben links) drücken
- Button drücken, auf dem die Aufnahme gespeichert werden soll, die Bildschirmtastatur wird geöffnet
- Mit der Tastatur den Namen für die Aufnahme eingeben
- **Aufnehmen** drücken, Button gedrückt halten solange die Mitteilung aufgenommen wird
- **Speichern** drücken, um die Aufnahme abzuspeichern

Lautstärke einstellen

- **Setup-Button** (in der Setup-Leiste oben rechts) drücken, das Setup wird geöffnet
- **Lautstärke** auswählen
- den Schieberegler unter **Lautstärke** nach links/rechts ziehen, die gewünschte Lautstärke festlegen, zweimal mit **OK** bestätigen



Setup-Leiste schützen - Buttons ausblenden

- **Setup-Button** (in der Setup-Leiste oben rechts) drücken, das Setup wird geöffnet
 - **Grundeinstellung** öffnen, Registerkarte **Setup-Leiste** auswählen
 - Kontrollkästchen **Nur Setup-Button anzeigen** auswählen, zweimal mit **OK** bestätigen
- In der Setup-Leiste ist nur noch der Setup-Button rechts angezeigt, die anderen Bedien-Buttons links sind ausgeblendet
- Einblenden der Buttons: **Setup-Button – Grundeinstellung – Setup-Leiste – Kreuz neben Nur Setup-Button anzeigen** entfernen – zweimal mit **OK** bestätigen

Setup-Leiste schützen – Passwort einrichten

- **Setup-Button** (in der Setup-Leiste oben rechts) drücken, das Setup wird geöffnet
 - **Grundeinstellung** öffnen, Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** auswählen
 - Unter **Passworteinstellungen** Kontrollkästchen **Passwort aktivieren** auswählen
 - Bildschirmtastatur wird geöffnet, Passwort mit der Tastatur eingeben; mit **OK** bestätigen; das Passwort zur Bestätigung ein zweites Mal eingeben; mit **OK** bestätigen, mit **OK** bestätigen, **Grundeinstellung** mit **OK** schließen; Setup mit **OK** schließen
- Ist das Passwort aktiviert, öffnet sich bei Drücken des **Setup-Buttons** die Bildschirmtastatur. Das Setup wird nach Eingabe des Passwortes geöffnet.
- Deaktivierung des Passwortes: **Setup-Button – Grundeinstellung – Erweiterte Einstellungen – Passworteinstellungen – Kreuz neben Passwort aktivieren** entfernen – zweimal **OK** bestätigen