

V/Vmax Spickzettel

Kurze Bedienanleitung für DynaVox V / Vmax

von Sabine Ell, DynaVox.



Buttons bearbeiten

- **Bearbeiten-Button** drücken (grüner Button in der Setup-Leiste), der Button wird rot
- Button drücken, der bearbeitet werden soll; das Menü **Bearbeiten-Button** wird geöffnet

Bezeichnung

- Ins Textfeld neben **Bezeichnung** drücken, die Bildschirmtastatur wird geöffnet, Bezeichnung des Buttons eingeben, mit **OK** bestätigen, wenn das System der Bezeichnung ein Symbol zuordnen kann, wird automatisch ein Symbol neben dem blauen Button **Symbol** angezeigt

Symbol

- Zum Ändern oder Einfügen eines Symbols auf **Symbol** drücken, die **Symbolgalerie** wird geöffnet
- **Suche** drücken, im Sichtfenster rechts werden alle Symbole zu diesem Suchbegriff angezeigt
- Zur Eingabe eines Suchbegriffes in das Textfeld neben **Suche** drücken; die Tastatur wird geöffnet, Suchbegriff eingeben und mit **OK** bestätigen
- Gewünschtes Symbol im Sichtfenster auswählen (auch wenn nur ein Ergebnis angezeigt wird), im Menü **Bearbeiten-Button** wird das ausgewählte Symbol angezeigt

Aktionen

- **Aktionen** drücken, gewünschte Aktion im linken Fenster auswählen und mit **Hinzufügen** im rechten Fenster unter **Reihenfolge** hinzufügen (**oder**: durch Doppelklick auf die gewünschte Aktion im linken Fenster, diese Aktion im rechten Fenster hinzufügen), mit **OK** bestätigen.

Hinweis: das System führt alle Aktionen, die im rechten Fenster angezeigt werden, in der angegebenen Reihenfolge aus.

Die wichtigsten Aktionen werden im linken Fenster unter **Favoriten** angezeigt:

- **Bezeichnung ins Nachrichtenfenster:** Button-Bezeichnung wird in das NF eingefügt
 - **Bezeichnung sprechen:** Button-Bezeichnung wird direkt gesprochen
 - **Seite öffnen:** eine andere Seite wird geöffnet
 - **Text ins Nachrichtenfenster:** eingegebener Text wird ins NF eingefügt
 - **Text sprechen:** eingegebener Text wird direkt gesprochen
- mit **OK** bestätigen und das Menü **Bearbeiten-Button** schließen



Setup-Leiste schützen - Buttons ausblenden

- **Setup-Button** (blaues Dreieck in der Setup-Leiste) drücken, **Setup** drücken, **Setup öffnen** drücken, das Setup wird geöffnet
- **Grundeinstellung** öffnen, Registerkarte **Setup-Leiste** auswählen

Setup-Button 3 Sekunden drücken (Setup Button reagiert erst nach 3 Sekunden drücken)

- Kästchen neben **3 Sekunden drücken** ankreuzen, mit **OK** bestätigen

Passwort aktivieren (Setup öffnet sich erst nach Eingabe des Passworts)

- Kästchen neben **Passwort aktivieren** ankreuzen, Passwort mit der Tastatur eingeben, mit **OK** bestätigen, Passwordeingabe wiederholen, mit **OK** bestätigen
- Einrichten des Passwortes mit **OK** bestätigen

Bearbeiten-Button ausblenden (der grüne Button wird in der Setup-Leiste nicht angezeigt)

- das Kreuz im Kästchen neben **Bearbeiten-Button zeigen** entfernen

Vollbildschirm-Anzeige

- **Setup-Button** (blaues Dreieck in der Setup-Leiste) drücken, **Setup** drücken, **Setup öffnen** drücken, das Setup wird geöffnet
- **Systemeinstellung** auswählen, Kontrollkästchen neben **Vollbildschirm-Anzeige** ankreuzen, mit **OK** bestätigen

Die Setup-Leiste ist ausgeblendet, Zugang zum Setup durch Drücken auf das Dreieck oben rechts bzw. Power-Button – Mini-Setup-Leiste

Benutzer auf einen USB-Stick sichern

- USB-Stick in einen der beiden USB-Ports auf der linken Seite des Geräts einstecken
- **Setup-Button** (blaues Dreieck in der Setup-Leiste) drücken, **Setup** drücken, **Setup öffnen** drücken, das Setup wird geöffnet
- **Benutzerverzeichnis** auswählen, der aktuelle Benutzer ist im Sichtfenster markiert
- **Sicherung des ausgewählten Benutzers** drücken
- Mit **Nein** bestätigen, wenn die E-Mail-Einstellungen nicht einbezogen werden sollen
- **Alle Laufwerke zeigen** ankreuzen
- USB-Stick im linken Fenster auswählen
- Ins Textfeld neben **Name** drücken, Dateiname mit der Tastatur eingeben, mit **OK** bestätigen
- Warten bis die Backup-Datei erstellt ist, erfolgreiches Backup mit **OK** bestätigen
- Menüs mit **OK** schließen