

## DynaVox V/Vmax: Themenseiten erstellen/ Buttons gleichzeitig befüllen

Gerade im Schulalltag kann es vorkommen, dass Sie eine Kommunikationsseite mit bestimmtem Randvokabular benötigen, z.B. für Projektstage. Bei langen Wortlisten ist die Programmierung jedes einzelnen Buttons jedoch recht mühsam. Mit Hilfe der Editing Software können Sie viel Zeit sparen: Das Bearbeitungsprogramm ermöglicht Ihnen ein schnelles Befüllen mehrerer Button zur gleichen Zeit.


**Beispiel:** Sie möchten in der Gateway Plauderecke im Bereich Lernen ein Fach zum Thema Herbst anlegen.

- öffnen Sie die Editing-Software auf Ihrem Computer
- öffnen Sie z.B. die Gateway Plauderecke
- öffnen Sie dort z.B. den Reiter "Lernen"
- wählen Sie einen der vorbereiteten "Fach"-Buttons aus
- drücken Sie den grünen Bearbeiten-Button, dann Fach1. Wählen Sie ein neues Symbol (z.B. Herbst)
- öffnen Sie über den Herbst-Button die neue leere Seite
- minimieren Sie die Editing Software, in dem sie ganz oben rechts auf das "-" Zeichen drücken
- alternativ können Sie das Fenster auch lediglich verkleinern, indem Sie das doppelte Fenster-Zeichen drücken. In diesem Fall bleibt die Editing Software sichtbar geöffnet
- Öffnen Sie eine Textdatei (z.B. Word, OpenOffice, etc)
- schreiben Sie eine Liste der Wörter, die Sie Ihrem Nutzer auf die Seite speichern möchten.



**Hinweis:** Achten Sie darauf nur Wörter im Singular (Einzahl) aufzulisten

- markieren Sie die Wortliste (mit Linksklick und halten)
- halten Sie die Auswahl mit einem Linksklick fest. Führen Sie die Maus über die minimierte Editing Software (unten auf ihrem Bildschirm). Die Editing Software öffnet sich wieder
- Halten Sie die Auswahl weiter fest und ziehen Sie diese zwischen zwei Buttons auf der Seite
- wählen Sie im rechten Fenster auf der Seite die gewünschten Symbole aus und wählen Sie: "zu Button"

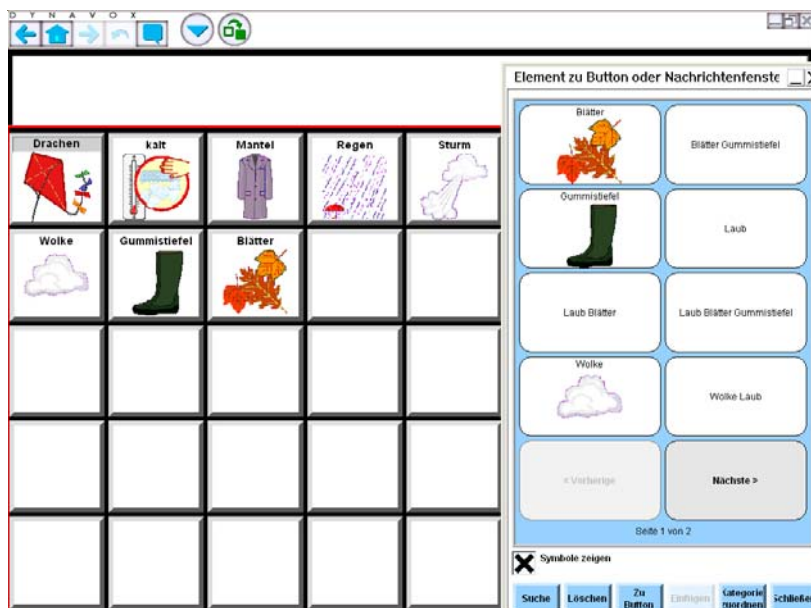

**Fertig:** Die Wortliste wurde erfolgreich auf die Seite importiert