



## Software Upgrade DynaVox V/Vmax



**Bringen Sie Ihr Gerät auf den neusten Stand! Ab sofort steht Ihnen ein kostenfreies Update (Version 1.06) für Ihre DynaVox-Software zur Verfügung. Die Aktualisierung können Sie selbst durchführen, wenn Sie über einen Internet-Anschluss verfügen.**

### Warum soll ich mein Gerät oder meine Bearbeiten-Software aktualisieren?

V. 1.06 ist eine aktualisierte Softwareversion für Ihr DynaVox Gerät. Wenn Sie weiterhin von unseren kostenlosen Materialien profitieren möchten, benötigen Sie das Upgrade, da Sie unsere Seiten nicht in älteren Versionen nutzen können. Außerdem stehen Ihnen mit der Version 1.06 neue Inhalte zur Verfügung:

### PCS-Symbole für Erwachsene / Deutsche PCS-Symbole

Mit dem Software-Update erhalten Sie Zugriff auf die neue PCS-Symbolsammlung 2009, die aufgrund der weniger kindlichen Zeichnungen besonders für Erwachsene interessant ist. Ebenso neu auf dem Kommunikationsgerät verfügbar ist die deutsche PCS-Symbolsammlung.

#### Beispiele für Symbole für Erwachsene:



#### Beispiele für deutsche PCS-Symbole:



### Nach dem Update: Wo finde ich die neue PCS-Symbolsammlung?

- verfahren Sie wie gewohnt, um einen Button mit einem Symbol zu belegen
- drücken Sie "Auswahl Symbolsammlung", setzen Sie ein Kreuz bei "PCS-2009 Addendum-for-series5" und bei "PCS deutsch"

### Für Nutzer der Augensteuerung EyeMax hat sich Folgendes verändert:

Auswahl anhalten: Ein zusätzliches, blaues Aktionsfeld am Rand des Bildschirms dient dazu, die Erkennung der Augen zeitweise auszuschalten ("Pause")

Zoom: Elemente auf dem Bildschirm lassen sich vergrößern, um die Auswahl mit den Augen zu vereinfachen






**Allgemeiner Hinweis:** Sollten Sie nicht über einen Internet-Anschluss verfügen oder Probleme bzw. Fragen zum Upgrade haben, wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen REHAVISTA-Partner.

**Tipp:** Führen Sie vor dem Upgrade eine Datensicherung durch (siehe pdf Datensicherung). Speichern Sie bitte Ihre Kommunikationsseiten grundsätzlich regelmäßig auf Ihrem Computer ab.

**Und so geht's:** Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem DynaVox V/Vmax und dem Internet her. Nutzen Sie dazu den Netzwerkanschluss Ihrer DynaVox.

- Drücken Sie den blauen Setup-Button, wählen Sie *Setup*, dann *Setup öffnen*
- Drücken Sie *Systemeinstellung*
- Sollte Ihr Software-Version älter sein als die neue V. 1.06 erscheint neben *Upgrade* ein grüner Haken
- Drücken Sie den Button *Upgrade*
- Das System fragt: *Das Upgrade wird Ihre Software überschreiben. Möchten Sie fortfahren?*
- **Hinweis:** Lediglich Ihre Software-Version wird überschrieben, alle Inhalte bleiben erhalten!
- Bestätigen Sie mit *Ja*, das Upgrade beginnt.
- **Der Vorgang benötigt eine längere Zeit. Bitte schalten Sie Ihr Gerät währenddessen nicht aus!**
- Nach Fertigstellung des Upgrades wird die aktuelle Software-Version 1.06 im Setup-Menü (Setup-Button, *Setup*, *Setup öffnen*) angezeigt.
- **Tipp:** Verfahren Sie genauso, um Ihre Editing- (Bearbeiten) PC-Software zu aktualisieren.

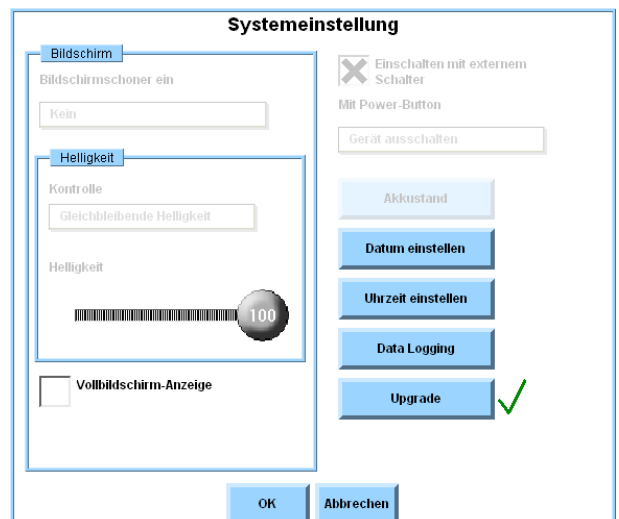

#### Hinweis für Nutzer des Betriebssystems Windows Vista:

- Wenn Sie mehrere Benutzer eingerichtet haben, wechseln Sie in den Admin-Benutzer
- Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Benutzerkonten > Benutzerkontensteuerung ein- oder ausschalten*. Entfernen Sie dort den Haken
- Öffnen Sie die Editing-Software und führen Sie das Upgrade durch wie oben beschrieben
- Fügen Sie den Haken nach dem Software-Upgrade wieder ein