

## DynaVox V/Vmax: E-Mail mit Symbolen

Mit den DynaVox Geräten V und Vmax können Sie einfach und problemlos vom Gerät aus E-Mails versenden. Der Nutzer stellt seine Nachricht über Schrift oder Symbole (z.B. mit Hilfe von Gateway) zusammen. Wählt er die Option Symbole, so erscheint die Botschaft beim Empfänger der E-Mail ebenfalls symbolunterstützt! Erhält der Anwender selbst eine E-Mail, so kann er sich die Nachricht mittels der synthetischen Stimme vom Gerät vorlesen lassen.



**Betreff:**  
**Von:** Sabine <sabine2@mydvox.com>  
**Datum:** Thu, 17 Apr 2008 18:46:54 +0200  
**An:** <sabine.ell@rehavista.de>



Hilfe des Fotos oder Symbols kann der Nutzer den Empfänger auswählen und die Mail direkt zu ihm oder ihr schicken, ohne extra die Adresse eintippen zu müssen.

### Und so geht's:

Ihr DynaVox-E-Mail-Konto lässt sich bei der ersten Benutzung schnell und einfach einrichten. Der Anwender wählt einen Namen für sein Konto, das System erstellt daraufhin das mydvox E-Mail-Konto. Mit der Aktion "direkte E-Mail an" lässt sich der Inhalt eines Textfensters unkompliziert an den Empfänger senden: In einem Adressbuch sind die möglichen Empfänger abgespeichert, z.B. mit

**Hinweis:** Voraussetzung für die Nutzung der E-Mail-Funktion Ihres DynaVox V bzw. Vmax nutzen zu können, ist ein Netzwerk mit Internetanschluss.