

# Installationsanleitung Boardmaker mit SDPro

Das Programm **Boardmaker mit SDPro** - folgend "SDP" genannt - besteht aus 4 CDs:



Programm



Ergänzungen




Stimme weiblich



Stimme männlich


Beginnen Sie die Installation mit der CD **Programm**

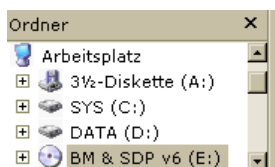


Momentan auf der CD vorhanden



Legen Sie die CD **Programm** ins CDROM-Laufwerk und starten Sie das Programm "Setup.exe".

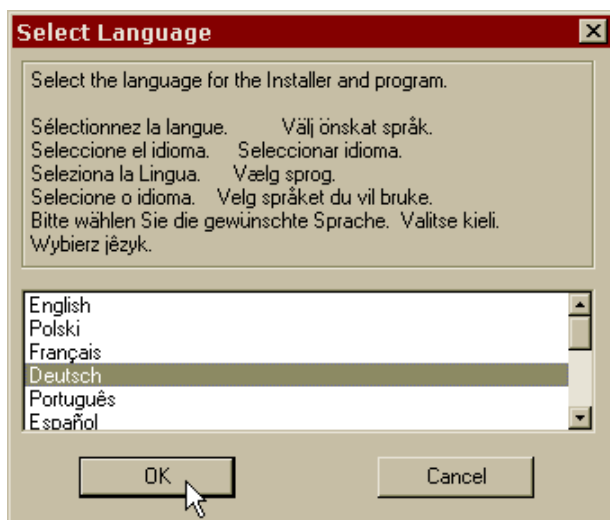


Vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Sprache für das Installationsprogramm gewählt ist. Bei einem deutschen Windows sollte automatisch "Deutsch" vorgewählt sein.

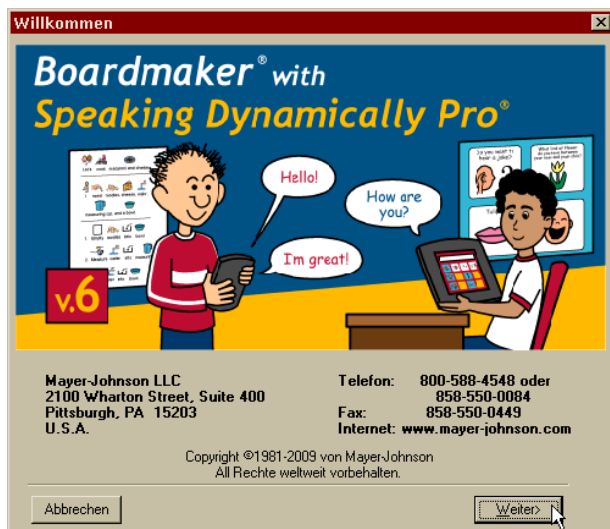

Mit Klick auf **Weiter** rufen Sie das nächste Fenster der Installationssequenz auf.

install-sdp-v6 • V1.10 • 12.1.2010 • pv  
©2010 by REHAVISTA • www.rehavista.de

Wie bei Windows üblich, werden Sie gebeten vor der Installation alle laufenden Programme zu beenden.

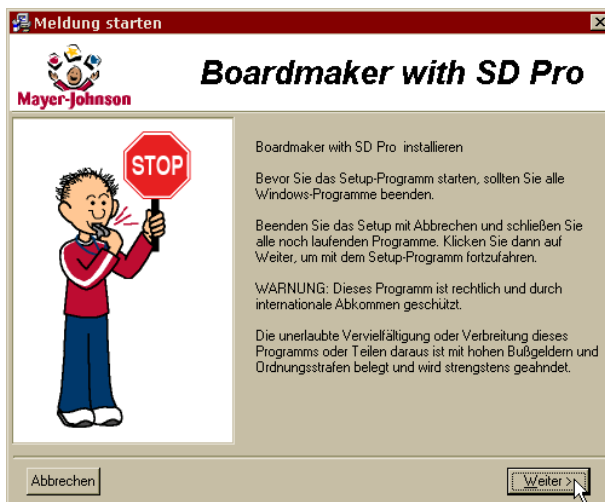


Der Speicherort der Programms ist vorgegeben. Bei Bedarf können Sie zwar einen anderen Speicherort angeben, wir empfehlen Ihnen jedoch die Voreinstellung anzunehmen.




Inzwischen sind Computer mit reichlich bemessenem Festplattenspeicher ausgestattet, darum wurde die Wahlmöglichkeit bzgl. schwarzweißer und farbiger Symbole entfernt. Nun wird immer sowohl der farbige als auch der schwarzweiße Symbolsatz komplett installiert.

Wenn Sie Symbole zum Thema "Sexualität" installieren möchten, müssen Sie hier explizit auf "Ja" klicken.

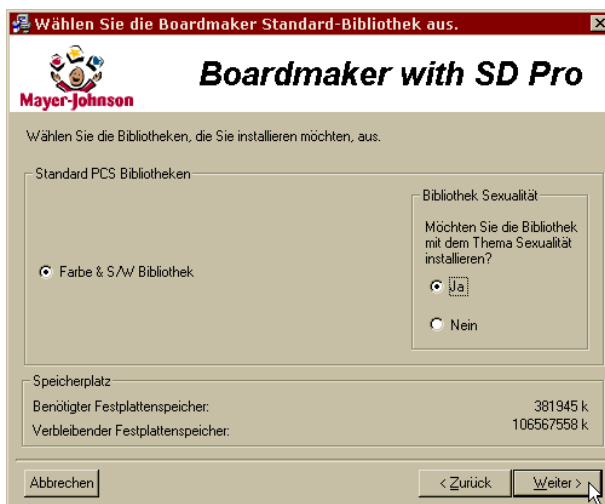



"Andere Länder, andere Sitten!" Das gilt für die symbolorientierte Kommunikation natürlich auch. Überprüfen Sie bitte (Liste etwas nach unten rollen), ob bei "Deutschland" ein Häkchen gesetzt ist. Sonst müssen Sie auf so wichtige Symbole wie "Bundeskanzlerin", "gelber Sack" oder "Leberkäse" verzichten!

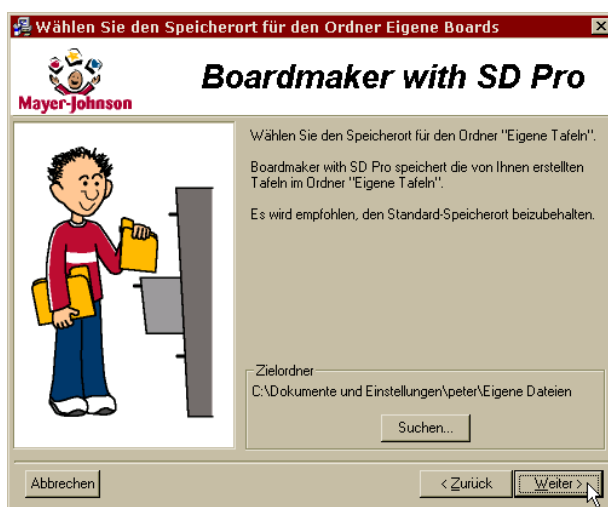

Für selbsterstellte Tafeln ist der Ordner mit dem Namen "Eigene Tafeln" vorgesehen. Dieser wird für jeden Nutzer des Rechners üblicherweise im eigenen Benutzerpfad

..\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Eigene Dateien\

angelegt. Diese Voreinstellung sollten Sie möglichst nicht verändern.



Alle notwendigen Informationen wurden nun abgefragt. Mit Klick auf **Weiter** starten Sie die eigentliche Installation.

Mit dem Button **Zurück** können Sie die Einstellungen der letzten drei Fenster neu festlegen.

Mit **Abbrechen** haben Sie hier letztmalig die Gelegenheit den Installationsvorgang abzubrechen, so dass keinerlei Veränderungen an Ihrem Computer vorgenommen werden.




Während der Installation zeigt ein wachsender Balken den Fortschritt an.

Programme und Daten wurden vollständig auf Ihre Festplatte kopiert. Bitte belassen Sie die Programm-CD noch im CDROM-Laufwerk, damit der folgende erste Programmstart reibungslos erfolgen kann.



Die Firma Mayer-Johnson betreibt ein englischsprachiges Internet-Portal rund um das Thema "Lernen". Sie können dieses Portal selbstverständlich jederzeit nutzen.


Hier klicken Sie jedoch bitte auf den Button **I'll check it out later**, damit die SDP-Installation vervollständigt werden kann.

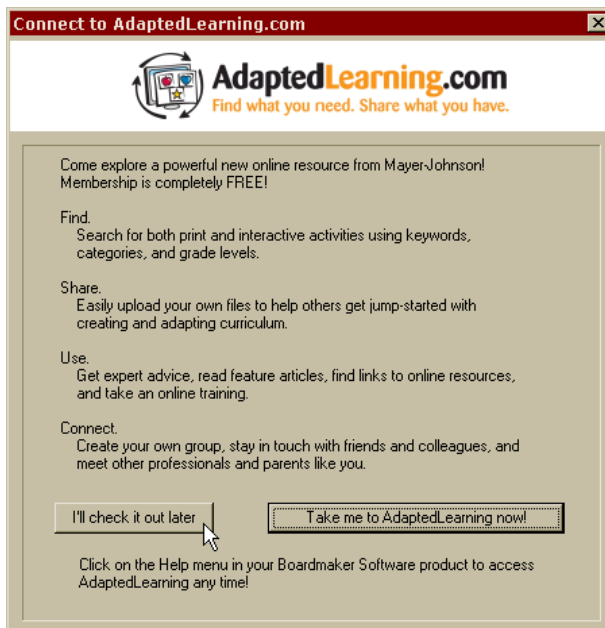

SDP wird nun zum ersten Mal gestartet, doch stehen Ihnen noch nicht alle Ressourcen zur Verfügung. Erst mit der Installation der restlichen drei CDs (Ergänzungen, weibliche und männliche Stimme) ist der komplette Lieferumfang verfügbar.

Beim ersten SDP-Start werden Sie gebeten, den Lizenzvereinbarungen zuzustimmen. Nach Ihrer Zustimmung werden Sie dieses Fenster künftig nicht mehr sehen.

Bitte beenden Sie das Programm mit "Datei - Beenden", Klick auf das "X" des Programmfensters oder [Alt]+[F4].

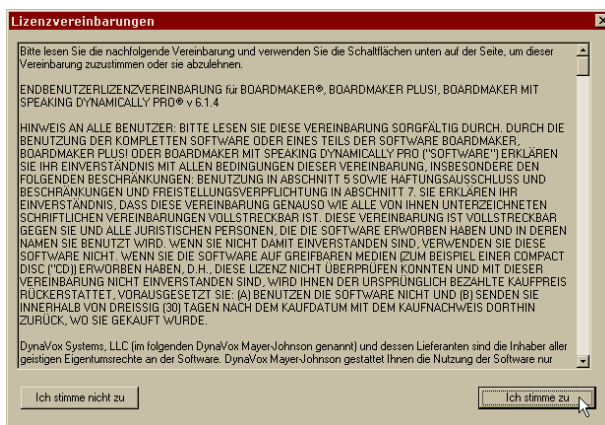


Entnehmen Sie nun die CD **Programm** und setzen Sie die Installation mit der CD **Ergänzungen** fort.

## Installationsanleitung Boardmaker mit SDPro

Die CD **Ergänzungen** wird als nächstes installiert. Von dieser CD werden diverse Ressourcen kopiert: Programmhandbuch (PDF), neueste Programmversionen und Sprachdateien sowie landesspezifische Muster- und Vorlagetafeln.



Legen Sie die CD **Ergänzungen** ins CDROM-Laufwerk. Ist bei Ihrem Rechner die Autostart-Funktion aktiv, wird das Programm "Setup.exe" automatisch aufgerufen; sonst starten Sie es bitte durch einen Doppelklick.

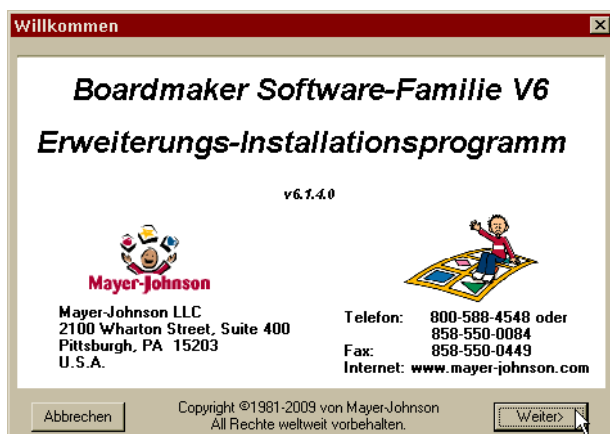

Als erstes werden Software-Version und die Kontaktdaten des Hersteller angezeigt. Klicken Sie bitte auf **Weiter**.



Dieses Fenster informiert sie über den Umfang der nun folgenden Installation. Klicken Sie bitte auf **Weiter**.



Der Fortgang der Installation wird durch einen Fortschrittsbalken angezeigt.


Nach dem alle Inhalte der CD **Ergänzungen** kopiert wurden, wird die Installation der hochwertigen AT&T Stimmen "Reiner" und "Klara" gestartet.

Jede Stimme benötigt über 800 MB Platz auf Ihrer Festplatte. Wenn Sie bereits gute Stimmsynthesizer (sog. SAPI4- oder SAPI5-Stimmen) auf Ihrer Festplatte haben, müssen Sie die mitgelieferten Stimmen nicht installieren, sondern können später SDP so einstellen, dass die bereits vorhandenen Stimmen genutzt werden.


Wenn Sie die Stimmen installieren wollen, folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm:

Wenn Sie auf **Abbrechen** klicken, dann ist - trotz der etwas irreführenden Aussage des folgenden Fensters - die Installation der CD **Ergänzungen** komplett abgeschlossen und Sie können alle SDP-Programmfunktionen nutzen. Haben Sie bereits installierte Stimmsynthesizer (SAPI4, SAPI5) auf Ihrem Rechner, dann können Sie diese auch nutzen.


Wählen Sie die zu installierenden Stimmen und klicken Sie auf **Weiter**.

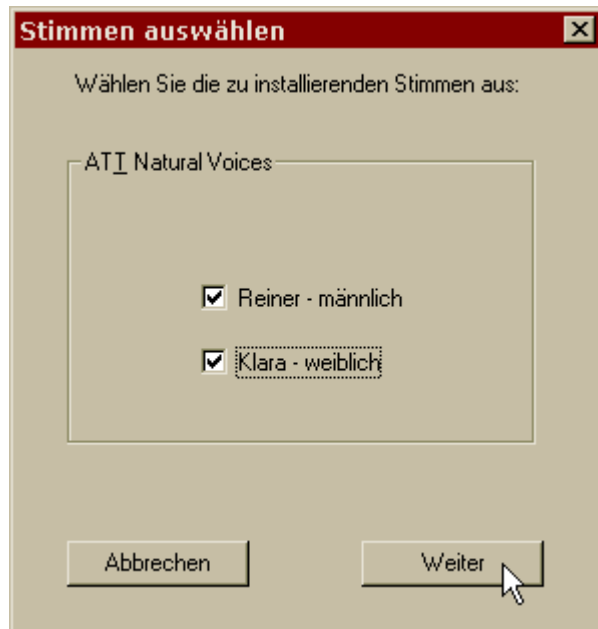

Folgen Sie dem Hinweis und legen Sie die gewünschte CD ins CDROM-Laufwerk ein.

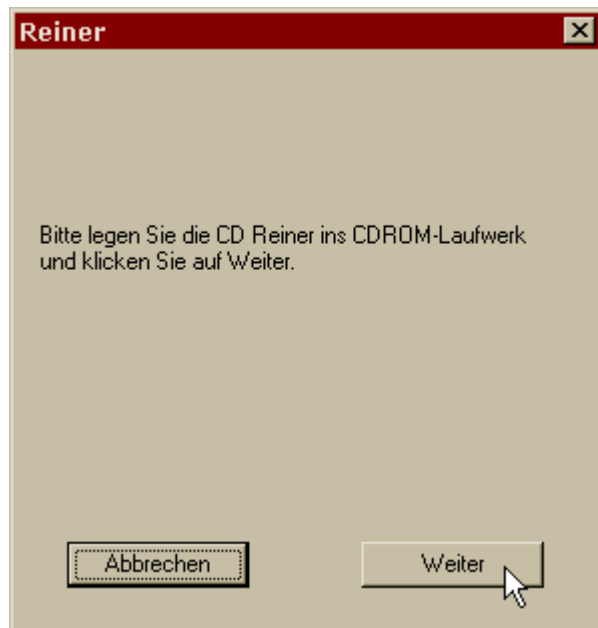


Diese Meldung nehmen Sie bitte wörtlich! Die große Datenmenge, die von der CD auf Ihre Festplatte kopiert werden muss benötigt **wirklich** einige Minuten: Je nach CDROM-Laufwerk müssen Sie mit **3 bis 10 Minuten** rechnen! -- Während des Kopiervorgangs sehen Sie auf dem Bildschirm nur das links abgebildete Fenster; eine Fortschrittsanzeige ist nicht vorgesehen.

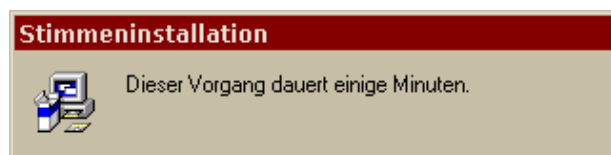



Haben Sie sich für die Installation beider Stimmen entschieden, so folgt nun die Installation der Stimme "Klara". Dieser Vorgang läuft äquivalent zur Installation der Stimme "Reiner" ab.

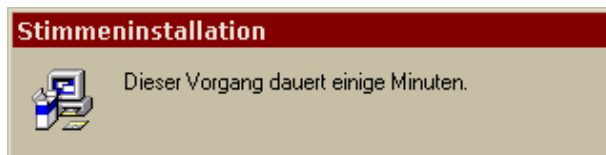

Beachten Sie bitte auch hier, dass die Installation wiederum **3 bis 10 Minuten** dauert!



Mit dieser kurzen Meldung wird das Ende der Installation angezeigt.


Klicken Sie auf **OK**.

Nach der vollständigen Installation können Sie SDP komplett nutzen.


Auf der nächsten Seite sind die verschiedenen Möglichkeiten des Programmaufrufs und die Lage des Speicherorts aufgezeigt.

Sie können SDP wie folgt aufrufen. Bitte beachten Sie dabei, dass die CD Programm im CDROM-Laufwerk eingelegt sein muss.

Zum einen können Sie SDP über die Verknüpfung "Bordmaker with SD Pro" auf Ihrem Desktop starten. Zum anderen wird über die Verknüpfung "Interaktive Mustertafeln V6" die Starttafel des mitgelieferten Tafelsatzes direkt aufgerufen und SDP im Benutzermodus gestartet.

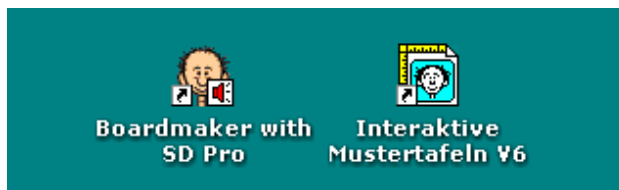

Im Windows-Startmenü finden Sie unter "Programme -> Mayer-Johnson" neben den beiden obigen Verknüpfungen zusätzlich noch die Verknüpfung zur automatischen Update-Funktion (Sie müssen über einen Internetzugang verfügen) und zum umfangreichen deutschen SDP-Handbuch in Form eines PDF-Dokuments. Zum Lesen von PDF-Dokumenten muss auf Ihrem Rechner ein entsprechendes Programm - z.B. der kostenlose Acrobat Reader - installiert sein.

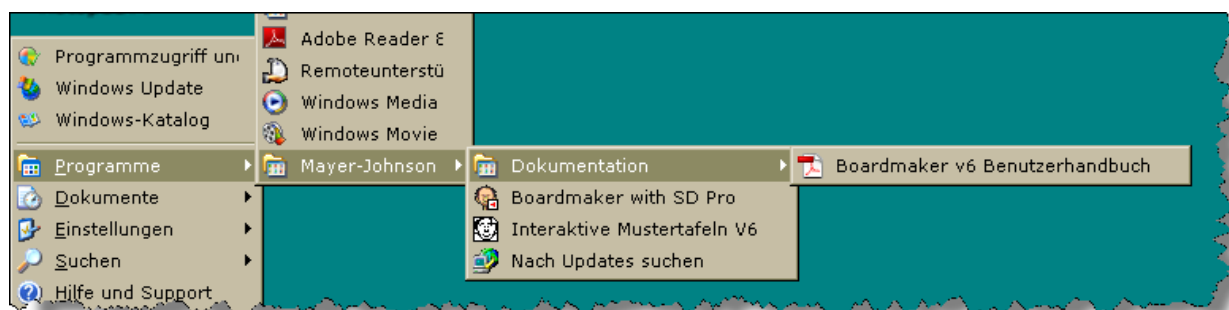

Wenn Sie die Voreinstellung der Pfade während der Installation unverändert übernommen haben, dann wurde SDP wie im Bild gezeigt auf Ihrem Rechner installiert.

(Windows Explorer mit Ansicht = "Details".)

