



DynaVox M³/M³max

Alle Daten sichern



Nichts ist schlimmer als verlorengegangene Arbeit! Alle Seiten, die Sie auf Ihrem DynaVox M³ verwenden, können Sie als eine Datei inkl. Fotos und Aufnahmen speichern. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten regelmäßig zu sichern, um bei einem Datenverlust alle Inhalte schnell wieder herstellen zu können.



Und so geht's:

- Stecken Sie Ihren USB-Stick in den USB-Port Ihres DynaVox-Gerätes
- öffnen Sie auf dem M³ das Menü "Einstellung" (Zahnrad rechts oben)
- wählen Sie "Sicherheit/Upgrade", wählen Sie dann "Sicherheit"
- bestätigen Sie mit "OK"
- Die gesamten Inhalte werden errechnet, dieses kann einige Minuten dauern! Bitte drücken Sie keine Taste, bis die Maske "Auswahl Datei" auf dem Display erscheint.
- markieren Sie nun "alle Laufwerke zeigen", markieren Sie links "UMS Folder"
- **Wichtig:** Geben Sie einen Namen ein. **Tipp:** Fügen Sie dem Namen das aktuelle Datum hinzu, zum Beispiel: m3-tina-15-07-2010.
- Es erscheint der Hinweis: "Datensicherung in Arbeit...". Haben Sie erneut Geduld, die Speicherung Ihrer Inhalte auf den USB-Stick kann bis zu 15 Minuten dauern.
- Es erscheint: "Datensicherung erfolgreich" Drücken Sie "OK".
- Die Sicherung ist erfolgt. **Tipp:** Speichern Sie die Datei zusätzlich auf Ihrem PC, um im Notfall auf eine Kopie Ihrer Daten zurückgreifen zu können.

Im Falle eines Datenverlustes auf dem M³: So Importieren Sie die Sicherungsdatei:

Hinweis: alle Benutzerdaten, die sich auf dem Gerät befinden werden mit denen der Sicherungsdatei überschrieben!

- Stecken Sie den USB-Stick mit Ihrer Sicherungsdatei in den USB-Port Ihres M³
- öffnen Sie auf dem M³ das Menü "Einstellung" (Zahnrad rechts oben)
- wählen Sie "Sicherheit/Upgrade", „Rückspeicherung“, drücken Sie „OK“
- Wählen Sie in der Maske: Auswahl Datei "alle Laufwerke anzeigen"
- Wählen Sie den "UMS Folder", Wählen Sie rechts Ihre Sicherungsdatei (.bck)
- Drücken Sie "OK". Die Wiederherstellung kann einige Minuten dauern
- Nach Abschluss wählen Sie "OK", um das Gerät neu zu starten. Evtl. müssen Sie das Gerät neu kalibrieren, das Gerät startet nach einigen Minuten selbstständig.