



DynaVox M³/M³max

Daten sichern und übertragen


.....

In unserem Newsletter stellen wir regelmäßig fertige Seitensets ("Packages") für das DynaVox M³ zur Verfügung. Hier erfahren Sie wie Sie diese Datenpakete von Ihrem PC auf das M³ übertragen. Der umgekehrte Fall (Package erstellen) ist eine praktische Lösung, wenn Sie selbst ein Paket Ihrer eigenen Seiten erstellen und verschicken möchten, z.B. für unsere Rubrik "Kunden helfen Kunden".



Seitenset auf das M³/M³max übertragen:

- speichern Sie das gewünschte Datenpaket (beispiel.pak) auf Ihrem USB-Stick
- *Hinweis: Sollte es sich um eine ZIP-Datei (beispiel.zip statt beispiel.pak) handeln, müssen Sie diese auf Ihrem Computer zunächst entzippen: Klicken Sie rechts auf die ZIP-Datei, wählen Sie "Alle extrahieren", "weiter", "weiter", "fertig stellen".*
- stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres DynaVox-Gerätes
- öffnen Sie nun auf dem M³ das Menü "Einstellung" (Zahnrad rechts oben)
- wählen Sie "Seitenverzeichnis"
- markieren Sie im linken Fenster den Ordner (z.B. Kind 12), in den Sie das Seitenset einfügen möchten (oder erstellen Sie einen neuen Ordner)
- Drücken Sie "Datentransfer", dann "Import Paket"
- Markieren Sie "alle Laufwerke zeigen", dann im linken Fenster "UMS Folder"
- wählen Sie im rechten Fenster die Datei aus (z.B. xyz.pak), bestätigen Sie mit "OK"
- wenn Sie alle Seiten mit gleichem Namen überschreiben wollen, drücken Sie "OK"
- Das war's: Die Übertragung der Seiten auf Ihr DynaVox M³ ist erfolgt

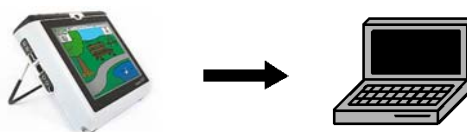

Eigene Seiten speichern und auf den USB-Stick bzw. den PC übertragen:

- stecken Sie Ihren USB-Stick in den USB-Port Ihres DynaVox M³ oder M³max
- öffnen Sie das Menü "Einstellung" über die Setup-Taste (Zahnrad rechts oben)
- wählen Sie "Seitenverzeichnis"
- markieren Sie links den Ordner, der die Seiten enthält, die Sie speichern möchten
- **Hinweis:** Ein Package kann nur von einzelnen Seiten erstellt werden. Mehrere Ordner können nicht gleichzeitig in ein Package zusammengefügt werden und es können keine Seiten aus mehreren Seitenset-Ordern ausgewählt werden!
- Möchten Sie alle Seiten des Ordners speichern, wählen Sie rechts "Alles markieren"
- Drücken Sie "Datentransfer", dann "Paket von Seiten"
- Markieren Sie "alle Laufwerke zeigen", dann im linken Fenster "UMS Folder"
- Wichtig: Geben Sie einen Namen ein (beispiel.pak) bestätigen Sie mit "OK"
- Es erscheint nacheinander: "Berechnung der Paketgröße", "Seiten werden exportiert", "Package von ausgewählten Seiten wird erstellt. Bitte warten."
- Das war's: "Package erfolgreich erstellt." Drücken Sie "OK". Ein Datenpaket Ihrer Seiten mit allen Bildern und Aufnahmen befindet sich nun auf Ihrem USB-Stick.