



## DynaVox M<sup>3</sup>/M<sup>3</sup>max: Seiten mit Kopiervorlage erstellen



Um eine neue Seite im DynaVox M<sup>3</sup>/M<sup>3</sup>max zu erstellen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste Option funktioniert über den Menüpunkt "neue Seite erstellen". Hier können Sie Ihre Seite jedes mal komplett neu definieren.


Um die Seiten in Ihrer Kommunikationshilfe einheitlich zu gestalten, ist die zweite Alternative empfehlenswert: In diesem Fall gestalten Sie zunächst eine Blanko-Kopiervorlage, die Sie zukünftig immer wieder verwenden können. Der Vorteil liegt darin, dass sie stets das gleiche Design hat wie die bereits vorhandenen und Funktionsbuttons wie "schließen" etc. schon enthalten sind.

### Zum Erstellen einer Blanko-Vorlage gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie ins Setup (über das Zahnrad oben rechts), öffnen Sie das Seitenverzeichnis
- Markieren Sie eine geeignete Seite im Seitenverzeichnis
- drücken Sie unten *Bearbeiten*, dann *Kopieren*,
- nun wählen Sie *Bearbeiten – Einfügen*
- die neue Seite wird als „Kopie von...“ angezeigt
- markieren Sie diese Kopie (Hinweis: entfernen Sie vorher das Kreuz beim Original!)
- drücken Sie *Umbenennen*, Vergeben Sie einen Namen, z.B. *Kopiervorlage*
- Öffnen Sie die Kopiervorlage und entfernen Sie alle überflüssigen Buttons, so dass Sie eine Blanko-Vorlage haben

### Zum Erstellen einer neuen Seite mit Kopiervorlage gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie ins Setup (Zahnrad oben rechts), öffnen Sie das *Seitenverzeichnis*
- Markieren Sie Ihre Kopiervorlage mit einem Kreuz  
(Dazu muss links der Ordner mit Ihrem Seitenset markiert sein; rechts finden Sie dann alle dazugehörigen Seiten, u.a. auch Ihre Kopiervorlage)
- Drücken Sie unten *Bearbeiten*, dann *Kopieren*
- Drücken Sie *Bearbeiten – Einfügen*
- Die neue Seite wird nun als „Kopie von...(Kopiervorlage)“ angezeigt
- Markieren Sie mit einem Kreuz Ihre Kopie (Achtung: entfernen Sie vorher das Kreuz beim Original!)
- Drücken Sie *Umbenennen*, geben Sie einen neuen Seitennamen ein und bestätigen mit *OK*.
- Verlassen Sie das Setup-Menü („OK“ - „OK“)

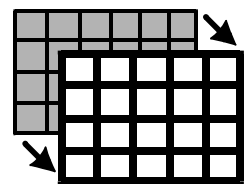

Nun können Sie eine Verknüpfung zu Ihrer neuen Seite erstellen:

- drücken Sie den *Bearbeiten-Button* (Schraubenschlüssel) in der Setup – Leiste
- wählen Sie den Button aus, der die neue Seite öffnen soll
- bei Aktionen wählen Sie aus: *Seite öffnen - Hinzufügen - "Ihre neue Seite" – OK*