


# Neue Benutzer für DynaVox V/Vmax



**Benutzer** bezeichnet das Anwenderprofil, in dem der UK-Nutzer arbeitet, z.B. **Gateway** oder **InterAACT Kind**. Für die Kommunikationsgeräte DynaVox V/Vmax stehen Ihnen ab sofort sechs überarbeitete Benutzer zur Verfügung!

## Was ist neu?


Der Benutzer **"Gateway deutsch"** enthält nun insgesamt vier Seitensets mit automatischer Verbanpassung:

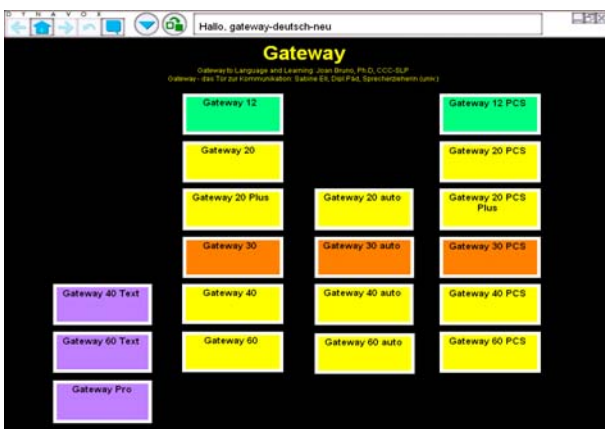

- Gateway 20 auto (neu)
- Gateway 30 auto (neu)
- Gateway 40 auto
- Gateway 60 auto (neu)

Gateway mit automatischer Verbanpassung ermöglicht eine schnelle und grammatikalisch korrekte Kommunikation. Der Nutzer muss die richtige Verbform nicht selbst auswählen. Drückt er oder sie z.B. auf die Ich-Taste passen sich alle Verben automatisch an.

Die fünf **InterAACT-Benutzer** (Erwachsener, Junger Erwachsener, Teenager, Kind, Kleinkind) enthalten viele neue Szenenbilder, die speziell für den deutschen Sprachraum entwickelt wurden. Dazu gehören z.B. eine Baustelle, ein ICE, eine Bäckerei, die deutsche Post und vieles mehr. Die neuen Gateway-Seitensets sind in den InterAACT-Benutzer eingebunden und können ohne Benutzerwechsel geöffnet und verwendet werden.

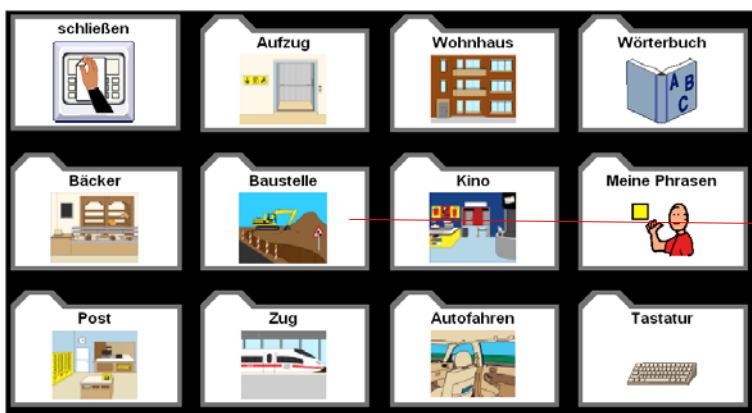

Beispiel: *InterAACT-Popup "draußen", öffnet z.B. Bäckerei, Kino, Post, Zug, "Baustelle" usw.*



## Wo erhalte ich die neuen Benutzer und wie importiere ich Sie auf mein Gerät?

Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, können Sie die Benutzer-Dateien auf der Internetseite der Firma DynaVox herunterladen. Besuchen Sie die Seite: <http://de.dynavoxtech.com/>, registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und laden Sie dann im Bereich *Download* die gewünschte Benutzer-Datei herunter.

Wir helfen gern: Sollten Sie nicht über einen Internet-Anschluss verfügen oder Probleme bzw. Fragen zum Download haben, wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen REHAVISTA-Partner.

**Hinweis:** Um die neuen Benutzer verwenden zu können benötigen Sie die Software Version 1.06! Wie Sie Ihre Software aktualisieren können, erfahren Sie in der Dokumentation *rehavista-v-upgrade-106*.

### Und so geht's:

Um die neuen Benutzer verwenden zu können, müssen Sie die User-Dateien auf Ihr Gerät importieren.

- Speichern Sie die Datei auf Ihrem USB-Stick
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port Ihres DynaVox-Gerätes
- Drücken Sie den *Setup-Pfeil*, wählen Sie dann: *Setup - Setup öffnen*
- Wählen Sie *Benutzerverzeichnis*, dann *Benutzer-Datei importieren*
- Wählen Sie *alle Laufwerke zeigen*
- Wählen Sie im linken Fenster das Symbol, das Ihren USB-Stick repräsentiert (z.B. :d)
- Wählen Sie im rechten Fenster die gewünschte Datei z.B. *Gateway deutsch.User*, bestätigen Sie: *OK*
- Geben Sie einen Namen ein (z.B. gateway-deutsch-neu) und schließen Sie die folgenden Fenster: *OK*

### Die neuen Benutzer:

*Gateway deutsch.User / Erwachsener.User / Junger Erwachsener.User / Teenager. User / Kind.User / Kleinkind.User*

...wurden erfolgreich importiert und stehen zur Verwendung bereit. Führen Sie einen Benutzerwechsel durch, um im neuen Benutzer zu arbeiten:

- Drücken Sie dazu den Setup-Pfeil, wählen Sie dann: *Setup - Setup öffnen, Benutzerwechsel*
- Wählen Sie den gewünschten Benutzer im linken Fenster aus, drücken Sie *Benutzer wechseln*