

Tipp: Bildbearbeitungsprogramm IrfanView


Um eigene Fotos auf Ihr DynaVox MightyMo/MiniMo oder M³/M³max zu importieren, darf die Bildgröße des Fotos eine bestimmte Größe (800x600) nicht überschreiten. Um das Format eines Fotos zu verkleinern, ist das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm IrfanView gut geeignet. Laden Sie das Programm einfach herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer. Wir erklären Ihnen wie es geht:

Bildbearbeitungsprogramm IrfanView installieren

- besuchen Sie die Website www.irfanview.de
- klicken sie rechts oben auf: deutsche version




- scrollen sie auf der Seite ganz nach unten und klicken sie auf: **Download der deutschen Version**
- scrollen sie auch auf der folgenden Seite nach unten und wählen sie
- DOWNLOAD die deutsche Version von IrfanView
- wählen Sie z.B. „als selbst installierendes Programm IrfanView Version ?? (exe)“ (oder .zip)
- *Hinweis: Zur Zeit aktuell ist die Version 4.25 (IrfanView4.25.exe). Je nachdem wann Sie IrfanView herunterladen, steht Ihnen womöglich eine aktualisierte Version zur Verfügung*
- wählen sie das Zielverzeichnis (z.B. Eigene Dateien oder Desktop) und wählen Sie „Datei speichern“
- suchen Sie die gespeicherte exe-Datei am Zielort
- klicken sie doppelt auf das Symbol, welches die exe-Datei symbolisiert
- wählen sie „ausführen“, dann 4 x „weiter“ und dann „fertig stellen“
- Die Installation ist abgeschlossen, Irfan View steht zur Benutzung bereit
- Hinweis: Sie können sehr einfach die Programmsprache von Englisch auf Deutsch umstellen
- öffnen Sie dazu IrfanView, indem Sie doppelt auf das rote „Klecks“-Symbol klicken

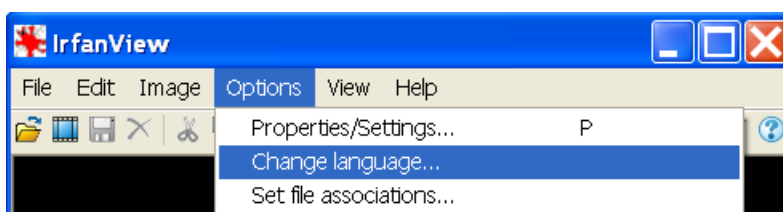

- wählen Sie dann:
- "Options - Change Language – Deutsch")
- bestätigen Sie mit OK

Bildgrößen mit IrfanView verändern

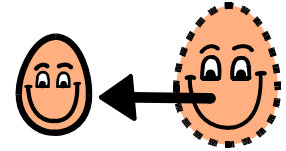

- öffnen Sie IrfanView, indem Sie doppelt auf das rote „Klecks“-Symbol klicken



- wählen Sie „Datei“, „öffnen“, „Suchen in“ (z.B. Eigene Bilder)
- klicken Sie auf das gewünschte Foto und bestätigen Sie mit „öffnen“
- ist das Bild geladen, wählen Sie „Bild“, „Größe ändern...“
- wählen Sie unter „Neue Größe“ 800 x 600 Pixel* oder kleiner, bestätigen Sie mit OK
- (*Je nach Bildformat muss die Größe nicht exakt 800x600 betragen, darf diese jedoch nicht überschreiten)
- wählen Sie Datei, „speichern unter“, nennen Sie das Bild z.B. „jacob-klein“
- wählen Sie als Datei-Typ: JPG und bestätigen Sie mit „speichern“

Das Foto wurde erfolgreich verkleinert und ist nun für den Import auf Ihr Gerät DynaVox MightyMo/MiniMo oder M³/M³max bereit. Wie das funktioniert erfahren Sie in der Beschreibung „Bildimport“.