



Grid 3

Halloween

Gruseln, Spaß haben und sich verkleiden, ist am 31. Oktober zu Halloween wieder angesagt. Mit den Kommunikationstafeln können auch unterstützte kommunizierende Menschen sich rund ums Thema Halloween austauschen.



Wir stellen Ihnen dafür ein symbolbasiertes Seitenset mit den passenden Wörtern zur Verfügung.

Import der Datei mit Grid 3

Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:

- Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick, verbinden ihn mit dem Gerät, auf dem das Seitenset genutzt werden soll und wählen in der automatischen Wiedergabe „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“.
- Alternativ können Sie auch auf dem Gerät selbst die Dateien downloaden und entpacken.
- Öffnen Sie das Programm Grid 3 und den Benutzer, mit dem Sie das Seitenset nutzen möchten.
- Klicken Sie nun in dem Ordner, in dem Sie das Seitenset gespeichert haben (USB-Stick), mit einem Doppelklick auf das Seitenset.
- Es öffnet sich das gewünschte Seitenset automatisch in Grid 3 mit dem Hinweis, dass Seitenset „XYZ“ hinzugefügt wurde. Zudem wurde das Seitenset auf der Startseite hinterlegt.

Im Anschluss öffnet sich automatisch das neue Seitenset.