




Juni-Idee


Haben Sie ein Pokerface?



Selbstständige Beschäftigung und Partizipation sind für jeden Menschen wichtige Bestandteile eines ausgefüllten Lebens. Schon einfache Hilfsmittel können darin unterstützen, beliebte Aktivitäten eigenständig zu initiieren und durchzuführen. Spielen ist gesellig und macht Laune.

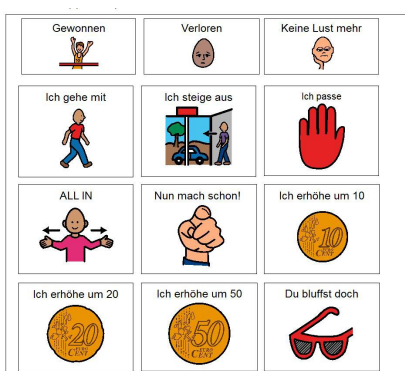

Setzen Sie ein einfaches Sprachausgabegerät, z.B. einen GoTalk 9+, dauerhaft als Spieltalker ein, z.B. im Aufenthaltsraum einer Wohneinrichtung für Erwachsene. Die Kerntasten bleiben stets gleich, die neun Felder variieren je nach Spiel.

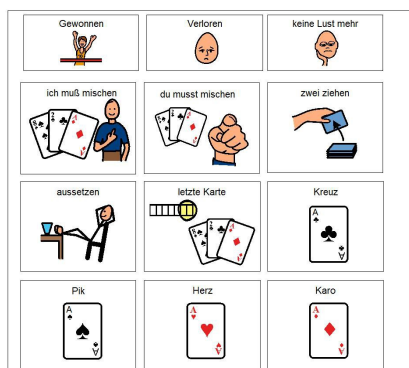

Stellen Sie den Bewohnern fünf Folien, z.B. in einer Mappe, zur Verfügung, so dass diese selbst über ihr Spiel entscheiden können. Beim Einschieben der Vorlage und Einstellen der Ebene ist Unterstützung natürlich willkommen.

So geht's:

Wir stellen Ihnen Oberflächen für „Mensch Ärgere Dich Nicht“, „Mau Mau“, „Poker“ sowie eine Leervorlage für das eigene Lieblingsspiel zur Verfügung. Schneiden Sie die Vorlage aus und laminieren Sie diese. Dann die Oberfläche in den GoTalk9+ einlegen, die Felder besprechen und schon kann es losgehen. Verwenden Sie alle fünf Vorlagen, müssen Sie die Kerntasten der weiteren Ebenen nicht beachten.

Viel Spaß und ein gutes Blatt!