




Communicator 6

Anlauthaus – Literacy-Erfahrungen

Literacy-Erfahrungen sind gerade für nichtsprechende Menschen wichtig. Der Zugang zur Schriftsprache ist der Zugang zu unserer schriftsprachbasierten Welt. Spielerisch aktiv mit Buchstaben und Lauten zu Arbeiten ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Mit dem Anlauthaus, können auch Nutzer von Geräten mit Augensteuerungen gemeinsame Literacy-Erfahrungen sammeln.

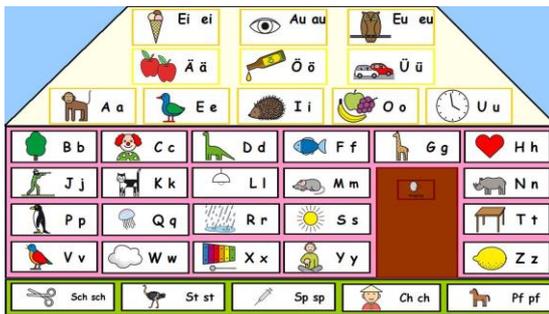

Wir stellen Ihnen ein Anlauthaus mit METACOM-Symbolen zur Verfügung. Im Dach findet der Nutzer alle Vokale, Umlaute und Diphthonge. Im Haus finden sich alle Konsonanten und im Keller wohnen die Digraphen bzw. der Trigraph „Sch“. Die Felder sprechen lautrein die entsprechenden Phoneme. Mit dem Ausgang in der Tür, können Sie oder der Nutzer das Seitenset verlassen. Falls dies

nicht gewünscht ist, blenden Sie dieses Feld aus.

Nach dem Import des Seitensets können vielfältige Literacy-Erfahrungen gemacht werden:

- Kritzeln und Schreiben: Notieren Sie die ersten Schreibversuche des Nutzers. Der Nutzer wählt aus und Sie notieren. Schauen Sie anschließend gemeinsam, ob erste Wörter in dem Geschriebenen gefunden werden können und markieren Sie diese. Oder finden Sie besonders schöne Quatschwörter? Überlegen Sie gemeinsam, wofür diese stehen können.
- Anlauratespiele: Geben Sie ein Wort und/oder Symbol vor und der Nutzer muss den entsprechenden Anlaut im Haus finden
- Anlautbingo: verteilen Sie Spielkarten mit den Anlauten. Der Nutzer ist der Spielleiter und nennt nacheinander die Anlaute, bis ein Spielteilnehmer ein Bingo hat.
- Welcher Buchstabe fehlt hier: Bereiten Sie Wort-Bildkarten vor, bei denen ein Buchstabe des Wortes fehlt. Überlegen Sie gemeinsam mit dem Nutzer, welcher Laut fehlt. Zu Beginn kann auch der Laut zunächst nur benannt werden: dann wird zusätzlich eine Wortkarte mit dem gesamten Wort zum Vergleich benötigt.

Import der Datei mit Communicator 5 – so geht's:

Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:

Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.

- Speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick, verbinden ihn mit dem Gerät, auf dem das Seitenset genutzt werden soll und wählen in der automatischen Wiedergabe „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“.
- Klicken Sie hier auf das Seitenset, die Seite öffnet sich dann automatisch.



- Wechseln Sie in das Assistenzmenü des Communicator 5, und von dort in den Bearbeitungsmodus (Rechtsklick, „Seitenset bearbeiten“) und wählen Sie den Dateipfad: Datei ->Speichern unter ...
- Wählen Sie als Speicherort Dokumente -> Communicator 5 -> Ihren Nutzernamen → Meine Seitensets

Verknüpfen Sie die Oberflächen mit Ihrer Startseite

Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus (drücken Sie das blaue Dreieck oder F5).

- Sobald die Benutzeroberfläche erscheint, wechseln Sie ins Assistenzmenü (Rechtsklick) und wählen "Startseite bearbeiten", "Seitensets hinzufügen", "Meine Seitensets".
 - Markieren Sie das importierte Seitenset und wählen „Zur Startseite hinzufügen“.
- Schließen Sie das Assistenzmenü mit „X“. Das war's!