




# GoTalk NOW Sommerferien 2021

Die Urlaubs- und Feriensaison geht zu Ende. Genau der richtige Zeitpunkt über die Erlebnisse der letzten Wochen zu berichten. Mit unserer Spielidee können NutzerInnen von Unterstützter Kommunikation im jeweiligen Lebenskontext (Kindergarten/Schule/Wohnheim usw.) anschaulich erzählen.

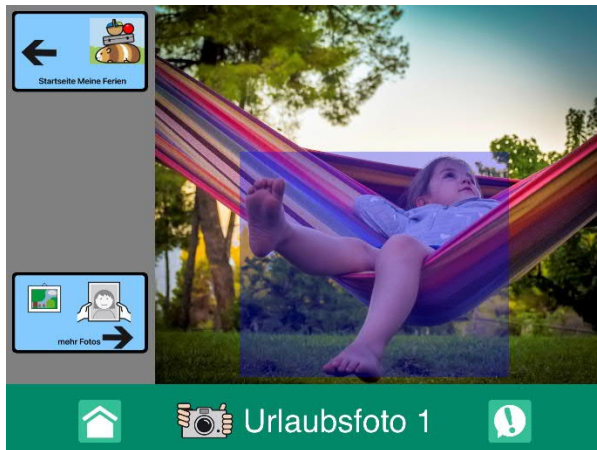

Wir bieten Ihnen ein Seitenset für GoTalk NOW mit einer Kombination aus einer 9-Felder-Gesprächsseite und vorbereiteten Seiten zum Ablegen von Fotos und Videos.

Zum Ablauf: Einfach die Szenenseiten mit Urlaubsfotos befüllen oder Videos einbinden - schon kann umfassend erzählt werden.

Tipp: Wir haben in den Kernwörtern gesprächssteuernde Wörter und Phrasen vorbereitet, so dass alle Bilder

und Videos auch kommentiert werden können. Dadurch kann ein gemeinsamer Dialog entstehen.

Hinweis: Die Fotoseiten sind als Szenenseiten in GoTalk NOW angelegt. Beim Programmieren von Szenenseiten hilft Ihnen unser Spickzettel: „Rehataalkpad/Logopad: Szenenbilder erstellen“ (<https://www.rehavista.de/download/uebersicht/5wV3evOgdD>). Hilfe beim Einbinden von Videos finden Sie im Handbuch „GoTalk NOW“ Ihres RV-Pads.

So geht's:

Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei auf einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem auch „iTunes“ installiert ist.

- Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese nun entpacken: Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie alle Dateien aus dem Ordner.
- Nun verbinden Sie Ihr Rehataalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
- Anschließend öffnen Sie „iTunes“ und dort „Rehataalkpad“, dann gehen Sie auf „Datenfreigabe“ und anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“.
- Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei mit der linken Maustaste anklicken und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus verschieben.
- Nun ist das Buch in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden.



Hinweis: Autonomes Navigieren zwischen Büchern: Verknüpfen Sie auf der Startseite das Ferienkommunikationsbuch mit dem aktuell verwendeten Kommunikationsbuch. So können AnwenderInnen autonom vor und zurück wechseln. Hierzu gehen Sie auf dem vorbereiteten Feld auf: „nach Aktion gehe zu“ -> „eine bestimmte Seite“ -> „andere Bücher“, anschließend das gewünschte Kommunikationsbuch mit seiner Startseite auswählen. Vergessen Sie nicht, in diesem Buch auch das neue Ferienbuch auf die gleiche Weise zu verknüpfen.