

Grid

Tannenbaum schmücken

Was wäre Weihnachten ohne einen hübsch dekorierten Weihnachtsbaum? Gemeinsam macht das Schmücken gleich noch mehr Spaß. Mit unserer weihnachtlichen Spielidee für Grid 3 und Grid for iPad lässt sich der Weihnachtsbaum immer wieder aufs Neue kreativ mit verschiedenen Gegenständen verschönern. Ebenfalls haben wir ein Seitenset mit Aussagen zum Thema vorbereitet, schließlich darf nach dem Schmücken das Gespräch über das Resultat nicht fehlen.



Zur Auswahl stehen verschiedene Gegenstände, mit denen der Baum hübsch dekoriert werden kann. Wählen Sie zunächst einen Gegenstand aus und suchen Sie anschließend die gewünschte Stelle auf dem Weihnachtsbaum aus. Über die „nochmal“-Schaltfläche kann der Baum immer wieder kreativ verziert werden. Über die Schaltfläche „Gespräch“ gelangen Sie zum vorgefertigten Seitenset mit vielen Aussagen zum Thema. Hier können ebenfalls Kommentare abgegeben werden, z.B. ob der Weihnachtsbaum besonders gut gefällt oder zu kitschig geraten ist.

Sie finden unser Seitenset in den Online Grids.

Was sind Online Grids?

[Online Grids](#) sind der Ort, an dem Sie neue Inhalte für Grid 3 und Grid for iPad entdecken und herunterladen können. Jeden Tag werden neue Grid-Sets von Expert:innen für Unterstützte Kommunikation und der Gemeinschaft von Grid-Nutzer:innen aus der ganzen Welt hinzugefügt. Unser Seitenset finden Sie dort ebenfalls, wenn Sie in die Suche „Tannenbaum schmücken“ eingeben.

Wichtig zu wissen: Um die Online Grids zu nutzen, müssen Sie sich dort vorher [registrieren](#).

Hinweis:


Mit Ihrem Smartbox-Konto können Sie über die Online Grids Ihre mit Grid erstellten Seitensets mit der Smartbox-Community teilen. Die Seitensets sind öffentlich zugänglich, sobald sie über die Online Grids geteilt werden.



Anleitungen um das Seitenset in Grid 3 bzw. Grid for iPad einzufügen:

Anleitung für Nutzer:innen von Grid 3:


Um zu dem Seitenset zu gelangen, müssen Sie Ihr Gerät zunächst mit dem Internet verbinden.

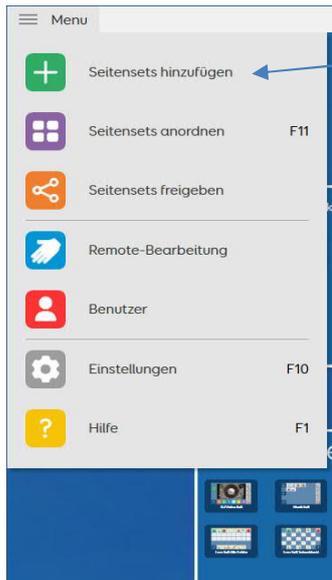

Klicken Sie oben links auf „Menü“ und dann „Seitensets hinzufügen“.



Wählen Sie unten rechts „Online Grids“ aus.

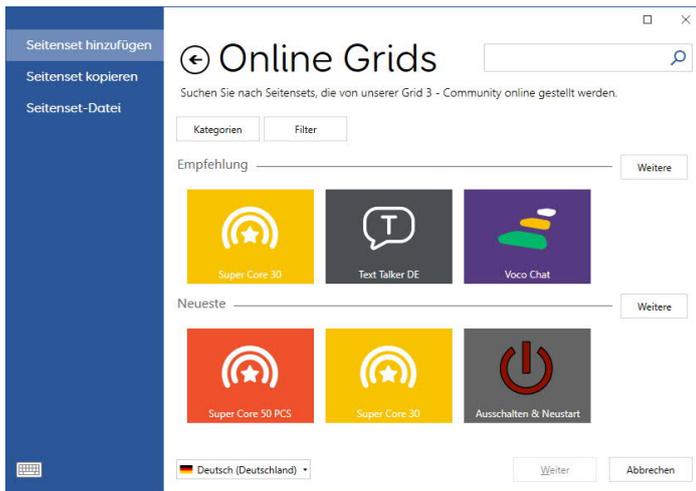


Das Seitenset finden Sie in den Bereichen „Empfehlung“ oder „Neueste“, bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.


Alternativ geben Sie Schlagwörter in die Suchfunktion ein.




Anleitung für Nutzer:innen von Grid for iPad

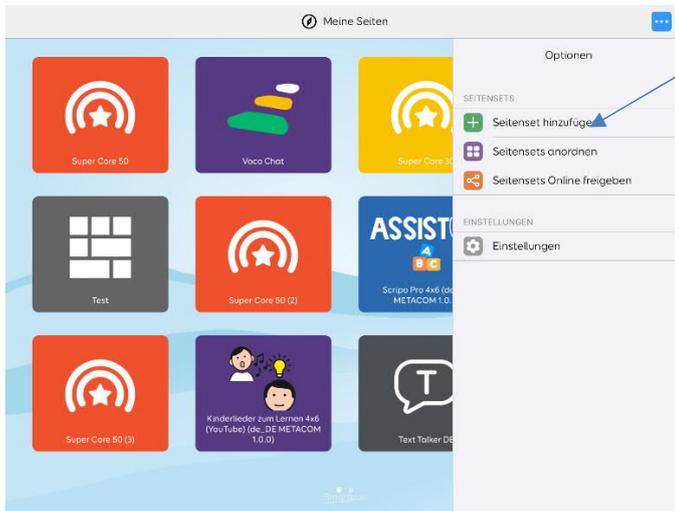

Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen dann „Seitensets hinzufügen“.

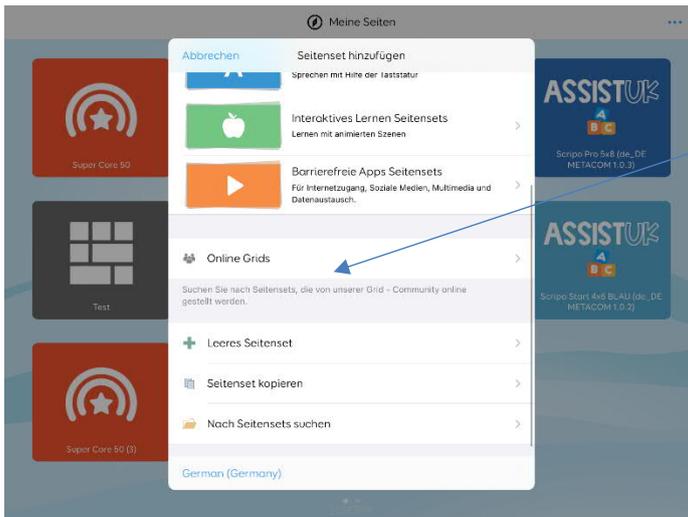

Scrollen Sie herunter und wählen Sie „Online Grids“ aus.

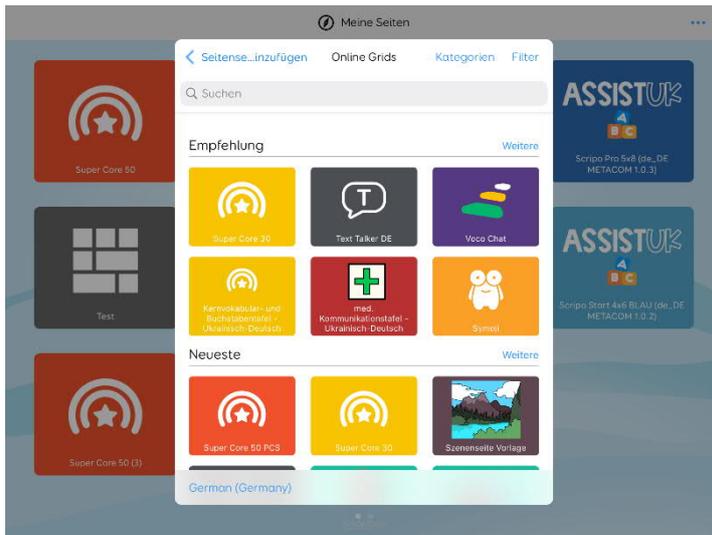

Das Seitenset finden Sie in den Bereichen „*Empfehlung*“ oder „*Neueste*“, bestätigen Sie anschließend mit „*Weiter*“.

Hinweis: Sie können alternativ auch über die Lupe mit Schlagwörtern nach dem Seitenset suchen.