



Rehataalkpad


Leitende Bedürfnisse

Neben unseren Grundbedürfnissen (essen, schlafen etc.) nennt z.B. Tony Robbins (<https://www.tonyrobbins.com/>) sechs weitere relevante menschliche Bedürfnisse. Diese zu kennen und zu verstehen, kann helfen, wichtige Erkenntnisse über die Motivation, psychologischen Tendenzen und die Werte des Gegenübers zu erkennen. Zudem ist die Erfüllung dieser individuell verschieden bedeutsamen Bedürfnisse relevant für das Wohlbefinden des Einzelnen.



Wir stellen Ihnen ein Seitenset für Erwachsene zur Verfügung, das die sechs Bedürfnisse benennt und auf der Unterseite eine Einschätzung hierzu zulässt. Damit bietet das Seitenset mit je 9 Feldern eine Grundlage für bedürfnisorientierte Gespräche, die z. B. in Wohneinrichtungen oder Werkstätten für erwachsene Menschen stattfinden. Das Seitenset verwendet weitestgehend die METACOM Symbole in schwarz-weiß.

Dazu stellen wir Ihnen eine BM-Tafel zur Verfügung, die Ihnen unabhängig vom Seitenset eine Priorisierung der 6 Bedürfnisse ermöglicht: Einfach das Bedürfnis an die entsprechende Stelle einordnen und mit Klett fixieren.

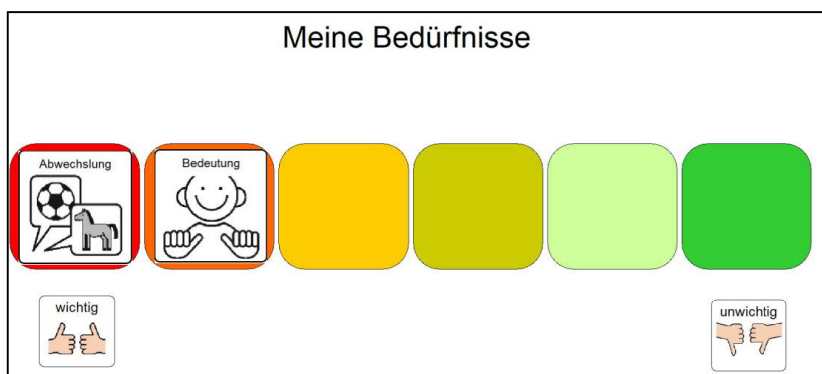



So geht's:

Import der Dateien „rehavista-gefühlswelten.gotalk-book.zip“ auf Ihr Rehatalkpad:

- Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei „rehavista-gefühlswelten.gotalk-book“ auf einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem auch „iTunes“ installiert ist.
- Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese nun entpacken: Doppelklick, dann: „*Alle Dateien extrahieren*“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie die alle Dateien aus dem Ordner „rehavista-gefühlswelten.gotalk-book“.
- Nun verbinden Sie Ihr Rehatalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
- Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei anklicken mit der linken Maustaste und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus verschieben.

Nun ist das Seitenset in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden

So geht's:

Anleitung Boardmaker Datei

- PDF-Version ausdrucken. Oberen Teil abschneiden bzw. die Grundbedürfnisse ausschneiden und laminieren. Rückseiten sowie die Skala mit Klett versehen. oder
- BM-Datei auf dem PC mit installiertem Boardmaker entzippen. Mittels Doppelklick die Datei öffnen. Passen Sie die Datei ggf. für Ihre Bedürfnisse an. Dann Datei ausdrucken. Oberen Teil abschneiden bzw. die Grundbedürfnisse ausschneiden und laminieren. Die Rückseiten sowie die Skala mit Klett versehen