



Snap + CF

Materialkiste: 12 Kernwörter



Die Bedeutung von Kernwörtern ist seit langem in der UK-Welt bekannt. Diese Wörter helfen kontextunabhängig in der Kommunikation - große Effektivität mit kleinen Wörtern. Es gibt einige Ansätze, die sich mit dem Erarbeiten des sogenannten Kernwortschatzes auseinandersetzen, z.B. die Fokuswörter (vgl. Sachse/Wilke2011). Damit soll der Einstieg in das Thema erleichtert und in kleinen Einheiten greifbar werden. Tobii Dynavox bietet nun eine didaktische Hilfe zur Erarbeitung der ersten 12 Kernwörter für Snap und Core First Nutzer.

Tipp: Das Material eignet sich auch für Nutzer anderer Vokabularoberflächen.

1. Kernwort: noch mal	2. Kernwort: nicht
Übungsplan	Übungsplan
Elternbrief	Elternbrief
Bücher	Bücher
<ul style="list-style-type: none">• Noch mal• Ein Hundetag• Kannst du es noch mal sagen?	<ul style="list-style-type: none">• Ein Tier zum Spielen• Fürchterlich• Nicht von hier

In der Materialkiste auf tobiidynavox.de finden Sie Ideen zur Einführung der 12 Kernwörter: nochmal, nicht, wollen, fertig, gucken, ich, auch, mehr, haben, du, machen und was.

Basis der Übungen sind Bilderbücher in denen das Kernwort hochfrequent angeboten wird. Neben den fertigen Bilderbüchern zum Ausdrucken oder Lesen am PC finden Sie einen Übungsplan für mehrere Tage mit didaktischen Hinweisen zur Nutzung. Außerdem enthalten ist ein Elternbrief. Dieser informiert Eltern oder andere Angehörige über das Kernwort, welches gerade im Fokus steht. Es gibt auch Tipps für das private Umfeld zur Erarbeitung.



Hausaufgaben sind fertig.

3

Einfach das entsprechende Material ausdrucken - und „fertig“. Schon kann es losgehen.

- weiter auf Seite 2 -



Anleitung: So geht's

- Rufen Sie im Browser die Seite www.tobiidynavox.de auf.
- Wählen Sie die „Materialkiste“.
- Scrollen Sie etwas herunter und wählen Sie am rechten Bildrand: „Core First Learning“ – „zu den Inhalten“.
- Wählen Sie das entsprechende Übungswort.
- Lesen Sie sich den Übungsplan durch und drucken Sie die entsprechenden Bücher aus.

CORE FIRST LEARNING

Core First Learning ist eine Methode, die Lernenden hilft, Kernwörter zu finden, zu lesen und zu verwenden. Indem wir diese Wörter systematisch einführen, geben wir Lernenden ständig wachsende Kommunikationsmöglichkeiten und zugleich eine Möglichkeit zur Entwicklung ihrer Lese- und Schreibfähigkeiten an die Hand.

[Zu den Inhalten](#)

Tipp: Testen Sie einmal, ob Sie das Übungswort auf der Oberfläche finden, nur dann können Sie gut modellieren

Hinweis: Falls Sie das Wort nicht finden, nutzen Sie die integrierte Suche in Snap!

Literaturhinweis:

Sachse, S.K./Willke, M. (2011): Fokuswörter in der Unterstützten Kommunikation. Ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau. In: Bollmeyer, H./Engel, K./Hallbauer, A./Hüning-Meier, M. (Hrsg.): UK inklusive – Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation. Karlsruhe: von Loeper, S. 375-394.