


# GEBRAUCHSANLEITUNG

## OPTIMA Trackball

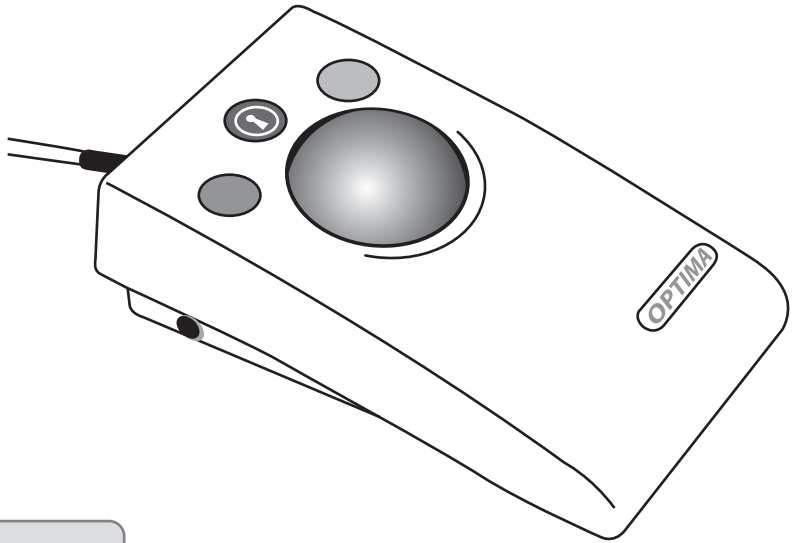

### Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den  
Lieferumfang:

**OPTIMA Trackball**  
Gebrauchsanleitung

### Produktbeschreibung

Der **OPTIMA** ist ein Trackball, der die langlebige optische Technologie zur präzisen Cursorkontrolle nutzt.

Die leichtgängige Ballbewegung, der sichere Stand und die geringe Höhe, ermöglichen eine Bedienung auch bei geringer Feinmotorik und somit für eine große Zahl von Nutzern.

Durch seine robuste Ausführung ohne Verschleißteile ist der **OPTIMA Trackball** wartungsfrei und bietet so eine langjährige unkomplizierte Nutzung.

## Produktmerkmale

---

- Plug und Play USB und PS/2 Funktion benötigen keine Treiber.
- Mit PC, Mac und Chromebook kompatibel.
- Einstellbare Cursorgeschwindigkeit.
- Drag lock und Doppelklick wählbar.
- Buchsen für externe Schalter zum Rechts- und Linksklick.
- Robuste Konstruktion und ergonomisches Design.
- Standardisierte Befestigungsmöglichkeit.
- Langlebige optische Technologie- ohne Verschleißteile.
- Großer leichtgängiger Ball, der nur geringer Berührung bedarf.

## Kompatibilität

---

**OPTIMA Trackball** funktioniert mit USB und PS/2 kompatiblen Computer, einschließlich PCs, Macs und Chromebooks.

## Installation

---

Schalten Sie Ihren Computer vollständig aus. Wählen Sie einen freien USB- oder PS/2-Anschluss. Schließen Sie ihren **OPTIMA Trackball** an. Um eine PS/2-Buchse nutzen zu können, verwenden Sie bitte einen PS/2-Adapter. Dieser ist nicht mehr im Lieferumfang enthalten, da sich USB als dauerhaftes Verbindungsformat durchgesetzt hat. Bei Bedarf wird Ihnen der PS/2 Adapter kostenlos zur Verfügung gestellt, wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Fachhändler.

Nun können Sie Ihren Computer wieder einschalten. Ihr **OPTIMA Trackball** ist nach dem Neustart betriebsbereit. Es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt.


## Lernmodus

---

Eine Reihe von Einstellungen erlauben Ihnen, Ihren **OPTIMA Trackball** an genau Ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese werden alle im Lernmodus eingestellt und im Gerät gespeichert, auch wenn dieses abgeschaltet wird oder sogar den Computer wechseln.

Um diese Einstellungen zu ändern, stellen Sie den Lernmodus wie folgt ein: Halten Sie den mittleren Knopf gedrückt, bis Sie einen Kontrollton hören. Jetzt befindet sich das Gerät im Lernmodus und akzeptiert folgende Änderungen:



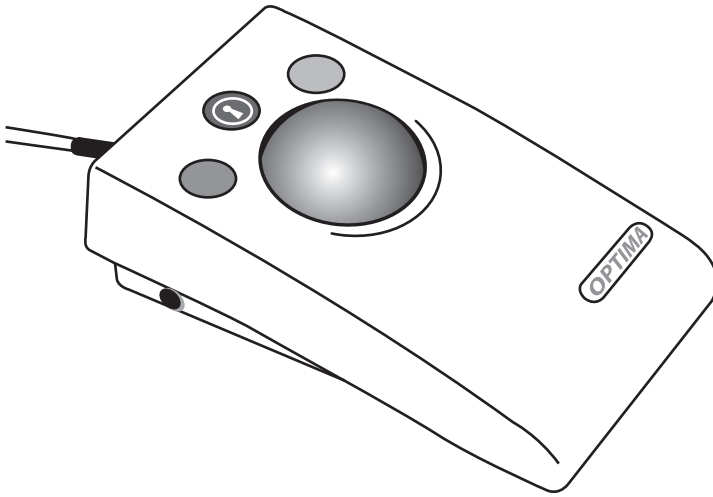

---

## **Wartung**

Ihr **OPTIMA Trackball** ist wartungsfrei. Sollten trotzdem Störungen eintreten, wenden Sie sich bitte an Pretorian Technologies Ltd oder Ihren Fachhändler.

---

## **Warranty**

Die Gewährleistung Ihres **OPTIMA Trackball** erstreckt sich über 24 Monate auf Fehler bei der Fertigung oder auf defekte Komponenten. Das Gerät wurde für den häuslichen, schulischen und gewerblichen Einsatz entwickelt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie.

---

**Pretorian**  
TECHNOLOGIES LTD.

Unit 37 Corringham Road Industrial Estate  
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB United Kingdom

**Tel** +44 (0) 1427 678990 **Fax** +44 (0) 1427 678992

S040169

Use with firmware versions 74 onwards.

**[www.pretorianuk.com](http://www.pretorianuk.com)**