

Kurzanleitung: Montage der I-13/I-16 Powerbank mit der Powerbank Halterung

Die Powerbank Halterung sollte auf 22,25 mm (7/8") Montagerohren befestigt werden. Es wurde speziell für die Kompatibilität mit Rehadapt Montagelösungen entwickelt.

<p>1</p>	<p>Bei der Montage der Powerbank-Halterung stellen Sie sicher, dass Sie einfachen Zugang zur Seite haben, wo die Halterung zwei Löcher hat. Hier werden Sie das Netzkabel und den Stecker anschließen.</p>	
<p>2</p>	<p>Befestigen Sie das Montagerohr in der entsprechenden Bohrung der Halterungsaufnahme.</p>	
<p>3</p>	<p>Stellen Sie den Winkel der Halterung auf die gewünschte Position ein.</p>	
<p>4</p>	<p>Ziehen Sie beide Schrauben fest, um die Halterung zu sichern.</p>	

<p>5</p>	<p>Setzen Sie die Powerbank so in die Halterung ein, um sicherzustellen, dass die beiden Löcher über dem Netzteilanschluss und dem In-Out-Anschluss ausgerichtet sind.</p>	
<p>6</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Powerbank richtig fest sitzt und dass die Halterungsumrandungen sicher um die Powerbank herum sind.</p>	