

EXAM 2

Quick Start Guide



Ellis helped his mother clear
away. The family had moved
into this four bedroom house.

C-PEN™

MENU

C-PEN™
www.cpen.com

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer fortgeschrittenen C-Pen Exam 2.

Der C-PEN Exam 2 wurde als Lesehilfe entwickelt. Da es sich um ein geschlossenes Gerät handelt, auf dem keine Daten gespeichert werden können, eignet es sich besonders gut für den Einsatz in Prüfungen, bei denen es, ähnlich wie ein menschlicher Leser, einfach die Fragen vorliest.

Ganz gleich, ob Sie Fragen in einer Prüfung lesen müssen, Ihre Hausaufgaben machen oder einfach nur Ihren Lieblingsroman lesen wollen, wir hoffen, dass das Lesen weniger anstrengend wird und mehr Spaß macht.

Dieser Leitfaden soll Ihnen den Einstieg erleichtern. Sie bietet keine vollständige Beschreibung aller Funktionen und Einstellungen, da sich diese mit jedem Firmware-Upgrade, das wir anbieten, ändern. Aktuelle und vollständige Informationen finden Sie daher auf unserer Website

www.cpen.com/products/exam2

und unseren Youtube-Kanal

cpen.com/youtube

1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Wenn das Display nicht aufleuchtet, laden Sie den Akku etwa 30 Minuten lang auf und versuchen Sie es dann ein zweites Mal.
2. Bei der ersten Verwendung hilft Ihnen eine Anleitung bei der Einrichtung Ihres C-Pen Exam 2. Dazu gehören die Einstellungen für
 - Sprechendes Menü (liest das Menü laut vor)
 - Menüsprache (Sprache der Benutzeroberfläche)
 - Scan-Sprache (Sprache des zu scannenden Textes)
 - Stimme (da einige Sprachen mehr als einen Akzent unterstützen)
 - Links/Rechtshänder (Hand, die den Stift hält)


Wenn Sie das Menü erreicht haben, ist die Lesefunktion die einzige verfügbare Funktion. Verwenden Sie diese Funktion, um zu scannen und sich den Text vorlesen zu lassen. Drücken Sie die OK-Taste, um sich den Text so oft wie gewünscht anzuhören. Oder drücken Sie die MENU-Taste, um Optionen wie Lesegeschwindigkeit, Lautstärke, Lesepausen, Lesesprache und Wörterbücher aufzurufen. Wenn Sie möchten, können Sie ein Paar Kopfhörer anschließen, damit nur Sie den C-Pen Exam 2 hören können.

So scannen Sie

Halten Sie den C-Pen Exam 2 fast gerade nach oben. Achten Sie darauf, dass Sie während des Scanvorgangs keine Tasten drücken. Der Stift scannt jeweils eine (1) Textzeile, die sich in der Mitte zwischen den beiden weißen

Federn an der Vorderseite des Stifts befinden muss. Die Start- und Endpunkte des Scanvorgangs sind auf den Rand des transparenten Fensters ausgerichtet. Wenn der Scan-Auslöser das Papier berührt, leuchtet die Scan-Leuchte auf. Bewegen Sie den Stift in gleichmäßigem Tempo gerade entlang der Textzeile.

Tasten und Anschlüsse

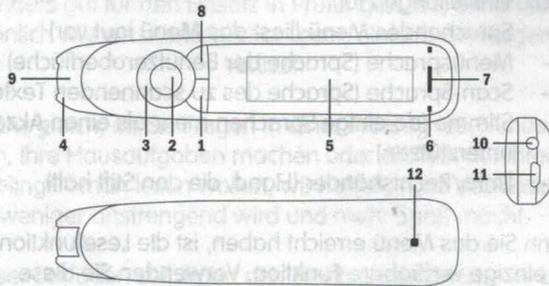

1. Ein-/Ausschalttaste und Zurück-Taste: Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Kurz drücken, um Vorgänge auf der Benutzeroberfläche abzubrechen.
2. OK-Taste: Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu bestätigen oder um im Textlesemodus das Vorlesen von Text auszulösen.
3. 4-Wege-Nav-Taste: Bewegen Sie den Fokus nach oben, unten, links und rechts.
4. Scan-Auslöser: wird automatisch aktiviert, wenn der Stift das Papier berührt. Er schaltet auch das Scan-Licht ein.

5. Bildschirm
6. N/A
7. Lautsprecher: Wird verwendet, wenn Text laut vorgelesen wird. Stumm, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.
8. Menü-Taste
9. Scanfenster: umrahmt den zu scannenden Text.
10. Kopfhörerbuchse
11. Micro-USB-Anschluss: Dient zum Aufladen oder zum Anschluss an einen Computer bei der Aktualisierung der Firmware.
12. Reset-Taste: Setzt das Gerät zurück. Es wird empfohlen, diese Taste nur zu verwenden, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet werden kann.

Funktionen des C-Pen Exam 2

Sprechendes Menü

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden alle Menüpunkte laut vorgelesen, um z. B. sehbehinderte Benutzer zu unterstützen. Schalten Sie die Funktion unter Einstellungen im Hauptmenü ein oder aus.

Leser

Scannen Sie ein Wort, eine Textzeile oder einen Absatz und lassen Sie sich den Text vorlesen. C-Pen Exam 2 kann so eingestellt werden, dass der Text beim Scannen automatisch vorgelesen wird oder dass der Text nur auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie die OK-Taste drücken. Wenn Sie den Text hören, können Sie ihn durch Drücken der OK-Taste anhalten, und der gescannte Text kann so oft wie gewünscht vorgelesen werden. Wählen

DE Sie mit den Navigationstasten den Startpunkt aus, drücken Sie dann die OK-Taste und hören Sie zu. Wenn Sie ein bestimmtes Wort ausgewählt haben, halten Sie die OK-Taste gedrückt, um es zu vergrößern und vorlesen zu lassen.

USB-Konnektivität

Der USB-Anschluss dient zum Aufladen des integrierten Akkus und zum Aktualisieren der Firmware des C-Pen Exam 2. Einzelheiten zur Aktualisierung finden Sie unter support.cpen.com.

Tillykke med din avancerede C-Pen Exam 2.

C-PEN eksamen 2 er designet med det formål at være en læseassistent. Da det er en lukket enhed uden mulighed for at lagre data på den, er den særlig velegnet til brug ved eksamener, hvor den i lighed med en menneskelig læser blot læser spørgsmålene op.

Uanset om du skal læse spørgsmål i en eksamen, lave dine lektier eller blot vil læse din yndlingsroman, håber vi, at læsning bliver mindre udfordrende og mere behagelig.

Formålet med denne vejledning er at rå dig i gang. Den indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af alle funktioner og indstillinger, da de ændres ved hver firmwareopgradering, vi leverer. For at få de nyeste og mere fuldstændige oplysninger skal du derfor tjekke vores websted

www.cpen.com/products/exam2

og vores Youtube-kanal

cpen.com/youtube

Sie mit den Navigationstasten den Startpunkt aus, drücken Sie dann die OK-Taste und hören Sie zu. Wenn Sie ein bestimmtes Wort ausgewählt haben, halten Sie die OK-Taste gedrückt, um es zu vergrößern und vorlesen zu lassen.

USB-Konnektivität

Der USB-Anschluss dient zum Aufladen des integrierten Akkus und zum Aktualisieren der Firmware des C-Pen Exam 2. Einzelheiten zur Aktualisierung finden Sie unter support.cpen.com.