



Kurzanleitung
 QuickTalker™ 7
 QuickTalker™ 12
 QuickTalker™ 23

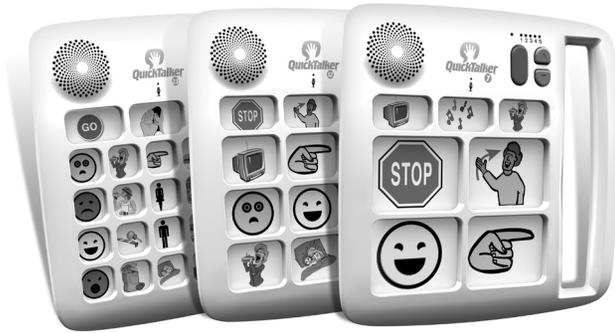

www.ablenetinc.com


Produktmerkmale

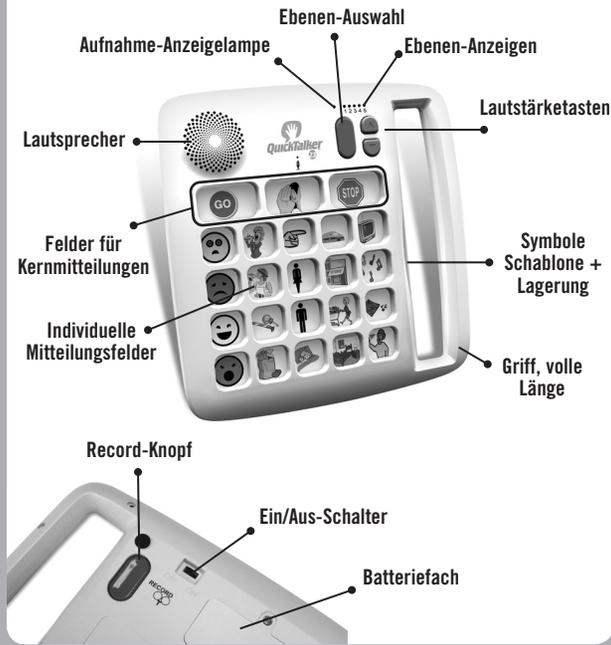

Schritt 1 – Einschalten des QuickTalker™

QuickTalker™ einschalten


Das Gerät umdrehen. In das Gerät vier AA-Batterien (Mignonzellen) einlegen. Beziehen Sie sich dabei auf die Abbildung. Den Ein/Aus-Schalter betätigen, um das Gerät einzuschalten.

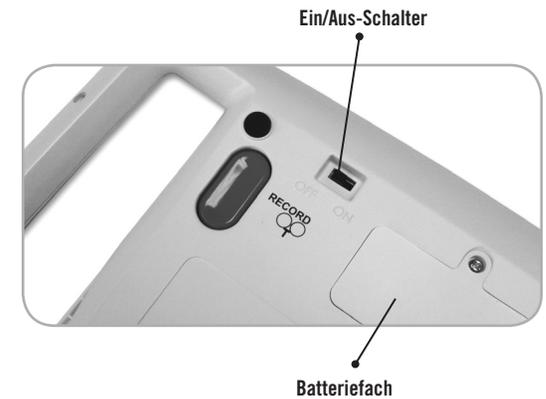

Schritt 2 – Wahl der Ebene

Ebene auswählen


Den roten Knopf an der Vorderseite des Geräts drücken, um die EBENE (1-5) zu wählen.

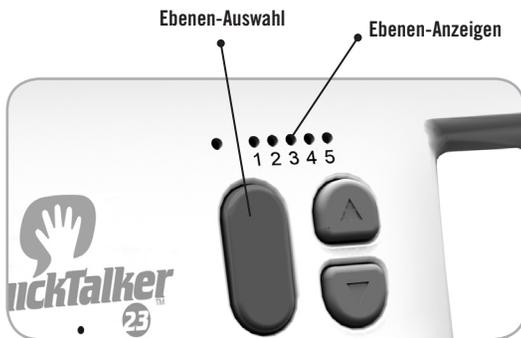

Schritt 3 – Aufnahmen von Sprachmitteilungen

a) In den Aufnahme-Modus umschalten

Den RECORD-Knopf an der Rückseite des Geräts gedrückt halten, bis die rote Lampe leuchtet. Dann loslassen.

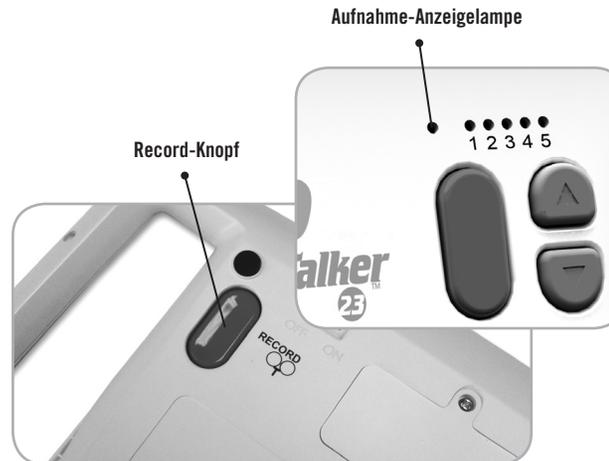

b) Die Sprachmitteilungen aufzeichnen

Das Feld für die gewünschte Mitteilung gedrückt halten und nach dem Tonsignal zu sprechen beginnen. Dann loslassen. Den Vorgang für andere Felder wiederholen.
Tipp! Beim Sprechen sollte der Abstand zum Mikrofon 15 bis 20 cm betragen, um einen lauten, deutlichen Ton zu erzielen.



c) Den Aufnahme-Modus beenden

Den RECORD-Knopf drücken und loslassen. Daraufhin erlöschen die Lampen. Hinweis: Nach 20 Sekunden Inaktivität wird der Aufnahme-Modus automatisch beendet.

Schritt 4 – Wiedergabe einer Sprachmitteilung

Eine Sprachmitteilung wiedergeben

Das gewünschte Feld drücken, um eine Sprachmitteilung wiederzugeben.



Hinweis: Durch Drücken eines anderen Felds wird die aktuelle Sprachmitteilung abgebrochen.

Die Lautstärke einstellen

Durch Drücken der grauen Pfeiltasten kann die Lautstärke eingestellt werden.



Sprachmitteilungs- und Lampenfunktion

Beim Drücken eines Felds blinkt die Record-Lampe gelb, wenn das Feld leer ist, und rot, wenn eine Mitteilung aufgenommen wird.

Löschen der Sprachmitteilungen

Einzelnes Feld – In den Aufnahme-Modus umschalten und das Feld nur kurz drücken und loslassen.

Ebene – Den RECORD-Knopf 10 Sekunden gedrückt halten, woraufhin alle Sprachmitteilungen auf der aktuellen Ebene gelöscht werden. Die Kernmitteilungen bleiben erhalten.

Löschen aller Mitteilungen – Den RECORD-Knopf 30 Sekunden gedrückt halten, woraufhin ALLE QuickTalker Sprachmitteilungen gelöscht werden.

Record-Knopf



Erweiterte Funktionsmerkmale

Kernmitteilungen

Es gibt drei Kernmitteilungen, die für alle Ebenen gleich sind. Es werden die zuletzt aufgezeichneten Sprachmitteilungen abgespielt.

Sperren der Bedienfelder (RECORD und EBENE)

Die RECORD- und EBENEN-Knöpfe gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt halten. Daraufhin blinken alle Lampen zweimal. Diesen Vorgang wiederholen, um die Bedienfelder freizugeben.

Record-Knopf



Ebenen-Anzeigen



Garantie und Pflege

Reinigung und Pflege

Zum Reinigen das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Garantie

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie kann auf www.ablenetinc.com eingesehen werden.

Weitere Informationen

Informationen zur Gewährleistung, Garantie und Rücksendung/Reparatur können online eingesehen werden.

Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen oder für eine Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc.

Mpls./Saint Paul, MN 55113
800-322-0956
www.ablenetinc.com