

## Kurzanleitung — Powerbank für I-Series I-13 / I-16

Kapazität: 25600 mAh

### Anschlüsse



1. Power-Taste / Spannungs-Selektor
2. Kabelloses Laden
3. Ladeanschluss
4. Batterie- & Spannungsanzeige
5. USB-C Anschluss
6. USB-A Anschlüsse

### Festlegen der korrekten Ausgangsleistung

**!** Es ist sehr wichtig, dass die richtige Ausgangsspannung eingestellt wird, bevor die Powerbank an ein beliebiges Gerät angeschlossen wird. **Die Verwendung der falschen Spannung kann Ihr Gerät beschädigen.**

#### Einstellung der korrekten Ausgangsleistung für I-Series I-13 / I-16

1. Lange auf die Power-Taste **1** drücken, um die Powerbank einzuschalten.
2. Doppeldruck auf die Power-Taste, **1** um in den DC-Ausgangsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, **1** bis die **19V** LED **eingeschaltet** ist.



### Aufladen der I-Series I-13 / I-16

**i** Befolgen Sie diese Schritte jedes Mal aus, wenn die Powerbank verwendet wird.

1. Verbinden sie die 2.1 mm abgewinkelte Steckerseite des Kabels mit dem Ladeanschluss **3** der Powerbank.



2. Langes Drücken auf die Power-Taste **1** zum Einschalten der Powerbank..
3. Doppeldruck auf die Power-Taste **1** um in den DC-Ausgangsmodus zu wechseln.
4. Stellen sie sicher das die Ausgabe auf 19V festgelegt ist.  
Informationen zum Ändern der Ausgangsleistung finden Sie unter *Einstellung der korrekten Ausgangsleistung für I-Series I-13 / I-16*.
5. Schließen Sie die 2,5mm gerade Steckerseite des Netzkabels an den Netzanschluss der I-Series I-13 / I-16 an.

## Ausschalten der Powerbank

### Manuelles Ausschalten

- Langes Drücken auf die Power-Taste **1** der Powerbank.

### Automatisches Ausschalten aktivieren

- Schnelles viermaliges (4) Drücken der Power-Taste **1** um das automatische Abschalten zu aktivieren/deaktivieren.

## Laden der Powerbank

Die Powerbank kann auf verschiedene Weise aufgeladen werden.

### Mit dem mitgelieferten USB-C Ladegerät

1. Wählen Sie den richtigen Wandstecker aus, und schließen Sie ihn an das Ladegerät an.



Enthaltene Wandstecker sind:

- Typ A (Nordamerika, Japan)
- Typ C (Europa, Südamerika, Asien)
- Typ G (Großbritannien)

2. Schließen Sie die USB-C-Seite des mitgelieferten Kabels an den USB-C Anschluss **5** der Powerbank an.
3. Schließen Sie die USB-C-Seite des mitgelieferten Kabels an das Ladegerät an.
4. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose bis die Powerbank vollständig geladen ist.

### Mit anderem Ladegerät

Wenn die Powerbank auf andere Weise aufgeladen wird, stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts in diese Bereiche fällt:

- DC-Ausgang 4.5V - 36V, bis zu 3A (2W - 45W)
- USB-C-Ausgang: 40W



Die Powerbank akzeptiert nur 5,5 x 2,1 mm Hohlstecker.