

Aktion	Beschreibung
IR-Signal senden	Das angegebene IR-Signal senden.
Mit AccessIT verbinden*	Unterbricht die Verbindung mit dem zur Zeit angeschlossenen AccessIT-Gerät und zeigt dann die AccessIT-Geräteauswahl.
AccessIT zurücksetzen*	Hält die angegebenen AccessIT-Aktionen an: Textübertragung, gehaltene Tastaturtasten, Klicks und/oder durchgängige Mausbewegungen.
Feldtext senden*	Die Mitteilung oder die Bezeichnung eines Feldes an das AccessIT-Gerät senden.
Tastaturtaste senden*	Eine Tastaturtaste an das AccessIT-Gerät senden.
Text im Mitteilungsfenster senden*	Sendet den aktuellen Text im Mitteilungsfenster an das AccessIT-Gerät.
Mausklick senden*	Mausklicks an das AccessIT-Gerät senden.
Mausbewegung senden*	Mausbewegung an das AccessIT-Gerät senden.
Boardmaker Student Center starten.	Startet die App „Boardmaker Student Center“ und öffnet gegebenenfalls die angegebene Aktivität.
Die Communicator 5 App starten.	Startet die Software Tobii Dynavox Communicator.
Grid 3 starten	Startet die Grid 3 App.
Gerät neu starten	Startet das Gerät neu.
Gerät ausschalten	Schaltet das Gerät aus.

* Diese Aktion erfordert ein Tobii Dynavox AccessIT 3. Siehe Abschnitt 8.6.3 *AccessIT*

8.6.1 Eine Aktion löschen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie das Feld  **Löschen** neben einer Aktion.
4. Wählen Sie das rote Feld **Löschen**, um das Löschen zu bestätigen.

8.6.2 Feldaktionen neu ordnen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen und halten Sie das Zeichen  für eine Aktion und ziehen Sie es in der Liste mit Aktionen in die neue Position.



8.6.3 AccessIT

Snap unterstützt das Tobii Dynavox AccessIT 3, ein USB-Bluetooth-Gerät zur Übermittlung von Tastatureingaben, Mausbewegungen und Mausclicks von einem Gerät mit der App Tobii Dynavox + Core First an einen gewöhnlichen Computer mit Windows 10. Wenn Sie mehr über das Tobii Dynavox AccessIT 3 erfahren möchten, gehen Sie auf <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>.



In englischen Seitensets, die mit Snap 1.7 oder höher erstellt wurden, sind AccessIT-Seiten enthalten. Auf <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral> stehen AccessIT-Seitenpakete in deutscher Sprache zum Import in Ihre bereits vorhandenen Seitensets bereit.



Im Folgenden wird der Computer, der die Befehle entgegennimmt, als „der PC“ bezeichnet, und das Gerät, von dem aus die Befehle übermittelt werden, als „das Sprachausgabegerät“.



Das AccessIT 3 nutzt die drahtlose Technologie Bluetooth®. Der PC (mit angeschlossenem AccessIT 3) und das Sprachausgabegerät müssen sich bei der Verwendung des AccessIT 3 innerhalb eines Abstands von ca. 10 Metern befinden und über Bluetooth miteinander gekoppelt sein.

Vor Durchführung der folgenden Schritte müssen sowohl das Sprachausgabegerät als auch der PC eingeschaltet und entsperrt werden.

8.6.3.1 AccessIT einrichten

Das AccessIT anschließen

1. (Auf dem PC) Verbinden Sie das AccessIT 3 mit einem USB-Anschluss.



AccessIT 3 erfordert USB 2.0 oder höher.

Bluetooth aktivieren – Sprachausgabegeräte mit Windows

1. (Auf dem Sprachausgabegerät) Wählen Sie das **Startmenü** und anschließend **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Geräte**.
3. Wählen Sie **Bluetooth**.
4. Treffen Sie für das Ein-/Aus-Kontrollkästchen **Bluetooth** die Auswahl EIN.

Bluetooth aktivieren – Sprachausgabegeräte mit iOS (iPad)

1. (Auf dem Sprachausgabegerät) Gehen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie Bluetooth.

8.6.3.2 Aktionen auf dem AccessIT

Die Aktionen auf dem AccessIT sind auf eine kombinierte Verwendung ausgelegt. Für gewöhnliche PC-Vorgänge wie z. B. Anklicken und Ziehen ist mehr als eine Aktion erforderlich. Die einzelnen Aktionen werden im Folgenden beschrieben.



Wenn ein Feld mit einer AccessIT-Aktion angewählt wird, aber kein AccessIT-Gerät angeschlossen ist, wird automatisch die Auswahl der (verfügbaren) AccessIT-Geräte geöffnet.

- Mit AccessIT verbinden – Unterbricht die Verbindung zum aktuellen AccessIT-Gerät (falls vorhanden) und zeigt die AccessIT-Geräteauswahl an. Diese Aktion dient dazu, von einem AccessIT-Gerät zum anderen zu wechseln. Nicht alle AccessIT-Sitzungen müssen mit dieser Aktion beginnen, da jede AccessIT-Aktion automatisch die AccessIT-Geräteauswahl öffnet, wenn im Moment kein AccessIT-Gerät angeschlossen ist.
- AccessIT zurücksetzen – Beendet die angegebenen Befehlstypen, die derzeit ausgeführt werden: Tastaturtasten, Mausklicks, Mausbewegungen und/oder Text.
- Feldtext senden – Sendet die Mitteilung im Feld an das AccessIT-Gerät. Wenn das Feld keine Mitteilung enthält, wird die Bezeichnung des Feldes gesendet.
- Tastaturtaste senden – Sendet die angegebene Tastaturtaste. Optionen: Sie können die Taste gedrückt halten und/oder nach dem Absenden der Tastaturtaste (vor Durchführung der nächsten Aktion) eine bestimmte Zeit lang warten.
- Text im Mitteilungsfenster senden – Sendet den aktuellen Text im Mitteilungsfenster an das AccessIT-Gerät. Wenn das Mitteilungsfenster Symbole enthält, so werden diese nicht gesendet.
- Mausklick senden – Sendet den angegebenen Klicktyp (Linksklick, Rechtsklick, Mittelklick, doppelter Linksklick). Optionen: Sie können nach dem Absenden des Klicks (vor Durchführung der nächsten Aktion) eine bestimmte Zeit lang warten und/oder den Klick gedrückt halten.
- Mausbewegung senden – Sendet eine Mausbewegung an das AccessIT-Gerät. Mausbewegungen erfolgen von der aktuellen Mausposition aus. Verschieben Sie den blauen Ball zu der Position im Kreis, die der gewünschten Mausbewegung entspricht, und geben Sie dann eine Zahl in das Feld für die Entfernung ein. Die Einheit für den Abstand ist die kleinste erkennbare Mausbewegung (je nach den verwendeten Geräten und den Einstellungen für die

Mausgeschwindigkeit auf dem PC zwischen 0,08 und 0,13 mm). Optionen: Durchgängige Bewegung (die Maus setzt ihre Bewegung in die angegebene Richtung fort, bis eine andere Aktion sie anhält bzw. ihre Richtung ändert oder sie den Rand des Bildschirms erreicht) und/oder nach Absenden der Mausbewegung (vor Durchführung der nächsten Aktion) eine bestimmte Zeit lang warten.

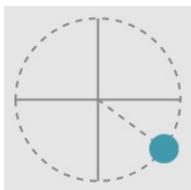


Abbildung 8.11 Richtung der Mausbewegung – Durch eine entsprechende Positionierung des blauen Balls in dem Kreis können Sie die Richtung der Mausbewegung einstellen.



Manche AccessIT-Benutzer finden es hilfreich, auf dem PC in Windows die Einstellung „Zeigerposition beim Drücken der STRG-Taste anzeigen“ zu aktivieren. Wenn Sie von Snap aus mithilfe der Aktion „Tastaturtaste senden“ die STRG-Taste absenden, erscheinen dann auf dem PC vorübergehend animierte Kreise rund um den Mauszeiger, damit er besser zu sehen ist. Wenn Sie in Windows auf diese Einstellung für die Maus zugreifen möchten, gehen Sie auf *Einstellungen > Geräte > Maus > Weitere Mausoptionen > Registerkarte Zeigeroptionen*.

8.6.3.3 Energiespareinstellungen auf dem PC und AccessIT


Ihr PC kann nur dann AccessIT-Befehle entgegennehmen, wenn er eingeschaltet und nicht im Standby-Modus ist. Damit der Zugriff auf den PC nicht unterbrochen wird, legen Sie in den Energiespareinstellungen Ihres PCs fest, dass der Computer (die Festplatte) im angeschlossenen Zustand niemals in den Standby-Modus versetzt wird.

Ihr PC empfängt auch weiterhin AccessIT-Befehle, wenn der Bildschirm (das Display) in den Energiesparmodus versetzt wird. Wenn Snap einen AccessIT-Befehl (Tastaturtaste, Mausbewegung oder Mausklick) absendet, wird der PC-Bildschirm „aufgeweckt“.

Die Energiespareinstellung in Windows finden Sie unter *Einstellungen > System > Netzbetrieb und Energiesparen*.

8.7 Stil des Feldes

In der Kategorie „Stil“ können Sie das Aussehen eines Feldes verändern.

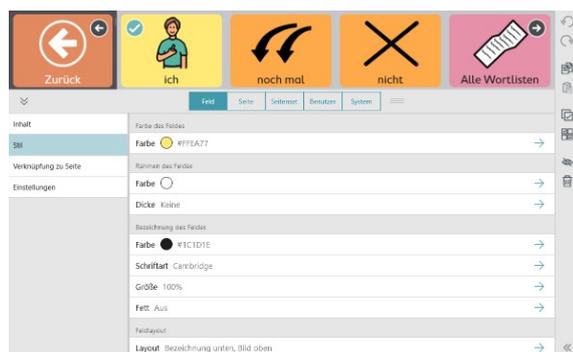

8.7.1 Farbe des Feldes



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Farbe des Feldes“ **Farbe** aus.
5. Wählen Sie eine Farbe aus.