




Simplyworks®

GEBRAUCHSANWEISUNG

RECEIVE

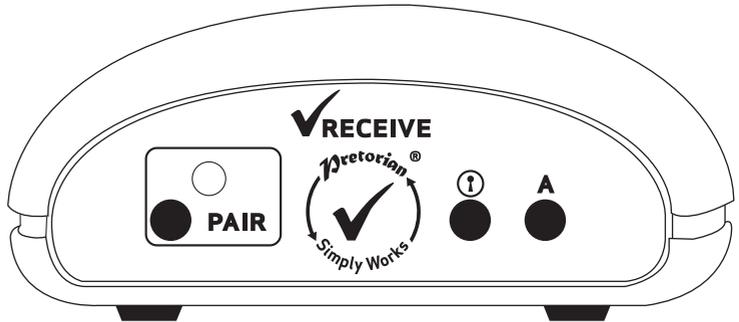

Lieferumfang

Bitte auf Vollständigkeit prüfen:

RECEIVE

diese Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

SimplyWorks® ist das erste umfassende kabellose Übertragungssystem, welches für Benutzer mit motorischen Einschränkungen zur Bedienung von Eingabegeräten entwickelt wurde.

RECEIVE bildet dabei die Verbindung zur PC-Bedienung für bis zu sechs SimplyWorks®-Eingabegeräte wie TRACKBALL, JOYSTICK, SWITCH 125, SEND, verschiedene Taster und Tastatur über nur einen USB-Anschluss ohne eine zusätzlich notwendige spezielle Treiber-Software.

SimplyWorks® ermöglicht Ihnen einfach und schnell kabellose Einzel- oder Mehrplatz-Lernumgebungen zu schaffen, damit Sie sich den eigentlichen Aufgaben widmen können.

RECEIVE ist einfach zu bedienen. Damit Sie das Gerät optimal benutzen können, nehmen Sie sich bitte Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanweisung.

Produktmerkmale

- **Moderner kabelloser Mehrkanal-Funk-Empfänger für Übertragungsdistanzen bis zu 10 Meter, ideal für Klassenzimmer und PC-Arbeitsplatz.**
- **Unterstützt bis zu sechs Sender gleichzeitig.**
- **Keine Einschränkungen bei der Auswahl der verschiedenen Sender.**
- **Großbuchstaben- und Ziehen-Kontrollämpchen (LEDs).**
- **USB-Anschluss.**
- **Keine zusätzlichen Software-Treiber erforderlich.**
- **PC- und Mac-kompatibel.**
- **Kompakte Abmessungen.**

Kompatibilität

RECEIVE ist kompatibel mit allen PC- und Mac-Computern, die über einen USB-Anschluss verfügen und nutzt alle erweiterten Funktionen, die nicht über die herkömmlichen PS/2-

Anschlüsse verfügbar sind. Deshalb ist dieses Gerät nicht zum Anschluss an eine PS/2-Buchse geeignet und funktioniert auch nicht über einen Kabeladapter PS/2-USB am Computer.

Installation

Schalten Sie den Computer ein und warten Sie den vollständigen Startvorgang des Betriebssystems ab. Wählen Sie einen freien USB-Anschluss am Computer und stecken Sie das Kabel des RECEIVE in die gewählte USB-Buchse. Das Gerät wird vom Computer automatisch erkannt und die notwendigen Treiber geladen. Das PAIR-Lämpchen (LED) wird dann für 5 Sekunden aufleuchten. Da RECEIVE verschiedenste Funktionen der Computereingaben unterstützt, lädt der Computer mehrere Treiber-Programme,

dies kann bis zu einer Minute dauern. Danach wird das Betriebssystem Ihnen die erfolgreiche Installation anzeigen.

Um die Reichweite der Funkverbindung zu verbessern, sollten Sie das Gerät nicht hinter dem Computer, nicht zu nahe an metallischen Gegenständen oder anderen elektronischen Geräten, die selbst Strahlung abgeben, wie Netzwerk-Hubs, Mobiltelefonen etc., platzieren.


Sender und Empfänger zuordnen

Vor der Benutzung muss RECEIVE den gewünschten eingesetzten SimplyWorks®-Sendern zugeordnet werden. Unabhängig vom Produkt ist der Ablauf immer derselbe:

- 1 Positionieren Sie das Sendegerät, welches dem RECEIVE zugeordnet werden soll, in die Nähe des RECEIVE.
- 2 Drücken Sie den PAIR-Taster [A] auf der Vorderseite des RECEIVE kurz. Die PAIR-LED [B] beginnt langsam zu blinken.
- 3 Innerhalb von 10 Sekunden drücken Sie den PAIR-Taster des Senders.
- 4 Die PAIR-LED des RECEIVE blinkt weiter hin für eine kurze Zeit während das Gerät einen Abgleich mit dem Sender durchführt. Nach erfolgreicher Beendigung leuchtet die

- PAIR-LED für 5 Sekunden konstant. Der Sender kann nun benutzt werden. Immer wenn eine Datenübertragung von einem Sender erfolgreich durchgeführt ist, blinkt die PAIR-LED kurz auf um optisch anzuzeigen, dass die Funkverbindung aufrecht erhalten ist.
- 5 Sollte die PAIR-LED nach 30 Sekunden aufhören zu blinken und dann nicht konstant leuchten, wiederholen Sie bitte das Zuordnen ab Absatz 2. Sollte dies wiederum nicht erfolgreich sein, lesen Sie bitte im Kapitel Fehlersuche.

Die Informationen über die Zuordnung für alle sechs Kanäle bleiben im internen Speicher des RECEIVE auch nach dem Ausschalten des Computers erhalten.

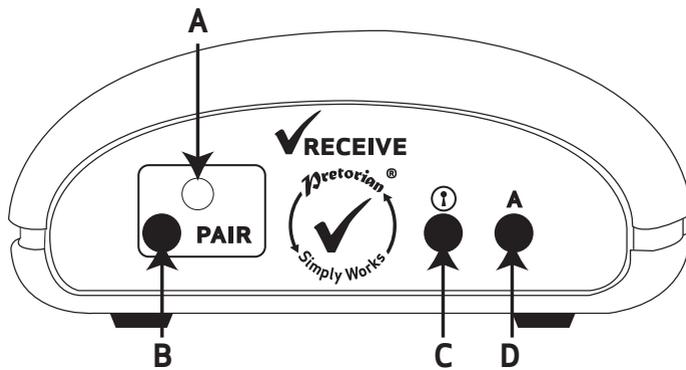

Verschiedene Sender an einem RECEIVE

Ihr RECEIVE kann bis zu sechs Sendeeinheiten gleichzeitig unterstützen. Den zweiten und jeden weiteren Sender mit RECEIVE zu verbinden funktioniert genauso wie mit dem ersten Sender.

Sollten Sie einen siebten Sender zuordnen, wird der Sender durch den neuesten ersetzt, der am längsten nicht mehr benutzt wurde. Die anderen fünf sind davon nicht betroffen. Auf diese Weise

werden die Sender als erstes ersetzt, die nicht mehr mit diesem RECEIVE benutzt wurden.

Falls Sie alle Zuordnungen neu durchführen möchten, drücken Sie zunächst den PAIR-Taster [A] für ca. 3 Sekunden. Die PAIR-LED [B] wird kurz blinken und alle 6 Kanalinformationen sind gelöscht um neu beginnen zu können.

Großbuchstaben- und Ziehen-Kontrolllämpchen (LEDs)

Auf der Vorderseite Ihres RECEIVE ist jeweils eine LED für die Funktionen ZIEHEN [C] (Mausklick links mit Ziehen-Funktion) und Großbuchstaben-Umschaltung [D] (Tastatur-Buchstaben-Umschaltung) angeordnet. Dies ist nützlich, wenn mehrere Sender diese Funktionen benutzen.

Lernumgebungen

Das SimplyWorks®-Konzept ermöglicht Ihnen neue Lernumgebungen flexibel und nach Ihren Wünschen und Erfahrungen zu gestalten. Mit sechs belegten Kanälen sind mit verschiedensten SimplyWorks®-EingabegerätendieMöglichkeiten nahezu unerschöpflich.

Zum Beispiel haben Sie einen einzelnen Benutzer, der mit einem TRACKBALL, einer Tastatur und bis zu 4 Tastern über einen RECEIVE arbeitet.

Gleichermaßen können ein TRACKBALL und ein JOYSTICK gleichzeitig am selben Computer von Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten benutzt werden.

Ebenso können mehrere Schüler oder Arbeitsgruppen über sechs Tastaturen oder sechs TRACKBALLs zum Beispiel ein interaktives Whiteboard bedienen.

Wartung

Ihr RECEIVE besitzt keine Teile, die gewartet werden müssen. Sollte eine Reparatur notwendig werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Fehlersuche

Sollte Ihr **RECEIVE** nicht korrekt funktionieren, versuchen Sie bitte anhand der folgenden Hinweise die Ursache zu ermitteln. Sollte trotz dieser Hilfen Ihr Gerät immer noch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte vor dem Zurücksenden mit Ihrem Händler in Verbindung.

Symptom

Mögliche Ursache / Hilfestellung

Sender funktioniert nicht

- Sender und **RECEIVE** sind nicht zugeordnet – ordnen Sie sie lt. Kapitel Zuordnen neu zu.
- Batterien kontaktieren nicht korrekt – im Batteriegehäuse die Batterien auf Anschlag in Richtung Pluspol schieben.
- Batterien des Senders sind verbraucht – ersetzen.

Sender arbeitet fehlerhaft oder nicht durchgängig

- Batterien des Senders sind verbraucht – ersetzen.
- Außerhalb des Übertragungsbereiches – bewegen Sie den Sender näher zum **RECEIVE**
- Funkstörungen – entfernen Sie Sender wie auch **RECEIVE** von Störquellen. Versuchen Sie evtl. auch einen Kaltstart Ihres Computers, um automatisch neue Funkkanäle zu wählen.

Geräte lassen sich nicht zuordnen – LED erlischt nach 30 Sekunden

- Batterien des Senders sind verbraucht – ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sender beim Zuordnen nicht weiter als ca. einen Meter von **RECEIVE** entfernt ist.

Garantie

Die Garantie Ihres **RECEIVE** erstreckt sich auf Fehler bei der Fertigung oder auf defekte Komponenten. Das Gerät ist entwickelt für den häuslichen und den schulischen Einsatz. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie. Unerlaubte Reparaturen oder Veränderungen am Gerät, mechanische Überlastung, Eintauchen in Flüssigkeiten oder Anschließen an inkompatible Geräte führt ebenso zum Erlöschen der Garantie.

Pretorian
TECHNOLOGIES LTD.

Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB UK
Tel +44 (0) 1427 678990 Fax +44 (0) 1427 678992

SimplyWorks® is a registered
trademark of Pretorian Technologies Ltd

www.pretorianuk.com