

Attainment Company's

Gebrauchsanweisung

# GoTalk<sup>®</sup>32+

**Aufnahmezeit:**  
10 Sekunden pro  
Mitteilung  
17 Sekunden pro  
Grundnachrichtenfeld

Grundnachrichtenfelder  
(17 Sekunden pro Feld)

Lautstärkeeinstellung  
Ebenenumschalter  
Aufnahme LED (rot)  
Ebenenanzeige (grüne LEDs)  
Mikrofon

Lautsprecher

Nachrichtenfelder (10  
Sekunden pro Feld)

Rückseite

Ein-/Ausschalter  
Aufnahmetaste  
Ebenen löschen  
Batteriefach (2 x AA)  
Gewindebuchse (zum Einschrauben der Stütze)  
Gewindebuchse (zum Einschrauben der Stütze)  
Deckblatteinschub und Deckblattaufbewahrung



Gewicht: 0,95kg  
Abmessung: 36,2cm x 25,4cm x 4,5cm  
Gesamte Aufnahmezeit: über 27 Minuten

Deckblatteinschub und  
-aufbewahrung

# GoTalk 32+

Der GoTalk 32+ ist ein Sprachausgabegerät mit Ebenen und Platz für viele Aufnahmen. Sie bestimmen die Aussage, das Wort oder das Geräusch, welches auf den jeweiligen Nachrichtefeldern abgelegt werden soll, sowie das Symbol/Bild oder Wort, welches die aufgezeichnete Aufnahme anzeigen bzw. darstellen soll. Anschließend nehmen Sie die einzelnen Aufnahmen auf.

## Ebenen

Der GoTalk 32+ hat fünf Ebenen mit jeweils 32 Nachrichtefeldern. Der Ebenenumschalter liegt unter den fünf nummerierten Ebenenanzeigen. Um eine Ebene zu wechseln, betätigen Sie den Ebenenumschalter und lassen diesen wieder los. Die grüne Ebenen-LED zeigt die aktuelle Ebene an. Betätigen Sie den Ebenenumschalter erneut um auf die nächste Ebene zu wechseln.

Die Ebenensperre verhindert das unerwünschte Verstellen der Ebenen. Um das Gerät auf einer Ebene zu sperren, betätigen Sie in dieser die Ebenensperre. Hinweise hierzu unter: **Sperrmöglichkeiten**.

## Lautstärke

Die Lautstärketasten Lauter ▲ und Leiser ▼ befinden sich vorne links neben dem Griff. Ein Signalton bestätigt die schrittweise Lautstärkenveränderung. Dieser Signalton bleibt als Hinweis aus, wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist.

## Grundnachrichten

Die Felder für Grundnachrichten enthalten die gleiche Nachricht auf allen Ebenen. Sie sind keiner einzelnen Ebene zugeordnet. Jede dieser 3 Nachrichten hat 17 Sekunden Aufnahmezeit. Der Streifen für die Beschriftung dieser Grundnachrichten ist unabhängig von dem Deckblatt für die anderen 32 Felder. Die Aufnahme der Grundnachrichten erfolgt wie die Aufnahme der Nachrichtfelder, s. im folgenden.

## Nachrichten wiedergeben

Drücken Sie kurz ein Nachrichtefeld. Eine grüne Ebenen-LED blinkt während die Aufnahme wiedergegeben wird.

## Nachrichten aufnehmen

Nachrichten haben eine mögliche Länge von 10 Sekunden. Schalten Sie das Gerät ein. Die Ebenen-LEDs laufen nacheinander durch, das Gerät piept, eine grüne LED blinkt um die aktuell eingestellte Ebene anzuzeigen.

- Für eine Aufnahme drücken Sie kurz die Aufnahmetaste (Rückseite) Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED leuchten auf, das Gerät ist aufnahmebereit.
- Während diese beiden LEDs aufleuchten, betätigen Sie kurz das Nachrichtefeld, das Sie besprechen möchten. Die Aufnahme beginnt, sprechen Sie deutlich in das Gerät und drücken Sie zum Beenden Ihrer Aufnahme erneut ein beliebiges Nachrichtefeld.
- Während der Aufnahme blinkt die Aufnahme-LED. Wenn das Gerät bereit ist weitere Aufnahmen abzuspeichern, leuchtet die Aufnahme-LED permanent. Wiederholen Sie den letzten Schritt um weitere Aufnahmen zu hinterlegen.
- Um den Aufnahmemodus zu verlassen, drücken Sie erneut die Aufnahmetaste auf der Rückseite des Gerätes. Es erlöschen nun beide LEDs.

Es gibt eine Aufnahmesperre um unbeabsichtigtes Aufnehmen oder Löschen von Aufnahmen zu vermeiden. Hinweise hierzu unter: **Sperrmöglichkeiten**.



## Löschen von Aufnahmen

Um einzelne Aufnahmen zu löschen, ersetzen Sie diese bitte durch neue (leere) Aufnahmen.

- Schalten Sie den Aufnahmemodus ein. (Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste auf der Rückseite des Gerätes – die rote LED leuchtet auf)
- Drücken Sie kurz das zu löschende Nachrichtenfeld um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie anschließend sofort ein beliebiges Nachrichtenfeld um die Aufnahme zu beenden.

Um alle Aufnahmen einer Ebene zu löschen, wählen Sie die zu löschende Ebene (über die Ebenenwahl taste).

- Schalten Sie den Aufnahmemodus ein. (Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste auf der Rückseite des Gerätes – die rote LED leuchtet auf).
- Drücken Sie mit einer Stiftspitze oder einer Büroklammer in die „Erase“-Ausparung auf der Rückseite des GoTalk 32+. Die rote Aufnahme-LED leuchtet permanent und die grüne LED schaltet sich aus. Alle Aufnahmen dieser Ebene sind nun gelöscht.

Das Löschen einer Ebene löscht nicht die Aufnahmen der 3 Grundnachrichtenfelder.



## Sperrmöglichkeiten

### Verhindern von ungewolltem Aufnehmen und Umschalten der Ebene

**Ebenensperre** Die Aufnahmetaste drücken und gedrückt halten. Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED leuchten. Gleichzeitig drücken Sie jetzt die Lautstärke-Leiser Taste. Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED schalten aus. Die Ebenensperre ist aktiviert.

**Aufnahmesperre** Die Aufnahmetaste drücken und gedrückt halten. Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED leuchten. Gleichzeitig drücken Sie jetzt die Lautstärke-Lauter Taste. Die rote Aufnahme-LED und die grüne Ebenen-LED schalten aus. Die Ebenensperre ist aktiviert

**Aufnahme- und Ebenensperre aufheben** Um Aufnahme- und Ebenensperre wieder aufzuheben, schalten Sie den GoTalk 32+ aus. Im ausgeschalteten Zustand die Aufnahmetaste drücken und gedrückt halten und das Gerät einschalten. Nachdem der Piepton ertönt ist, kann die Aufnahmetaste losgelassen werden. Die Sperren sind nun deaktiviert.

## Gerätefüße

Im Lieferumfang befinden sich 2 Gerätefüße mit Gewinde und Gummifüßen. Sie können in die dafür vorgesehenen Gewinde an der Rückseite des Gerätes eingeschraubt werden um das Gerät aufzustellen.

## Batterien

Zum Betrieb sind 2 AA-Batterien (Mignon) notwendig. Die Erstausrüstung befindet sich im Lieferumfang.

## Deckblatteinschub und Deckblattaufbewahrung


Nicht verwendete Deckblätter können in dem Fach an der Seite des Gerätes aufbewahrt werden.

## Tipps zur Bedienung und Fehlersuche

- Während der Aufnahme können Sie die letzte aufgenommene Nachricht anhören ohne den Aufnahmemodus zu verlassen, indem Sie die Taste Lautstärke Lauter oder Leiser betätigen.
- Die Ebene lässt sich nicht umschalten? Möglicherweise ist die Ebenensperre eingeschaltet. Siehe: Aufnahme- und Ebenensperre aufheben.
- Der GoTalk 32+ nimmt nicht auf? Möglicherweise ist die Aufnahmesperre eingeschaltet. Siehe: Aufnahme- und Ebenensperre aufheben.
- Aufnahmetipp: Nehmen Sie in ruhiger Umgebung auf. Das GoTalk-Mikrofon nimmt alle Geräusche auf, auch die, die Sie evtl. selbst nicht bemerken. Das Mikrofon befindet sich oben rechts am Gerät, neben der roten Aufnahme-LED.
- Aufnahmetipp: Legen Sie den GoTalk während der Aufnahme flach auf den Tisch. Berühren Sie das Gerät nur zum Betätigen der Tasten, um unerwünschte Geräusche zu verhindern. Die Nachrichtenfelder benötigen nur wenig Druck zum Auslösen. Berühren Sie sie nur leicht.
- Aufnahmetipp: Um eine flüssige Kommunikation zu erreichen vermeiden Sie leere Aufnahmezeit. Beginnen Sie sofort nach dem Betätigen der Nachrichtenfelder zu sprechen und beenden Sie die Aufnahme sofort wenn die Nachricht gesprochen wurde. Sie brauchen keine weitere Zeit zu warten.

## GoTalk® Overlay Software

Das Erstellen von Deckblättern ist besonders leicht mit der GoTalk Overlay Software. Diese beinhaltet mehr als 4500 Symbole und Fotos. Sie können auf eine integrierte Bildersuche zurückgreifen oder eigene digitale Fotos importieren und für jedes Deckblatt verwenden. Deckblattraster verfügen über viele Bilder und Textfelder. Die Einstellungen ermöglichen das Verändern von Farbe, Größe, Schriftart; bewegen, vergrößern, drehen und ausschneiden von Bildern; exportieren Sie die Deckblätter in PDF-, JPG- oder PNG-Formate, so dass diese auch leicht per E-Mail versendet werden können. Beinhaltet Dutzende von fertig gestalteten Deckblättern für alle Produkte von Attainment. GoTalk® Overlay Software ist nur in englisch erhältlich.

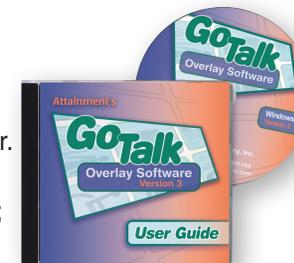

finden Sie unter [www.rehavista.de](http://www.rehavista.de)


## Zubehör für den GoTalk 32+



Tragegurt



Aufsteller

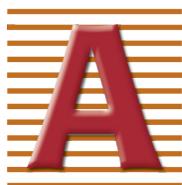

**Attainment Company, Inc.**

© Für die deutsche Übersetzung: Niedergelassener Bevollmächtigter in der EU  
REHAVISTA GmbH, Forckenbeckstr. 9, 14199 Berlin

[www.AttainmentCompany.com](http://www.AttainmentCompany.com)