


# AbleNet®

## Kurzanleitung LITTLE Step-by-Step™ Kommunikationsgerät


www.ablenetinc.com

Aktualisiert: April 22, 2020 2:23 PM

Durchsichtiger Schnappdeckel  
für Symbolschablonen

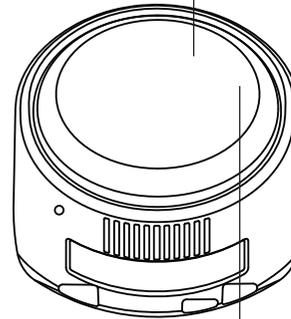

Aktivierungsfläche der  
farbigen Schalteroberfläche  
(rote, grüne, gelbe und blaue  
Schalteroberflächen enthalten)

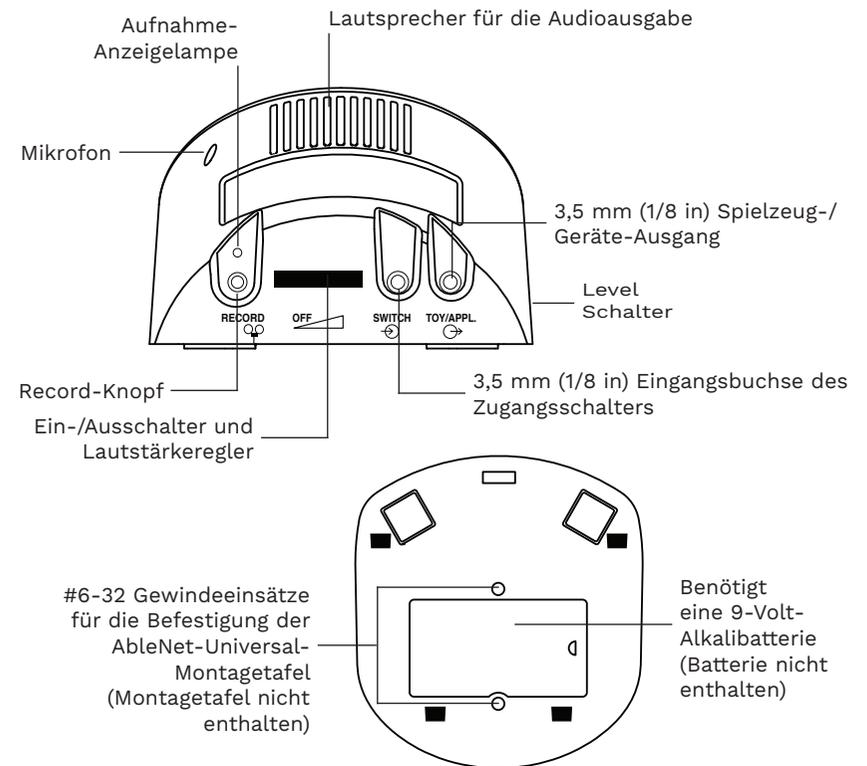

## Allgemeine Beschreibung

1. Stecken Sie eine 9-Volt-Alkalibatterie (Batterie nicht enthalten) in das Gerät. Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an, um das Batteriefach zu öffnen. Drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu schließen.
2. Schalten Sie das Gerät an.
3. Wählen Sie das gewünschte Level.
4. Drücken und halten Sie den Record-Knopf, bis die Aufnahmeanzeige aufleuchtet.
5. Drücken und halten Sie die farbige Schalteroberfläche. Sprechen Sie in das Mikrofon, nachdem Sie das Piepen hören.
6. Lassen Sie die farbige Schalteroberfläche los, wenn sie mit der Aufnahme fertig sind.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um zusätzliche Mitteilungen aufzunehmen.
8. Drücken Sie den Record-Knopf, um die Aufnahme-Anzeigelampe auszuschalten.
9. Passen Sie die Lautstärke falls nötig an.
10. Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit.

## Farbige Schalteroberflächen ändern

1. Entfernen Sie den durchsichtigen Schnappdeckel.
2. Drehen Sie die farbige Schalteroberfläche gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
3. Bringen Sie den durchsichtigen Schnappdeckel wieder an.

## Bild-Symbolschablonen

Es kann ein Bildsymbol unter dem durchsichtigen Schnappdeckel angebracht werden, um anzuzeigen, was passiert, wenn die farbige Schalteroberfläche aktiviert wird. Symbolschablonen sollten in einen kreisförmigen Bereich von 5 cm (2 in) passen.

## Mitteilung mit einem Zugangsschalter abspielen

1. Stecken Sie einen AbleNet-Zugangsschalter mit einem 3,5 mm (1/8 in) Taster-Stecker in die Zugangsschalter-Eingangsbuchse am Gerät.
2. Aktivieren Sie den Zugangsschalter, um die Mitteilung auf dem Gerät wiederzugeben.

## Eine Mitteilung wiederholen

1. Spielen sie die Mitteilung ab, die Sie wiederholen möchten.
2. Drücken Sie am Ende der gewünschten Mitteilung einmal den Record-Knopf.
3. Die gleiche Mitteilung wird wiederholt, wenn die farbige Schalteroberfläche aktiviert wird.
4. Drücken Sie den Record-Knopf einmal, um mit der nächsten Mitteilung fortzufahren.

## Schalterangepasste Spielzeuge oder Geräte aktivieren

1. Drücken Sie den Record-Knopf einmal, während Sie eine Mitteilung aufnehmen, um diese Mitteilung mit einem Spielzeug/Gerät zu verknüpfen.
2. Stecken Sie Ihr Spielzeug oder Gerät in die 3,5 mm (1/8 in) Spielzeug-/Geräte-Ausgangsbuchse auf dem Gerät. Einige Spielzeuge oder Geräte benötigen den mitgelieferten Steckeradapter für den Anschluss an das Gerät.
3. Das Spielzeug oder Gerät wird aktiviert, solange die Mitteilung abgespielt wird.

Hinweis: Einige elektrische Geräte benötigen einen PowerLink, um aktiviert werden zu können.