


Attainment Company's

Bedienungsanleitung

GoTalk⁹⁺

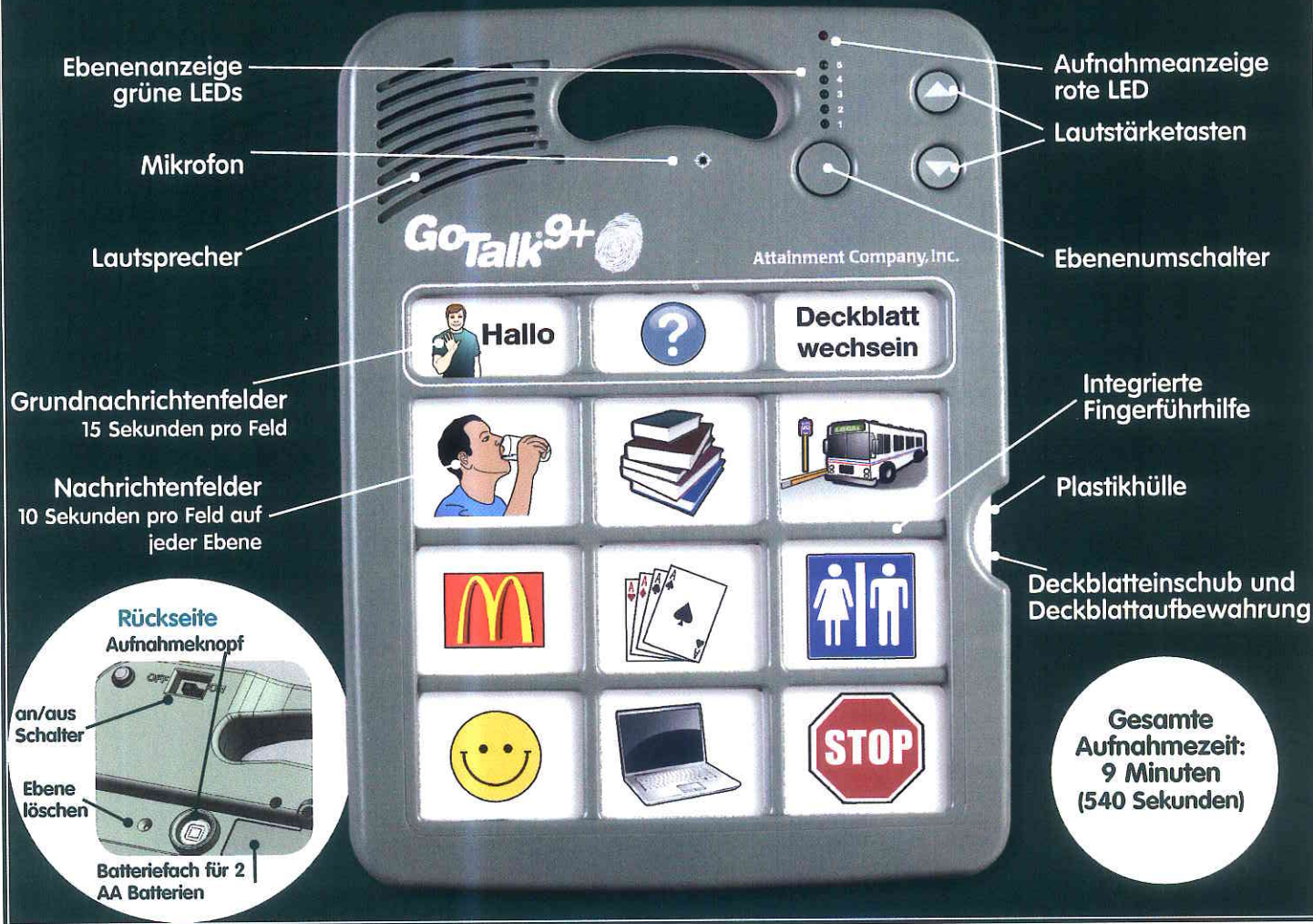

Ebenenanzeige
grüne LEDs

Mikrofon

Lautsprecher

Aufnahmeanzeige
rote LED

Lautstärketasten

Ebenenumschalter

Grundnachrichtenfelder
15 Sekunden pro Feld

Nachrichtenfelder
10 Sekunden pro Feld auf
jeder Ebene

Integrierte
Fingerführhilfe

Plastikhülle

Deckblatteinschub und
Deckblattaufbewahrung



Rückseite
Aufnahmeknopf

an/aus
Schalter

Ebene
löschen

Batteriefach für 2
AA Batterien

Gesamte
Aufnahmezeit:
9 Minuten
(540 Sekunden)

Anleitung

Aufnahme

Schalten Sie den GoTalk ein, Sie hören einen Beep. Drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk, die rote LED und eine grüne LED leuchten. Der Aufnahmemodus ist eingeschaltet. Die grüne LED zeigt Ihnen die aktive Ebene an.

Betätigen Sie das gewünschte Nachrichtenfeld. Das Blinken der roten LED zeigt, dass der GoTalk nun aufnimmt. Sprechen Sie die Nachricht mit normaler Stimme in das Mikrofon.

Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie einfach ein beliebiges anderes Nachrichtenfeld. Der GoTalk bleibt im Aufnahmemodus, so dass Sie mit der Aufnahme weiterer Nachrichten fortfahren können.

Wenn Sie alle Nachrichten aufgenommen haben drücken Sie die Aufnahmetaste zum Verlassen des Aufnahmemodus.



Wiedergabe

Drücken Sie auf ein Tastenfeld, eine grüne LED blinkt und die Nachricht wird wiedergegeben.


Ebene wechseln

Zum Wechseln der Ebene drücken Sie den Ebenenumschalter unter den LEDs. Die blinkende grüne LED zeigt die aktuelle Ebene an. Betätigen Sie jetzt nochmals so oft den Ebenenumschalter bis die LED der gewünschten Ebene blinkt. Wechseln Sie das Deckblatt aus.

Ebene löschen

Zum Löschen einer kompletten Ebene drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk. Drücken Sie den Ebenenumschalter so oft, bis die zu löschende Ebene aktiviert ist. Betätigen Sie mit einem Stift den Löschknopf (ERASE) auf der Rückseite des GoTalk. Die Ebene wird gelöscht.

Achtung: Diese Funktion löscht nicht die Grundnachrichten!

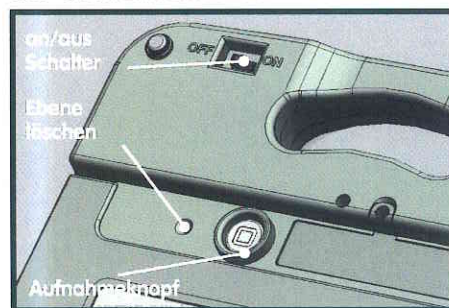

Rückseite



Sicherheitssperren

Es kann passieren, dass Anwender aus Versehen eine Nachricht löschen oder die Ebene wechseln. Zwei Sperren schützen davor.

So aktivieren Sie den Ebenenschutz:

Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk, die rote und eine grüne LED leuchten. Während Sie die Aufnahmetaste betätigt halten, drücken Sie einmal auf die Leiser-Taste. Die LEDs gehen aus, der Ebenenschutz ist aktiviert.

So aktivieren Sie die Aufnahmesperre:

Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des GoTalk, die rote und eine grüne LED leuchten. Während Sie die Aufnahmetaste betätigt halten, drücken Sie einmal auf die Lauter-Taste. Die LEDs gehen aus, die Aufnahmesperre ist aktiviert.

Sicherheitssperren ausschalten:

Schalten Sie den GoTalk aus. Schalten Sie den GoTalk jetzt mit gedrückter Aufnahme-Taste wieder ein. Die grünen LEDs leuchten nacheinander auf, der Beep ist zu hören und die Sperren sind ausgeschaltet.

Beide Sperren werden immer gleichzeitig ausgeschaltet!

Grundnachrichten

3 Tasten für Grundnachrichten

Für Aussagen, die auf allen Ebenen benötigt werden, stehen die Nachrichten der oberen Zeile zur Verfügung. Diese Nachrichten bleiben auf allen Ebenen gleich.



Diese Nachrichten stehen immer zur Verfügung!

Beispiel 1



Beispiel 2



Die Grundnachrichten werden sehr häufig und in unterschiedlichen Situationen benötigt. Diese Nachrichten können Grüsse, Fragen oder Grundbedürfnisse sein. Grundnachrichten bleiben gleich, unabhängig von der gewählten Ebene.

Deckblätter erstellen

Das Deckblatt dient der Anwenderin und dem Anwender als Merkhilfe, welche Nachricht unter welcher Taste gespeichert ist. Die Auswahl der Bilder, Symbole oder Beschriftungen sollte sorgfältig und gemeinsam mit dem Nutzer des GoTalk erfolgen. Lassen Sie beim Erstellen der Deckblätter die Tasten der Grundnachrichten immer gleich. Sie können die gestalteten Deckblätter durch das Einlegen in die Plastikhülle sehr gut vor Verschmutzung und Abnutzung schützen. Diese Schutzfolien können Sie auch ganz einfach aus klaren Prospekthüllen selbst herstellen. Wenn Sie die Deckblätter laminieren, sind diese sehr lange haltbar.

Achtung: Je fester das Deckblatt, desto höher ist die Auslösekraft der Tastfläche!

Ihr Ansprechpartner:

(C) deutsche Übersetzung:

REHA VISTA®
Kommunikationshilfen
für Menschen mit Behinderung
www.rehavista.de

Ideen



Deckblätter

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Deckblätter für den GoTalk zu erstellen.


Schreiben und zeichnen Sie auf die beiliegenden Leervorlagen oder kleben Sie Bilder auf.

Kleben Sie Klettband auf jedes Nachrichtenfeld um fühlbare Materialien für Anwender und Anwenderinnen mit Sehbehinderung anzubringen.

Drucken Sie das Deckblatt mit einer geeigneten Software (z.B. Boardmaker) am PC aus.

Fach für Deckblätter

Der GoTalk besitzt ein Fach, um die Deckblätter aller Ebenen im Gerät aufzubewahren.

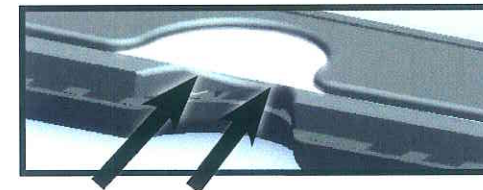

Tipp: Schreiben Sie die Nummer der Ebene auf das Deckblatt, so dass sie durch die Aussparung am Gehäuserand zu sehen ist.



Attainment Company, Inc.

P.O. Box 930160 • 504 Commerce Parkway
Verona, WI 53593-0160 USA

Tel: 1-608-845-7880 Fax: 1-608-845-8040

www.AttainmentCompany.com