

## Reisen mit Kommunikationshilfen

### Kann ich mein Kommunikationsgerät mit ins Flugzeug nehmen?

Auf in den Urlaub - natürlich darf auch in der Ferienzeit die Kommunikationshilfe nicht fehlen. Vor Flugreisen fühlen sich jedoch manche unterstützt kommunizierende Menschen verunsichert: Darf ich mein Gerät mit ins Flugzeug nehmen?



### Sie dürfen! Einige Dinge gibt es jedoch zu beachten:

- Da Fluggepäck bei der Verladung oftmals unsanft behandelt wird und außerdem im Frachtraum extremen Temperaturen ausgesetzt ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kommunikationsgerät im Handgepäck zu transportieren.
- Aufgrund der weltweit erhöhten Sicherheitsbestimmungen an Flughäfen sollten Sie für den Fall, dass Sie Ihr Hilfsmittel an der Sicherheitskontrolle demonstrieren müssen, genügend Zeit (zusätzlich zur empfohlenen Ankunftszeit) einplanen. Die Röntgenstrahlen bei der Gepäckdurchleuchtung schädigen Ihr Gerät nicht.
- Die Nutzung elektronischer Geräte an Bord ist während Start und Landung untersagt. Auch Ihre Kommunikationshilfe sollte während dieser Zeit ausgeschaltet bleiben. Die Verwendung von Geräten mit Funkverbindung (W-Lan, Bluetooth...) ist üblicherweise während des gesamten Flugs verboten. Ihr Gerät sollte davon jedoch nicht betroffen sein, so dass Sie nach dem Start wie gewohnt kommunizieren können.
- Für gesicherte Informationen empfehlen wir Ihnen, gegebenenfalls Kontakt mit der von Ihnen gebuchten Fluggesellschaft aufzunehmen.

**Tipp: Vergessen Sie nicht Ihr Gerät vor Reiseantritt komplett aufzuladen!**

**GUTE REISE!**

